



UgoFix benlomme/feste for oppsamlingspose

- Den fargede kanten skal alltid bæres opp og på utsiden av benlommen.
- Materialet er mykt med sømmen på utsiden for å beskytte huden. De elastiske trådene gir stabilitet og gjør lommen fleksibel til å ekspandere når posen fylles. Den øvre og nedre kanten er ekstra stabil.
- Lommens nederste kant har en forsterket bunnåpning som en tappekran kan føres ut av. Anbefalt maxsvolum på fylt pose er ca. 750 ml.
- I hver avdelingspakning med 4 benlommer medfølger 1 stk. vaskepose. For å opprettholde benposens optimale form og funksjon, anbefales det å bruke en vaskepose ved vask.
- Benlommen er laget av 76 % polyester, 24 % elasthan. Kan vaskes ved 60 grader. Anbefalt antall vask er 25–30

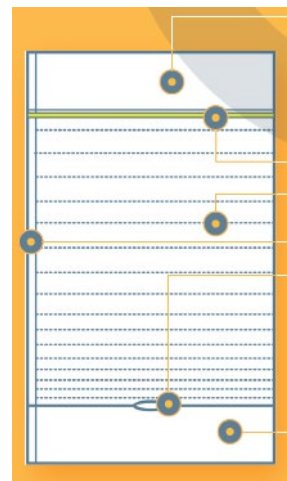

OBS! Mål låret eller leggen på den tykkeste delen og velg tilsvarende størrelse fra tabellen.

Artikkelnr.	Beskrivelse	Avd./Trpt.fp
603005	Small 24–39 cm	4/80
603006	Medium 36–55 cm	4/80
603007	Large 40–70 cm	4/80
603008	Extra Large 65–95 cm	4/80

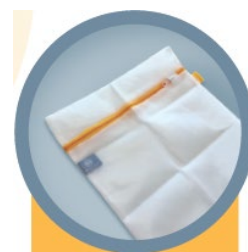

1. Trekk opp UGOFix benlommen over foten til passelig sted på lår eller legg. Den fargede kanten skal alltid bæres opp og på utsiden av benlommen
2. Plasser oppsamlingsposen i lommen via åpningen
3. Trekk ut tappekransen gjennom åpningen i bunnen av lommen og juster slik at fri strømning opprettholdes. Posen kan tømmes uten å flyttes.

