


Dato	Sign	Måned
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

Manual til vaskekapsel

Om nødvendigt kan Nemo rengøres ved aftørring med et hertil egnet produkt godkendt til rengøring i sundhedssektoren.

Nemos kamre rengøres dagligt ved at køre et program med en vaskekapsel og hvis nødvendigt med mekanisk rengøring.

1. Åben låget på Nemo.
2. Placer vaskekapslen i tømningseenheden.

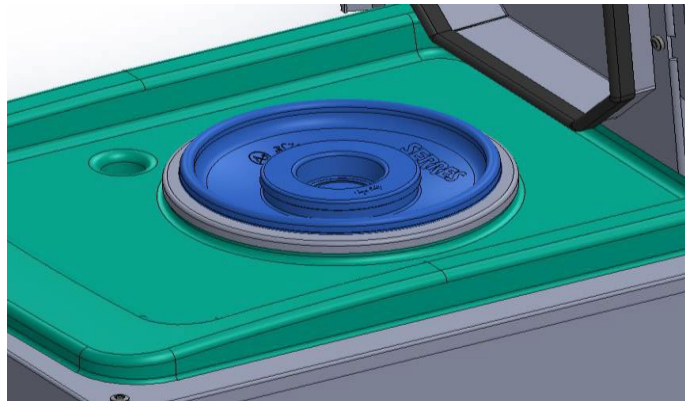

3. Luk låget ved at trykke det ned og start programmet ved at trykke på start/pause knappen på fronten. Nemo kører herefter et program på ca. 15 sekunder. Når programmet er afsluttet, slukker enheden selv.
4. Når programmet er afsluttet, kan låget åbnes og den brugte vaskekapsel kasseres.

Rengøringsprogrammet skal køres mindst én gang dagligt.