



KilRoid®

ENGANGS-SUGELIGERINGSENHED
TIL HÆMORIDER

KilRoid™ er en engangs sugeligerings-enhed til hæmori-der, og den er altid klar til brug. Ingen rengøring eller desinficering nødvendig. Ligeringsenheden betjenes med én hånd, dvs. kirurgen kan styre både proktoskopet og ligeringsenheden uden hjælp. Dette betyder, at KilRoid både er tidsbesparende og omkostningseffektiv ^(1, 2).


Hvis der er behov for bedre sigtbarhed, kan KilRoid bruges sammen med et videoendo-skopisk proktoskop, som er et prisbilligt alternativ til endoskopisk båndligering ⁽³⁾.

Sådan bruges KilRoid


Isætning



Før ligering påbegyndes, skal KilRoid isættes et bånd af silikone. Isætning foretages nemt ved at bruge den unikke isætningsenhed.

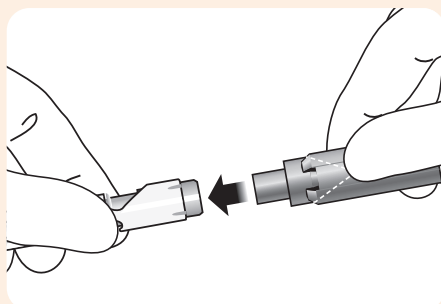


1. Før isætningskeglen ind i sugeenden på KilRoid-instrumentet. Bemærk: Sørg for, at isætningskeglen og sugeenden sidder tæt sammen, så der ikke er nogen plads imellem.

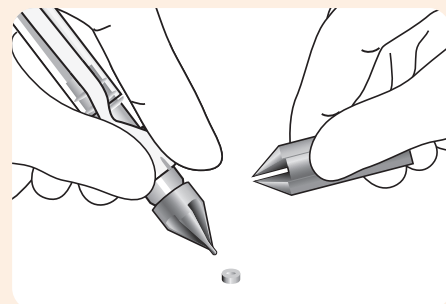


2. Anbring et silikonebånd på spidsen af isætningskeglen.


Betjening

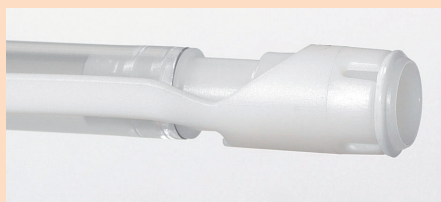

KilRoid er klar til brug, når silikonebåndet er sat på. Da KilRoid betjenes med én hånd, udfører kirurgen ligeringen alene ved at bruge den ene hånd til proktoskopet og den anden til ligeringsenheden. Ingen behov for hjælp.

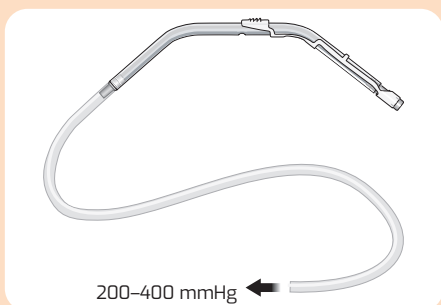


1. Tilslut KilRoid-instrumentet til ugekilden.

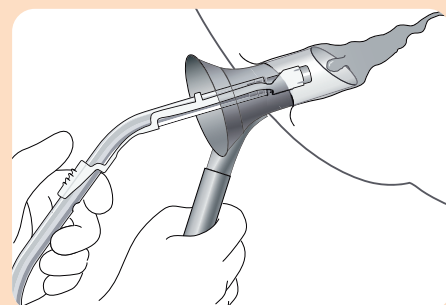


2. Find hæmoriden igennem et proktoskop. Instrumentet føres igennem proktoskopet, indtil hæmoriden er indkapslet i sugeendens lumen.


- **Praktisk** – rent instrument altid klar til brug
- **Tidsbesparende** – ingen assisterende personal behövs
- **Ingen hjælp nødvendig** – kan betjenes med én hånd, bedre sigtbarhed og større præcision
- **Hygiejnisk** – beskytter patienten, brugeren og sygeplejerskerne mod infektioner(2), produktet bortskaffes efter brug og eliminerer således risikoen for krydskontaminering
- **Unik isætningsenhed** – nem isætning af silikonebånd
- **Latexfrie silikonebånd** – formindsket risiko for allergiske reaktioner

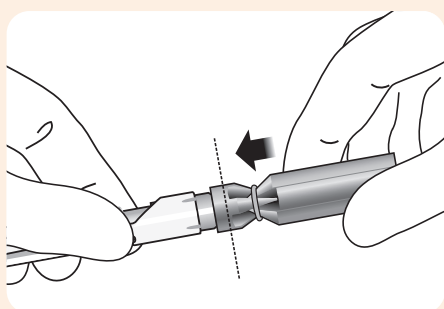


3. Anbring udvidelseskeglen på spidsen af isætningskeglen, og skub dem sammen – dette vil udvide silikonebåndet og føre det over på isætningskeglens nederste del.

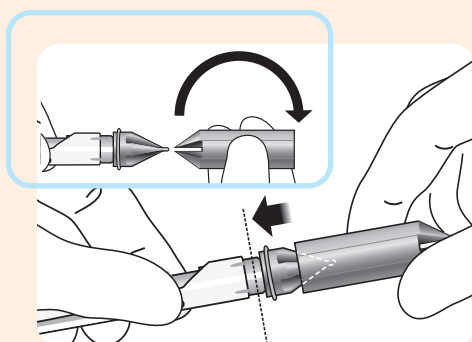


4. Træk udvidelseskeglen af isætningskeglen. Drej udvidelseskeglen 180°, så udvidelseskeglens åbne ende vender mod isætningskeglen. Skub silikonebåndet over på instrumentets sugeende.

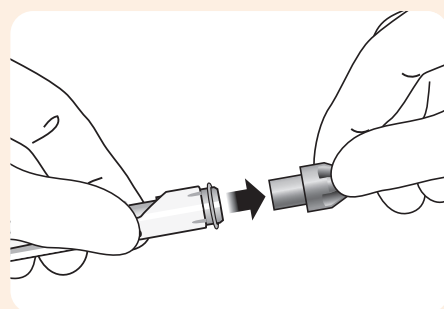


5. Fjern isætningskeglen – silikonebåndet sidder nu på sugeenheden, og instrumentet er klar til brug.

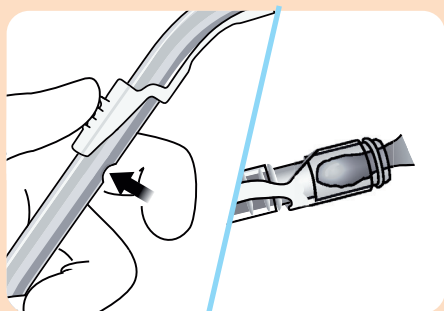


3. Vakuumpkontrolhullet lukkes til (med en finger), og hæmoriden suges ind i instrumentet.

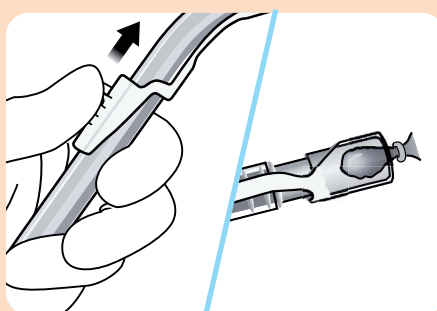

4. Udløseren betjenes ved at skubbe udløseren fremad med tommelfingeren. Dette affyrer båndet fra instrumentet og afbinder hæmoriens rod.

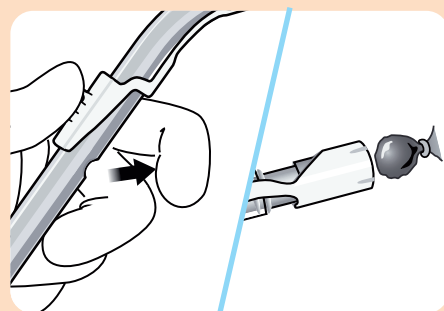

5. Instrumentet kan trækkes ud, når vakuumpkontrolhullet slippes.
Hvis flere hæmorider hos samme patient skal behandles, kan KilRoid isættes et andet silikonebånd. KilRoid kasseres, når behandlingen af patienten er færdig.

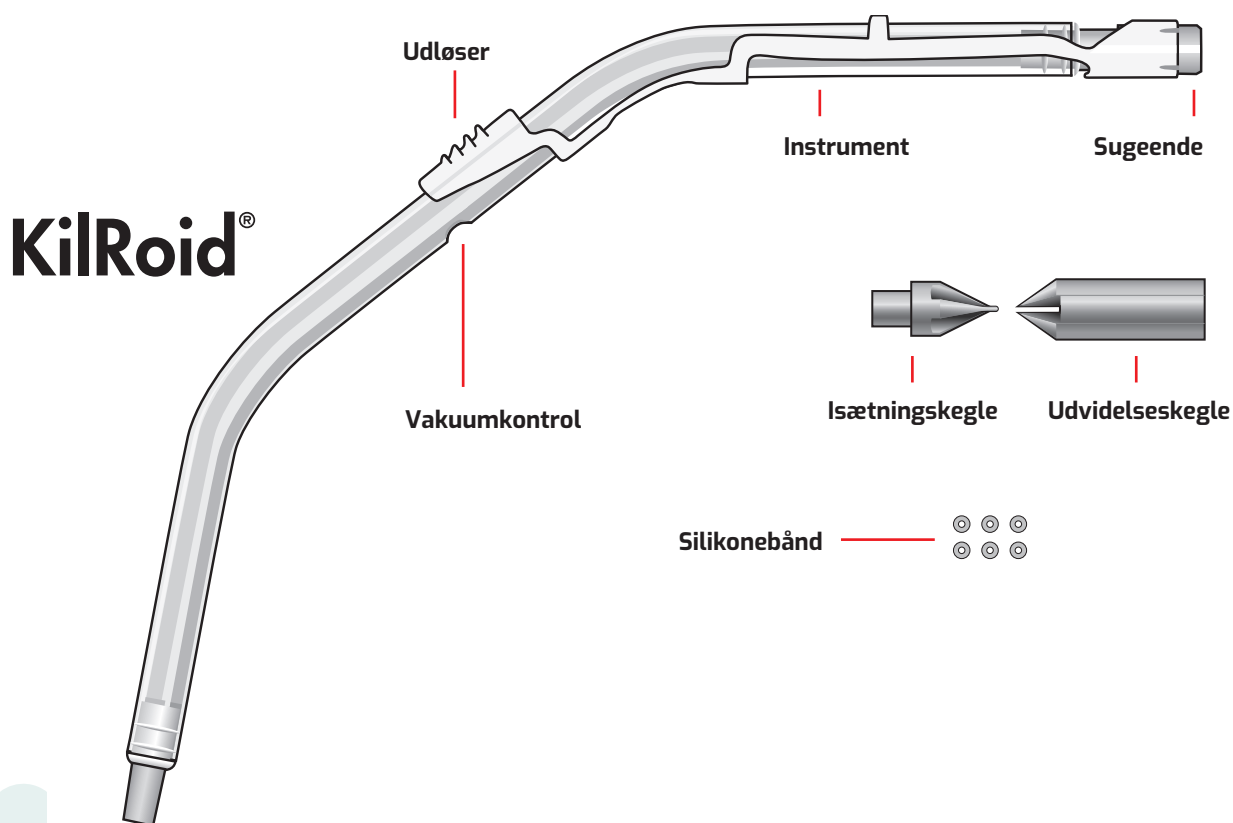

Beskrivelse

Materiale

PETG (instrument), PVC (slange), polyamid (udløser), polypropylen (isætningskegle), ABS (udvidelseskegle, mufte), silikonebånd.

Til engangsbrug

Alle komponenter er kun beregnet til engangsbrug. Må ikke anvendes, hvis emballagen er åben eller beskadiget.

Produktsortiment – KilRoid™

Ref No

67401	1x30	KilRoid™ med 2m slange
67400	1x30	KilRoid™ uden slange
Æske. 30/Trpt. 90		

Referencer:

1. Gallo, G et al.: Techniques in Coloproctology (2020) 24:145–164
2. Salgueiro, P et al.: GE Port J Gastroenterol 2020;27:90–102
3. Dickey W, Garrett D, Am J Gastroenterol, 2000;95:1714–16.

Producent: Mediplast AB / www.mediplast.com