


D R E N T E C H
UNICO  **TM**

DEN SENASTE LÖSNINGEN INOM PERKUTANT DRÄNAGE

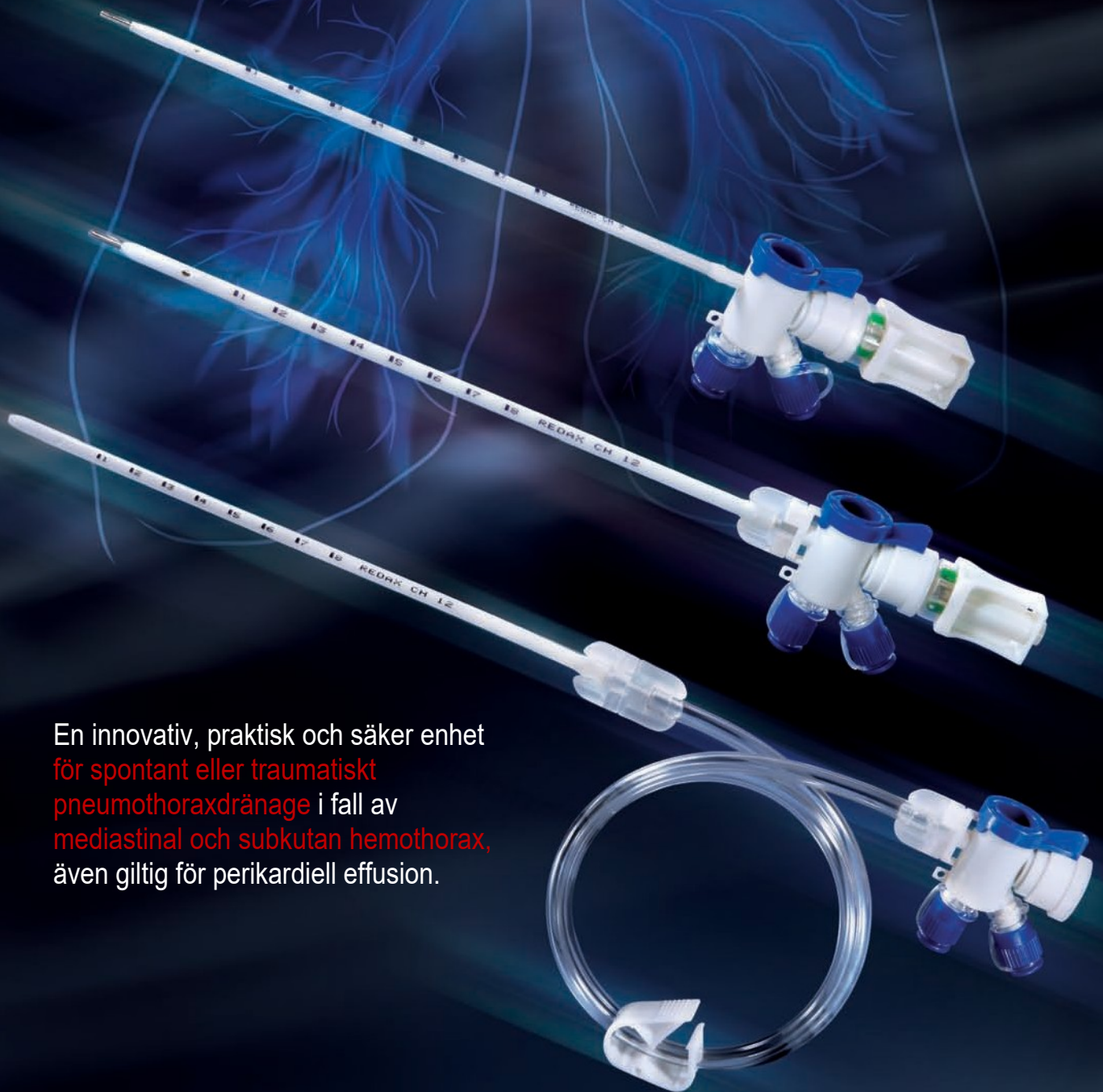

En innovativ, praktisk och säker enhet
för **spontan eller traumatiskt**
pneumothoraxdränage i fall av
mediastinal och subkutan hemothorax,
även giltig för perikardiell effusion.



REDAX TM
new drainage technologies born of experience

UNICO


Innovativ och säker dränering med perkutan åtkomst. De två backventilerna som är integrerade i systemet tillhandahåller alltid nödvändigt skydd för absolut patientsäkerhet och förenklar användningen i alla situationer, särskilt i akuta situationer (figur 1).



1.

2.

När nålen förs in i patientens hålighet, dras den avfasade spetsen på Verres nål (figur 3) in enligt vad som visas av den gröna indikatorn.

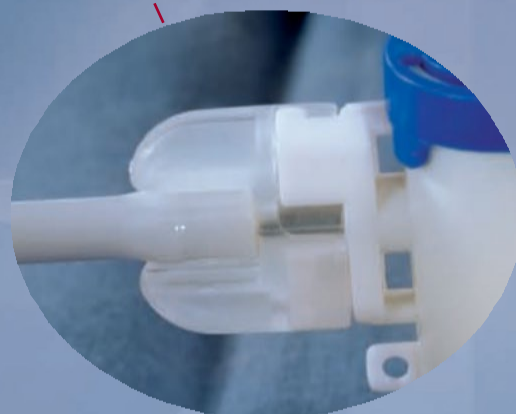

3.

Kanylen (figur 2) kan kopplas bort från enheten så att en förlängningsslang kan föras in för att öka patientkomforten. Detta förebygger att hematom och vävnadsnekros uppstår vid långvarig användning av dräneringen, i synnerhet när patienten ligger ner.

UNICO är en praktisk och lättanvänd enhet utformad för att tillgodose de många pleurala dränbehoven inom såväl kirurgi som kritiska och akuta situationer.




DRA OCH TRYCK - DRÄNAGE

Tack vare den integrerade backventilen kan vätskedrånage och -uppsamling utföras med användning av sprutan och påsen som ingår i setet (figur A).

Under alla procedurer är patienten säker utan risk för kontakt med ytermiljön. Produkten kan anslutas till olika uppsamlingssystem. Figur 4 och 5 visar hur drånage med gravitation kan utföras med påsen som medföljer setet.

Du kan även ansluta enheten till ett bröstkorgsdränuppsamlingssystem med hjälp av adaptorn som medföljer setet.

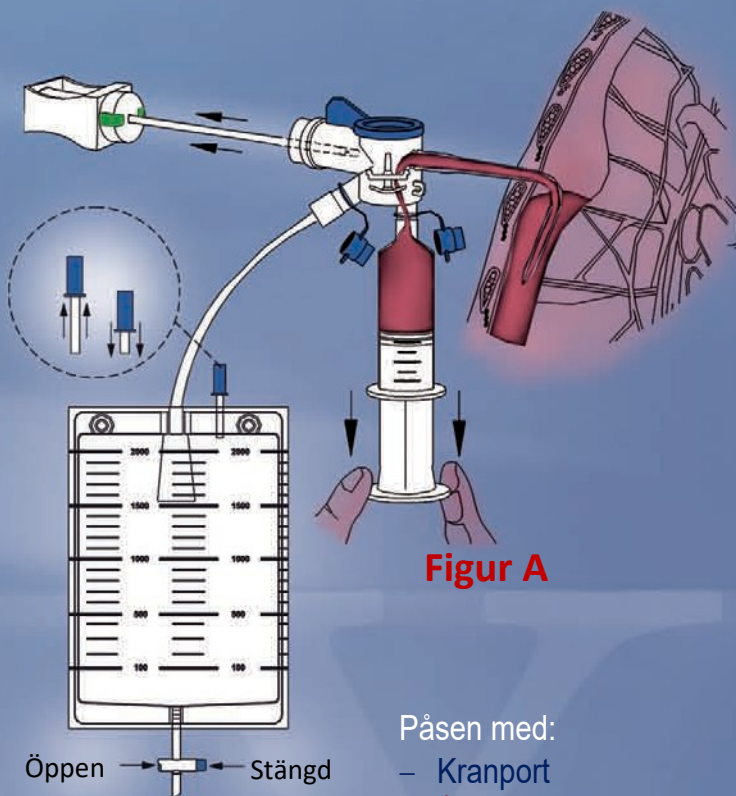

Påsen med:

- Kranport
- Återflödesventil
- Ventilation
- Kapacitet 2 liter



4.




5.

FÖRLÄNGNINGSSLANG

Vid långvarig användning av dränenheten kan du ansluta dränkatetern till en förlängningsslang (figur 6 och 7) med hjälp av en bajonettkoppling.

På så vis kan du fjärrstyra drånaget, minska personalens arbetsinsats och göra det bekvämare för patienten, som t.o.m. kan ligga ner (figur B).

Förlängningsslangen möjliggör användning av valfri uppsamlingsenhet och förbättrar drånagekontroll och förebygger dessutom att hematom och vävnadsnekros uppstår efter operationen.

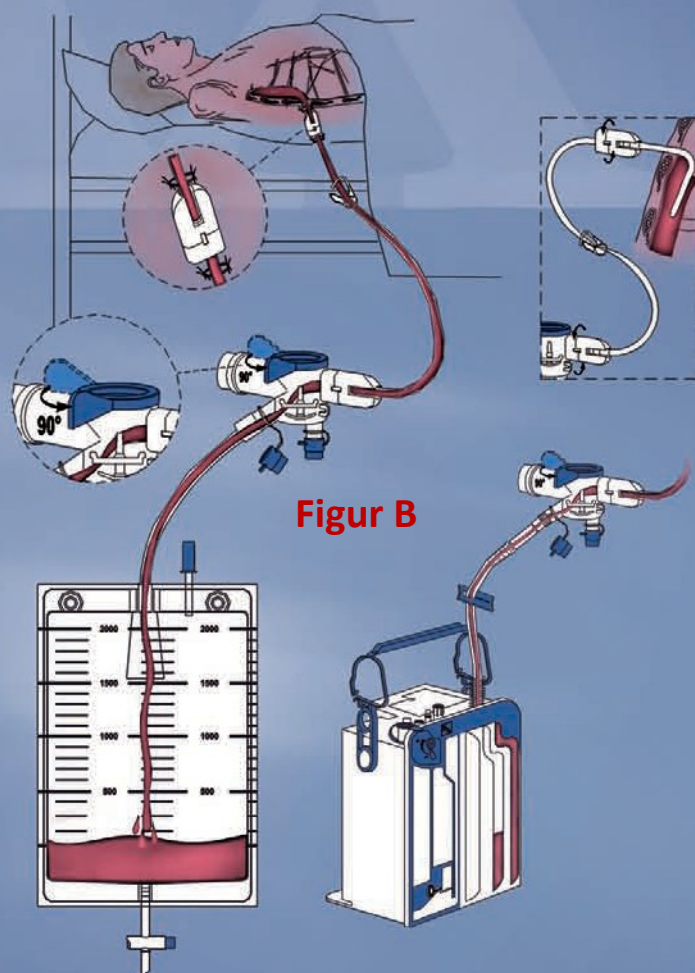

Figur B



6.



7.

UNICO STANDARD

Finns även i en version med fast dränkanyl som är idealisk för användning i kritiska och akuta situationer när användningen av enheten är tidsbegränsad. Enkel och säker införing av den perkutana dränheten garanteras alltid av Verres nål och envägsventilen som är integrerad i systemet.



UNICO finns med två olika diametrar (9 and 12 CH) både i standardversionen och i konfigurationen med förlängningsslang. Dränkanylen är tillverkad av 100 % röntgentät polyuretan. Det finns även en del tillbehör: dränpåsar och mandränger för ompositionering och rensning av kanylen.

UNICO PERCUTANT

Art.nr.

Standard perkutant set - CH9	6010800
Standard perkutant set - CH12	6010801
Perkutant set med förlängningsslang - CH9	6010802
Perkutant set med förlängningsslang - CH12	6010803

TILLBEHÖR

Art.nr. Antal/frp

Mandräng - CH9	6010809	10
Mandräng - CH12	6010811	10
Silikonblåsa för övervakning av läckage	6010808	10
Dränpåse	6012019	25

FÖRPACKNING 6 ST / FRP



REDAX S.r.l. Via Galileo Galilei, 18 - 46025 Poggio Rusco (MN) ITALY
Tel. +39 0386 830582 Fax +39 0386 51898 - E-mail: info@redax.it - www.redax.it

Återförsäljare:

MEDI PLAST

Medioplast AB

Box 1004, 212 10 Malmö

T 040 671 23 00 - www.mediplast.com

SE 200722