

SnapOn™ IloBa®

Den første ileostomipose i 2 dele med både kontraventil og specialkonstrueret filter



SnapOn™ IloBa® er et system af tømbarer ileostomiposer i 2 dele. Designet er unikt med indbygget kontraventil for at forhindre, at posens indhold løber tilbage til stomien, og som alle IloBa® poser et specialkonstrueret kulfilter med ekstra belægning, som forhindrer væske i at slippe ud. Hvis posen blæses op (såkaldt ballooning), trykker man let på posen med hænderne, så luftkanalerne åbnes, og luften kan passere kontrolleret ud gennem filteret.

SnapOn™ poserne har et fingregreb øverst oppe på koblingsringen. Det bruger du til at frigøre posen fra pladens koblingsring. På højre og venstre side af posens koblingsring er der fastgørelsesøjler til et bælte.

SnapOn™ poserne passer på alle SnapOn™ hudbeskyttelsesplader, også de konvekse! SnapOn™ Hudbeskyttelsesplader har et 2-lags hydrokolloidfæste, der giver en smidig pasform og maksimal udslipkontrol. De er også forsynet med en krave, som gør det lettere at montere SnapOn™ på koblingsringen.

Posen er dækket af et blødt, non-woven lag, som kan åbnes på forsiden ved inspektion. SnapOn™ IloBa® fås i størrelsernes Midi og Standard med to forskellige ringdiametre, 45 mm og 57 mm.

Varenr.	SnapOn™ IloBa® MIDI, vol. ca. 320 ml	Varenr.	SnapOn™ IloBa® STANDARD, vol. ca. 420 ml
220199	Ringdiameter 45 mm	220204	Ringdiameter 45 mm
220200	Ringdiameter 57 mm	220205	Ringdiameter 57 mm

30 styk i hver pakning