



Mediplast fleksible modulsystem

- Mobilt eller med ben for fast montering. «Du velger»
- Systemet er fleksibelt ettersom høyden på hyllene er tilpasset dine container og behov. Kan enkelt endres til nye mål
- De uttrekkbare hyllene gir deg et gunstig og ergonomisk arbeidsmiljø
- Hylleplanene er enkle å ta ut for f.eks. rengjøring
- Maks belastning/hylleplan: 20 kg
- Totalvekt: maks. 450 kg



Artikkelnr.	Beskrivelse (H x B x D)	Vekt inkl. hylleplan	Antall hylleplan
7047A001	1900 x 745 x 600 mm	89 kg	16
7047A011	1600 x 745 x 600 mm	74 kg	12
7047A016	850 x 745 x 600 mm	46 kg	6

Artikkelnr.	Beskrivelse (H x B x D)
7047-A044	Kurv for guider 159 x 298 x 598 mm



SILVER  STÅL

Materiale:

Medioplast Modul er produsert i 100 % rustfritt stål EN 4301 ekskl. hjul.

Uttrekkbart hylleplan 7047A028 produsert i rustfritt stål

Plastskinne i POM Plast Natur

Firkantet stang i PEHB

Vedlikehold:

Medioplast Modul krever ikke mye vedlikehold, bortsett fra rengjøring.

Når du rengjør modulen må du kontrollere modulen, f.eks. at skinnene sitter ordentlig. At rammen er solid og at det ikke er sprekker i rammen eller sveisingen.

Hjulene skal være hele og sitte fast. Hvis et hjul blir løst eller skadet, bør dette utbedres umiddelbart.

Kontakt Medioplast hvis det skulle oppstå en feil.

Rengjøring:

Modulen, unntatt de uttrekbare hyllene, kan vaskes i kabinett. De uttrekbare hyllene rengjøres med for eksempel alkoholbasert desinfeksjon til overflater.

Bruk kjemikalier som er godkjent og tilpasset for rustfritt stål.

OBS!

Tenk på at en full-lastet modul er tung! Selv om den er lett å trille, vis forsiktighet i trange miljøer, ved forflytning over kanter eller i hellende underlag.