



Medibender

Böjinstrument för öronsugar.

I rostfritt stål, osteril, kan autoklaveras.

Artikelnr	Beskrivning	Avd./Trpt. Fp
6066501	4.0, 3.0, 2.0, 1.4 och 1.0 mm	1/1

Gör så här:

1. Fatta instrumentet med tummen på Medioplastgraveringen
2. Tag den önskade storleken på sug
3. Sätt sugen i rätt hål
4. Böj sugen i instrumentets längdriktning till önskat gradantal



Tillverkare: Medioplast AB / www.medioplast.com