

independence with confidence

www.optimummedical.de

Ugofix™
sleeve leg bag holder
(manchet benposeholder)



Designet til at understøtte benposer
tilsluttet indvendige katetre.



optimummedical®

Ugo Fix™

sleeve leg bag holder

Hos **Optimum Medical** forstår vi behovet for sikker og pålidelig fastgørelse af kateter og benpose.

Vi har udviklet **Ugo Fix Sleeve** (manchet) til at give komfortabel støtte, således at patienten føler sig sikker nok til at bevæge sig frit rundt.

Ugo Fix Sleeve (manchet) er udviklet til at understøtte benposer tilsluttet uretrale og suprapubiske katetre.

LATEX-FRI

Primære fordele:


- Vaskbare, strikkede fiberblandinger giver styrke og holdbarhed
- Tilpasser sig benformen for endnu bedre fordeling af urin og reduceret støj
- Graduerede linjer af elastan giver støtte og kontrolleret udvidelse mens posen fyldes
- Udvendig søm forebygger beskadigelse af hud og giver komfort
- Forstærket udløbshul fastholder støtten
- Forøget bredde og styrke i øverste og nederste bånd giver støtte og fastholdelse
- Ingen unødvendige slangehuller i den øverste søm, hvilket forhindrer frakobling fra drænesystemet
- Farvekodet øverste søm hjælper med korrekt størrelse og genbestilling
- Ideelt tilbehør til Ugo Fix Catheter Strap (kateterrem)



SÅDAN IFØRES UGO FIX SLEEVE BENPOSEHOLDER

Inden iføring er det vigtigt at du måler rundt om den bredeste del af låret eller læggen, og bruger den korrekte størrelse fra tabellen herunder.

Æske	PIP Kode	Produktbeskrivelse	Varenummer	Karton
603005	394-0178	Ugo Fix Sleeve Small - 24cm-39cm	4 Stk.	80 Stk.
603006	394-0160	Ugo Fix Sleeve Medium - 36cm-55cm	4 Stk.	80 Stk.
603007	394-0152	Ugo Fix Sleeve Large - 40cm-70cm	4 Stk.	80 Stk.
603008	394-0145	Ugo Fix Sleeve Extra Large - 65cm-90cm	4 Stk.	80 Stk.

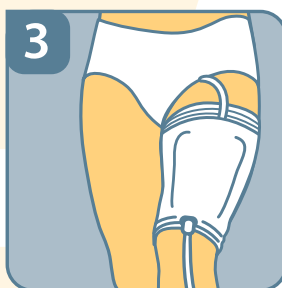

- 1 Træk **Ugo Fix Sleeve** (manchet) over foden og placer den på låret eller læggen. Sørg for at det farvede bånd sidder øverst og vender udad.
 - 2 Sæt din benpose ind i forlommen gennem åbningen øverst.
 - 3 Skub drænagehanen gennem hullet i bunden af manchetten og juster for at opnå bedst mulig drænage og komfort.
- Du kan nu tømme din benpose, uden at fjerne den fra **Ugo Fix Sleeve** (manchetten).

Vi anbefaler at **Ugo Fix Sleeve** (manchetten) udskiftes dagligt, eller før hvis remmen bliver forurenet.

For at gøre det lettere, har vi pakket manchetterne i sæt med 4 stk. af hensyn til den daglige brugs- og vaskecyklus.

For at fastholde **Ugo Fix Sleeve** (manchettens) optimale ydeevne anbefaler vi at patienten vasker manchetten i en vaskepose. Til hjælp med dette leverer vi en vaskepose med hver æske **Ugo Fix Sleeve** (manchetter).





optimum medical
support™



Træning og uddannelse for optimering af patientpleje

Besøg www.optimummedicalsupport.co.uk for at lære mere.

MILJØPOLITIK



Som producent af medicinske produkter er vi bevidst om, at vi har et ansvar for at begrænse vores påvirkning af miljøet og for at bevare naturlige ressourcer. Vi tilstræber at anvende den mindst mulige emballagestørrelse for at minimere materialeforbrug og derafbelastning af miljøet.



Ved transport af produkter sørger vi for at vores transportfunktioner er så effektive og miljøvenlige som muligt.

Alle trykte materialer er 50 % genbrug og certificeret i henhold til FSCs CoC-kædeprogram.



optimummedical

MEDI PLAST®

Forhandler: Mediplast A/S

Marielundvej 46E, 2730 Herlev

T 43 44 40 00 | info.dk@mediplast.com | www.mediplast.com

Optimum Medical

Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, United Kingdom

Tel.: +44 (0) 8456 435 479, Fax: +44 (0) 1142 383 826

enquiries@optimummedical.co.uk | www.optimummedical.co.uk

