




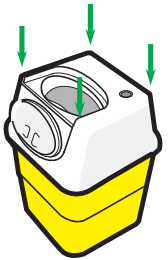





PRODUKTSPECIFIKATIONER				
Produktnavn	Sharpsafe kanyleboks 1,0 liter			
Producent	Frontier Medical Group, South Wales, UK			
Varenummer	DK4160			
Anvendelse og montering	Kanyleboksen er engangs og anvendes til sikker bortskaffelse af skarpt og smittefarligt affald Boksen er stabelbar og leveres usamlet – vend arket for vejledning			
Kapacitet op til fyldstreg (nettoindhold)	1,0 liter			
Dimensioner (h x b x d)	190 x 107 x 90 mm			
Aftagstyper	Luer lock, Luer slip, Novo-pen, skalpel, sommerfugl, blodtagningssystem			
Vægt (uden indhold)	128 gr			
Pakning	Karton: 100 stk. / Europalle: 12 x karton			
Materiale	Polypropylen (miljøvenligt materiale der omdannes til vand og kuldioxid ved forbrænding)			
Godkendelser			Produktet bærer to godkendelser: 1. Kitemark® (British Standard) 2. UN (United Nations)	
Advarsler			Produktet bærer en advarsel: 1. Boksens indhold udgør en biologisk risiko HUSK! Der bør altid udvises forsigtighed og agtpågivenhed i håndteringen af brugte kanylebokse	
Bortskaffelse	Bortskaffelse sker ved forbrænding Kanyleboksen er forsynet med en etiket (på engelsk), hvor man aht. sporing kan udfylde dato for ibrugtagning m.m.			
Beslag, stands og ophæng (Varenummer og beskrivelse)	DK4260	Krog		
	DK4262	Bøjle		


Vend arket og se vejledning →



SÅDAN SAMLER OG ANVENDER DU SHARPSAFE KANYLEBOKSEN

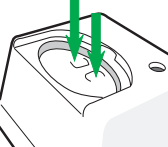 <p>1</p>	<p>Montering Sæt låget på beholderen Tryk på hvert hjørne af låget Et hørbart klik bekræfter, at låget er monteret korrekt på beholderen</p>
 <p>2</p>	<p>Midlertidig lukning Låget kan lukkes midlertidigt og åbnes igen ved at presse det let ned</p>
 <p>3</p>	<p>Åbning af midlertidig lukning For at åbne midlertidig lukning, ryk op i den lille flap</p>
 <p>4</p>	<p>Permanent lukning Når boksen er fuld, pres fast ned på låget og kanyleboksen er lukket permanent</p>

DK 200722

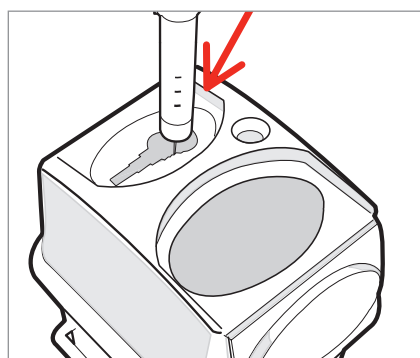

AFTAG PÅ SHARPSAFE 1,0 LITER

- Luer lock
- Luer slip
- Novo-pen
- Skalpel
- Sommerfugl
- Blodtagningssystem

Forhandler:

MEDI PLAST

Mediplast A/S

Marielundvej 46E, 2730 Herlev

T 43 44 40 00

info.dk@mediplast.com

www.mediplast.com