

MONITOIMINEN IMULETKU

Mitä terveydenhuollon parantamiseksi tarvitaan? Ennen kaikkea kaikkien alalla työskentelevien ihmisten jatkavan sitoutumistaan. Lisäksi, me Mediplastilla voimme myötävaikuttaa k uuntelemalla terveydenhuollon henkilöstön tarpeita ja luomalla uusia, tehokkaita ratkaisuja.

Mediplast on ruotsalainen lääkinnällisten tuotteiden toimittaja. Valikoimamme koostuu sekä omista korkealaatuisista tuotteista että muiden tunnettujen toimittajien tuotteista.



MONITOIMINEN IMULETKU

Mediplast on yhdessä tehohoito- ja anestesiahenkilöstön kanssa kehittänyt monitoimisen imuletkun, joka sopii erityisesti tehohoito-osaston päivittäiseen potilashoitoon. Letku on ftalaatitonta PVC:tä. Tämän tuotteen ansiosta varastoitavien nimikkeiden määrää voidaan vähentää ja näin tehostaa varastointia.

Letkussa on sekä imunsäädöllinen liitin että vakiokartio / naarasliitin. Pehmeä naarasliitin on taittumaton ja sen sisäpuoliset urat varmistavat liitoksen. Imunsäätö on helposti irrotettavissa, kun tarvitaan pelkästään naarasliitintä.




Imunsäädöllistä liitintä käytetään hengitysteiden imemiseen imukateetrilla, ja se sopii myös useimpiin sondeihin. Imunsäätöliittimessä on reikä sormea varten imun säätämiseksi.




Vakiokartio sopii suunhoitosettiin.




Naarasliitintä käytetään imettäessä suljetulla imujärjestelmällä.

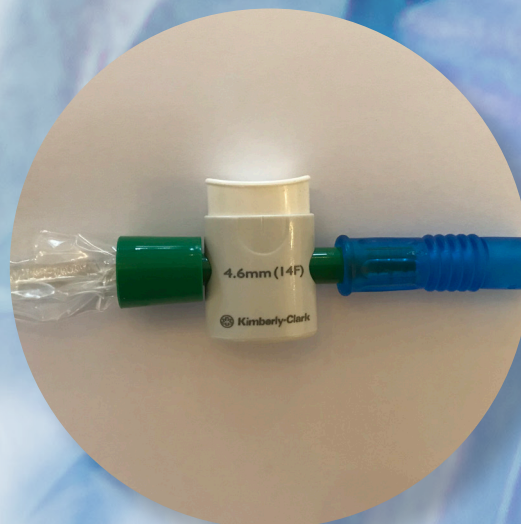

Sopii erittäin näytteenottoon.

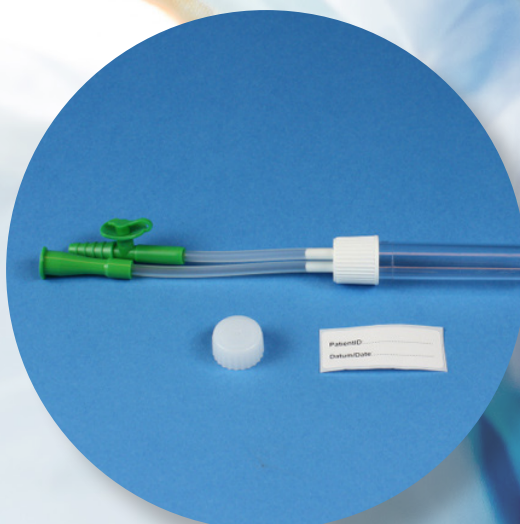

Letku toimitetaan tehdaspuhtaana, hygieniapakattuna muovipussiin.

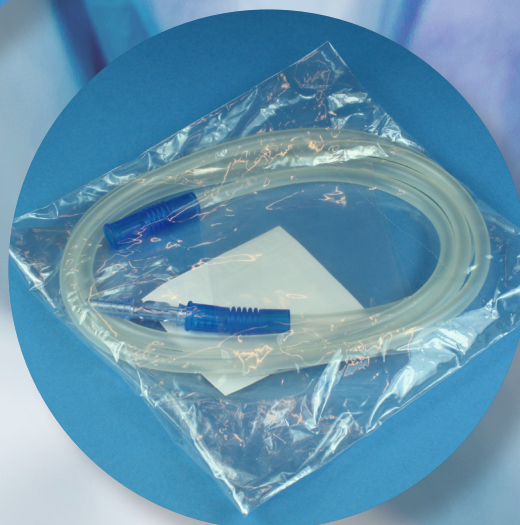

Imuletku Kartio + Kartio/nippa/imunsäätö

Osastopakk.= pienin määrä / tilaus

Tuotenro	Liittimet	Pituus	Sisä-/ ulkohalk. mm	Materiaali- pehmitin	Kovuus	Ch	Sterilointi	Osastopakk
6099942		200cm	5.6/8.2	PVC DOTP/ DEHT	75	25	Tehdas- puhdas	50

Terveystenhuollon parissa työskentely on tärkeä tehtävä. Me Mediplastilla tapaamme päivittäin terveydenhuollossa työskenteleviä ja työlleen omistautuneita ihmisiä, jotka tekevät parhaansa paremman ja turvallisemman hoidon toteuttamiseksi. He tekevät työtäyhyä useammille potilaille, entistä lyhyemmässä ajassa ja niukemmilla resursseilla.

Mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoa tuotteistamme, ota yhteyttä asiakaspalveluumme puhelimitse 09 276 360 tai vieraile kotisivullamme www.mediplast.com/fi.