

**ME
COVERS®**
ADDS INTEGRITY



MECOVERS BESKYTTELSE AF PRIVATLIVET

Giver en mere komfortabel undersøgelse

MeCovers er en nederdel, der øger komforten og værdigheden for patienten under medicinske undersøgelser af underkroppen.

Med nederdelen kan patienten tildække de dele af kroppen, som han eller hun ønsker og har brug for. På den måde mindskes de negative oplevelser ved at føle sig udsat og mangle kontrol.

MeCovers er et unisex-produkt, som forandrer og forbedrer mødet med sundhedsvæsenet for både mænd og kvinder ved at tilføre et lag af integritet og kontrol.


MeCovers er primært beregnet til brug ved gynækologiske, urologiske og urogynækologiske undersøgelser. Den kan anvendes hvor som helst og til de typer af medicinsk behandling eller pleje, hvor det kun er en bestemt del af kroppen, der skal være fuldt eksponeret.

MeCovers er et engangsprodukt, som holdes sammen med et elastikbånd. Nederdelen påføres ved, at man trækker den over hovedet eller træder ind i den med fødderne først. Åbningens position justeres ud fra, hvad der passer i den specifikke undersøgelse.

Varenummer	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
K6600013	MeCovers nederdel	10/100
K6600014	MeCovers nederdel	150/150
D6600010	Dispenserkasse til MeCovers nederdel	1/4

Æske = mindste kvantitet/bestilling

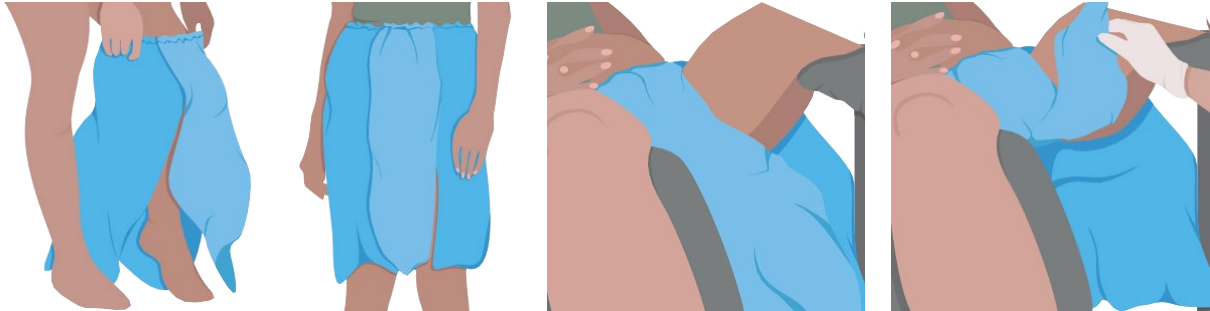

**OBS! Vigtig information**

- MeCovers er ikke steril og må derfor ikke anvendes på beskadiget hud eller ved åbne operationer. Beskadiget hud på patienten skal have bandage, inden nederdelen tages på.
- Lille statisk opladning kan forekomme. Brug ikke ESD-følsomme elektroniske instrumenter samtidigt med nederdelen.
- Nederdelen produceres i én størrelse. Sundhedspersonalet skal instruere patienten: Hvis nederdelen er for lang, skal patienten holde den op, når han eller hun går

100% polypropylen

OBS! Kan smelte ved høj varme eller ild

Medicinsk udstyr

I overensstemmelse med EU direktivet
MDR 2017/745 - Klasse I, ikke-steril

