

# Chlorine Disinfection

## Engangskluter med aktiv klor



Artikelnr.: 6025074



Artikelnr.: 6025058

**Desinfeksjon med stort spekter**  
**Lett anvendelig**  
**Alltid riktig dosering**

**Wet Wipe engangskluter med klorindesinfeksjon er impregnerte med klorpulver**  
Pakken inneholder en sprekkbar væskepose. Når posen sprekker, renner væsken ut til våtservietter, som er klar til bruk etter 7 minutter. Med Wet Wipe Chlorine Disinfection oppnås optimal og enkel desinfeksjon.

#### **Bruksanvisning:**

- 1. Slå/rapp på baksiden av pakken.**
- 2. La posen ligge opp ned i minst 7 minutter.**
- 3. Snu posen igjen. Klutene er klare til bruk.**

#### **Anvendelse**

Desinfiserer effektivt mot Norovirus og for eksempel HIV og hepatitt B, vegetative bakterier og gjær. Brukes til desinfeksjon av overflater av medisinsk utstyr og inventar for eksempel kontaktpunkter for pasienter i isolasjon.

10 minutters kontakttid.

#### **Merk**

Engangsklutene beholder sine desinfeksjonsegenskaper >1000 ppm aktivt klor i 7 dager etter åpning. De produseres i to størrelser.

**Artikelnr. 6025074: Chlorine Disinfection Maxi**  
Kartong med 24 pakker = 120 kluter  
1 pakke inneholder 5 kluter, 43x30 cm

**Artikelnr. 6025058: Chlorine Disinfection Mini**  
Kartong med 20 pakker = 200 kluter  
1 pakke inneholder 10 kluter, 21x30 cm

#### **Innhold**

Aktiv klor > 1000–1200 ppm.

Hållbarhet etter oppningsdatum 7 dager.

Produsert i Tyskland.  
Datasikkerhetsbladet er tilgjengelig ved forespørsel.

Wet Wipe A/S  
Vallensbækvej 65  
DK-2625 Vallensbæk  
Tel: +45 43 62 19 43  
info@wetwipe.dk  
www.wetwipe.dk  
CVR: 30207726

**wetwipe®**

81-050, 221208

Forhandler  
**Mediplast AS**  
Tollbugata 115  
3041 Drammen  
Tel: +47 32 88 11 00  
www.mediplast.com

**MEDI PLAST®**