


1. För användning av narkosläkare, anesthesiologer, IV-personal och narkossköterskor för att undvika hornhinnetorrhet och för att reducera uppkomsten av sår på hornhinnan under allmän narkos, vid behandling med lugnande medel eller motsvarande förfaranden där skador på hornhinnan eller hornhinnetorrhet kan bli ett problem.
2. Kontrollera att ögonen är slutna genom det genomskinliga fönstret.
3. Ett bindemedel på det genomskinliga fönstret säkerställer att ögonlockets ytterkanter sluts ordentligt.
4. En fullständig slutning av ögonen bidrar till naturlig smörjning.
5. CORNEA-CARE* bidrar till uppkomsten av en mikrofuktmiljö under den genomskinliga filmen som en följd av temperaturskillnaden mellan kroppen och operationssalen. Denna fuktiga miljö håller ögonlockets kanter fuktade.
6. Vanliga, enkla tejper är vätskegenomsläppliga och medför risk för korskontaminering från händer, saliv från intubation och spår av bedövningsmedel. Denna risk reduceras med en "beröringsfri teknik" där man använder sig av ett delat skyddspapper i förbandet för vård av hornhinnan.
7. Minska förlusten av ögonbryn och ögonfransar vid borttagningen.
8. Förbättra patientvårdens kvalitet.
9. Lätt att applicera och lätt att ta bort.
10. En storlek. Latexfritt.
11. e-postadress för kommentarer och förslag: aqz@eircom.net

LÄS DETTA INNAN FÖRBANDET ANVÄNDS

Ögonskyddsförband CORNEA-CARE används för att rent och effektivt sluta ögonen. Det övre ögonlockets relativa rörlighet utnyttjas för att sluta tätt mot det under ögonlocket. Förbandet kan användas på patienter vid allmän narkos, vid ventilation under längre tid och under andra liknande förhållanden.

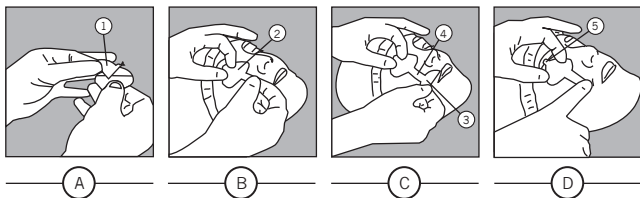

- A. Ta bort det övre skyddspapperet (1) och håll förbandet mellan tummen och pekfingeret.
- B. Dra försiktigt ögonbrynet uppåt med det ena pekfingeret och placera den övre, vidhäftande dele (2) över det övre ögonlocket, under ögonbrynet.
- C. Ta bort det undre skyddspapperet (3) och dra i flik (4) för att applicera den undre, vidhäftande delen över ansiktets överkäkparti.
- D. Slå försiktigt ut CORNEA-CARE för att sluta ögat.
När behandlingen är slutförd drar man bara den övre fliken (5) nedåt.

FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR

Den vidhäftande ytan får INTE komma i kontakt med hornhinnan.

Använd inte förbandet på patienter som är allergiska mot tejper/plåster, eller som får steroidbehandling eller har hudåkommor.

Vidtag ytterligare försiktighetsåtgärder vid risk för skador på ögonen, exempelvis framstupaläge. Använd inte förbandet på patienter med artificiella ögonfransar.

En del patienter kan få lätta, övergående hudreaktioner.

AQZ Limited. Medical Safety Products.

PO Box. 7369. Dublin 15, Ireland. aqz@eircom.net

*AQZ Logo and Cornea Care are trademarks of AQZ Ltd. Ireland. ©2006. All rights reserved.