

Ethanol Disinfection

Engangskluter med høy alkoholkonsentrasjon



Artikelnr.: 51153



Artikelnr.: 51133

Hurtigvirkende desinfeksjonsmiddel Enkel å bruke

Bruksanvisning

For desinfisering av medisinske enheter kompatible med etanol, og for desinfeksjon av kontaktoverflater, f.eks. i operasjonssalen, på intensivavdelingen, på undersøkelsesrommet, eller andre avdelinger.

Hurtigvirkende mot vegetative bakterier og gjærsopp, på grunn av den høye konsentrasjonen av alkohol.

I henhold til tester fra uavhengige laboratorier, Dr. Brill og MikroLab Germany, minimerer Wet Wipe Ethanol Disinfection bakterier eller gjærsopp.

Testrapportert og dokumentert effektivitet ved 30 sekunders inkubasjonstid er tilgjengelig ved forespørsel.

Oppbevaring

Wet Wipes engangskluter impregnerte med etanol oppfyller kravene i UN 3175, dvs. faste stoffer som inneholder brannfarlige væsker, og er derfor unntagen fra tekniske forskrifter for oppbevaring og håndtering av brannfarlige væsker. Produktet kan oppbevares og håndteres som et fast, brannfarlig stoff.

Bruk desinfeksjonsmidler forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Transport

Nettoinnholdet i en forpakning er mindre enn 1 kg fast materiale som inneholder brannfarlig væske, som betyr at produktet kan transporteres som farlig gods i begrenset mengde.

Kartongen er derfor LQ-merket.

Artikkelnummer

Engangsklutene fåes i to størrelser.

Artikelnr. 51153: Ethanol Disinfection Maxi
kartong med 12 forp. = 240 kluter
1 forp. inneholder 20 kluter, 43x30 cm

Artikelnr. 51133: Ethanol Disinfection Mini
kartong med 20 forp. = 500 kluter
1 forp. inneholder 25 kluter, 20x30 cm

Innhold

Etanol 70 %.

Holdbarhet etter åpning er 30 dager.

Produsert uten parfyme, farge og denatureringsmidler.
Produsert i Tyskland. Sikkerhetsinformasjon og bruksanvisning er tilgjengelig ved forespørsel.

Wet Wipe A/S
Vallensbækvej 65
DK-2625 Vallensbæk
Tel: +45 43 62 19 43
info@wetwipe.dk
www.wetwipe.dk
CVR: 30207726

wetwipe®

M51-052, NO, Ver. 2
PG, Jan 2022

Forhandler
Mediplast AS
Tollbugata 115
3041 Drammen
Tel: +47 32 88 11 00
www.mediplast.com

MEDI PLAST®