
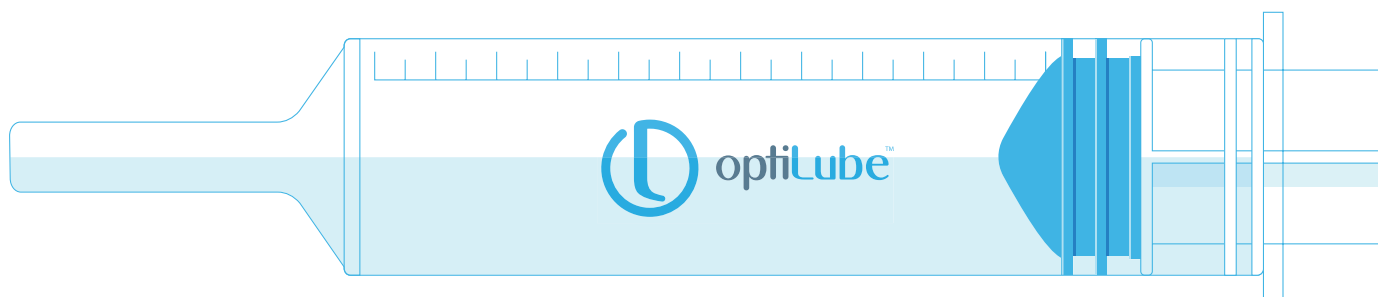


Kateteriseringsgel

Sprutor utformade för optimal applicering av gel vid kateterisering

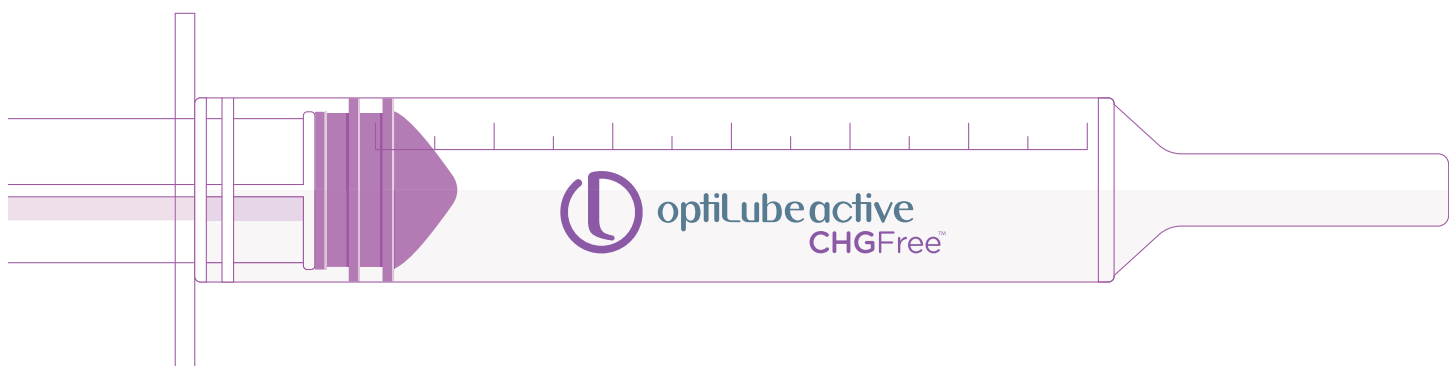

Möter patientens behov.
Svarar på klinikens krav.
Ger dig ett alternativ.

Vi erbjuder ett alternativ

Booth and Clarkson (2012) föreslår som bästa praxis vid kateterisering att "...patienten erbjuds alternativ."¹

För att ge klinikerna fler alternativ erbjuder vi ett antal olika typer av glidgel för användning vid kateterisering. De sterila sprutorna är individuellt förpackade för optimal hantering. Volymerna i de olika sprutorna bidrar till att hela urinröret täcks av glidgelen och att proceduren kan genomföras aseptiskt, vilket medför att kateteriseringen blir mindre obehaglig för patienten samt minskar risken för infektion.



optiLube^{active}

OptiLube Active ökar fördelarna genom att ge lokalanestesi (Lidokain 2%) och samtidigt vara antiseptiskt (klorhexidylglukonat 0,25 %).

ART.NR	BESKRIVNING	AVDELNINGSFÖRPACKNING	TRANSPORTFÖRPACKNING
60101160	OptiLube Active, förfylld spruta, 6 ml	10	200
60101161	OptiLube Active, förfylld spruta, 11 ml	10	200



optiLube^{active}
CHGFree

OptiLube Active CHG Free innehåller bedövningsmedel (Lidokain 2%). Det är idealiskt för patienter med överkänslighet för klorhexidylglukonat.

ART.NR	BESKRIVNING	AVDELNINGSFÖRPACKNING	TRANSPORTFÖRPACKNING
60101167	OptiLube Active CHG Free, örfylld spruta, 6 ml	10	200
60101168	OptiLube Active CHG Free, förfylld spruta, 11 ml	10	200



optiLube

OptiLube sprutor är vattenlösliga och innehåller inga ytterligare aktiva ingredienser – de är därför idealiska för patienter med allergi eller överkänslighet.

ART.NR	BESKRIVNING	AVDELNINGSFÖRPACKNING	TRANSPORTFÖRPACKNING
60101125	OptiLube, förfylld spruta, 6 ml	10	200
60101126	OptiLube, förfylld spruta, 11 ml	10	200

Vi lyssnar på läkare och patienter

OptiLube Active och OptiLube Active CHG-Free och OptiLube följer riktlinjerna för bästa praxis:

"En passande steril engångsspruta med glidmedel ska användas innan katetern förs in för att minimera skada i urinröret, obehag och infektion."² **EAUN (2012)**

När sjukvårdspersonalen har bedömt kateteriseringen kan lämpligt glidmedel väljas, utifrån vårt sortiment, med utgångspunkt av patientens individuella behov.

1 Minskar risken för skada i urinröret

"Genom att använda en spruta för att tillföra glidmedel i urinröret säkerställs att dilatering uppnås och att det känsliga uroepitelet skyddas med en obruten gelad hinna som skyddar urinröret från skada."³ **Muctar (1991)**

2 Minskar risken för ingreppsrelaterad infektion

"Cirka 15 % av kateterrelaterade infektioner i urinröret har knutits till dålig aseptisk teknik när urinrörets mynning rengörs och katetern förs in och ligger kvar."⁴ **Newman (2010)**

3 Minimerar smärta och obehag under ingreppet

"Graden av obehag minimeras om en passande steril engångsgel eller bedövningsgel används."⁵ **NICE (2012)**

Levereras i ett välkänt sprututförande för uretral och suprapubisk applicering

- Tillverknings- och utgångsdatum samt LOT-nummer finns på en avdragbar etikett på sprutan och kan därför lätt användas för korrekt journalföring
- Intuitiv design, passar perfekt för att användas med endast en hand
- Sprutan är lätt att prima för exakt och kontrollerad applicering
- Ergonomiskt utformad spets undanröjer risken för att vävnaden sugas in eller skadas
- Tack vare mätmarkeringen på sprutans sida kan en exakt mängd gel appliceras med precision
- Den yttre blisterförpackning är slittålig och skyddar sprutan även när den inte förvaras i sin originalkartong
- Latexfri och hypoallergen



"OptiLube Actives förpackning möjliggör minimal hantering av sprutan, vilket underlättar för läkaren att bevara det sterila området under hela ingreppet."⁶
Mangnall (2012)

Gör ett val

Vilken glidgel ska jag använda för att få bästa effekt vid kateterisering?

Detta flödesschema har tagits fram med syfte att hjälpa sjukvårdspersonalen att välja den mest lämpliga kateteriseringsgelen för patienten. Detta är enbart en visuell vägledning. Val av kateteriseringsgel ska alltid göras utifrån lokal policy för kateterisering och baseras utifrån bedömningen av respektive patient.

Suprapubisk

Vi rekommenderar 6 ml **OptiLube** för alla rutinbyten av suprapubiska katetrar på grund av att kateterbytet i dessa fall måste göras snabbt.*

Uretral

Är patienten överkänslig för, eller allergisk mot, klorhexidin? Finns det några kontraindikationer för användning av det?

JA

NEJ

Är patienten överkänslig för, eller allergisk mot, Lidokain? Finns det några kontraindikationer för användning av det?

JA

NEJ

OptiLube är det bästa alternativet för patienten. Finns i spruta om 11 ml (män) och 6 ml (kvinnor).

Du kan använda **OptiLube**, **OptiLube Active** eller **OptiLube Active CHG-Free**. Dessa finns i spruta om 11 ml (män) och 6 ml (kvinnor).

Är patienten överkänslig för, eller allergisk mot, Lidokain? Finns det några kontraindikationer för användning av det?

JA

NEJ

OptiLube är det bästa alternativet för patienten. Finns i spruta om 11 ml (män) och 6 ml (kvinnor).

Du kan använda **OptiLube** eller **OptiLube Active CHG-Free**. Bägge finns i spruta om 11 ml (män) och 6 ml (kvinnor).


Gelning vid suprapubisk kateterisering

*På grund av det snabba förfarandet i samband med byte av suprapubisk kateter kommer inte de bedövande egenskaperna hos **OptiLube Active** och **OptiLube Active CHG-Free** att uppnå full effekt (det tar ca 3–5 minuter för bedövningen att verka).



optimum medical
support™

För att underlätta för sjukvårdspersonalen att använda sprutorna på bästa sätt, att göra införingsproceduren så bekväm som möjligt, erbjuder vi utbildningsmaterial med bl.a. animationer av kateterisering av kvinnor respektive män samt tillhörande broschyr.

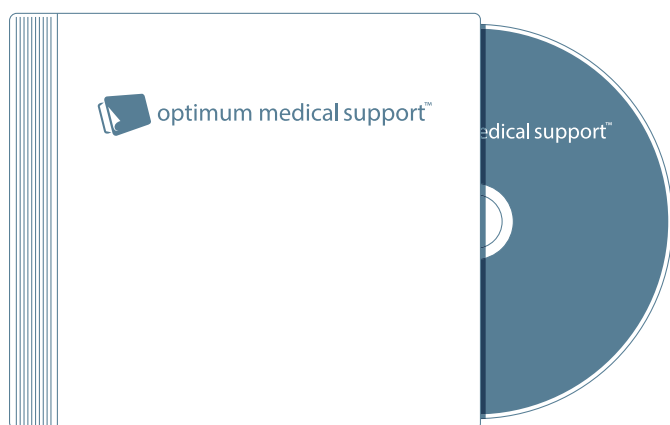

För att få en DVD och tillhörande broschyr gratis är du välkommen att kontakta marketing@optimummedical.co.uk

Du kan också se animationerna online på www.optimummedicalsupport.co.uk
För mer information om de sterila förfyllda sprutorna och deras användningsområden, kontakta enquiries@optimummedical.co.uk.

Återförsäljare:

MEDI PLAST®

Medioplast AB

Box 1004, 212 10 Malmö

T 020-78 80 35

mediplast.info@mediplast.com

www.mediplast.com

- 1 Booth F. & Clarkson M. (2012) Principles of Urinary Catheterisation. Journal of Community Nursing. May/June, vol 26, issue 3, pp 37-41
- 2 The European Association of Urology Nurses (2012) Evidence Based Guidelines for Best Practice in Urology Healthcare. Catheterisation, Indwelling Catheters in Adults. Urethral and Suprapubic. Netherlands: The European Association of Urology Nurses
- 3 Muctar S. (1991) The importance of a lubricant in transurethral interventions. Urologie (B) 31: 153-155
- 4 Newman D K. (2010) Prevention and Management of Catheter-Associated UTIs. Infectious Disease Special Edition. P13-20. Available at http://www.idse.net/download/UTL_IDSE10_WM.pdf – Accessed 26th February 2015 NICE (2012)
- 5 National Institute for Health and Care Excellence (2012) Guidance 139. Infection: Prevention and Control of Healthcare-associated Infections in Primary and Community Care. London: National Institute for Health and Care Excellence; Available at www.nice.org.uk.
- 6 Mangnall J. (2012) Optilube Active. The role of lubricants in urinary catheterisation. British Journal of Community Nursing. Vol 17, No9. Pp 414-420



optimummedical®

Optimum Medical

First floor, Unit 5, Armley Court,
Armley Road, Leeds, LS12 2LB, UK

Tel.: +44 (0) 8456 435 479

Fax: +44 (0) 1142 383 826

enquiries@optimummedical.co.uk

www.optimummedical.co.uk



Company Registration No: 6779883

OMS-MP-2700-Apr17-2 SWE