

Chlorine Disinfection

Engangskluter med aktiv klor



Artikelnr.: 6025074



Artikelnr.: 6025058

Desinfeksjon med stort spekter
Lett anvendelig
Alltid riktig dosering

Wet Wipe engangskluter med klorindesinfeksjon er impregnerte med klorpulver
Pakken inneholder en sprekkbar væskepose. Når posen sprekker, renner væsken ut til våtservietter, som er klar til bruk etter 7 minutter. Med Wet Wipe Chlorine Disinfection oppnås optimal og enkel desinfeksjon.

Bruksanvisning:

- 1. Slå/rapp på baksiden av pakken.**
- 2. La posen ligge opp ned i minst 7 minutter.**
- 3. Snu posen igjen. Klutene er klare til bruk.**

Anvendelse

Desinfiserer effektivt mot Norovirus og for eksempel HIV og hepatitt B, vegetative bakterier, mugg og gjær. Brukes til desinfeksjon av overflater av medisinsk utstyr og inventar for eksempel kontaktpunkter for pasienter i isolasjon.

10 minutters kontakttid.

Merk

Engangsklutene beholder sine desinfeksjonsegenskaper >1000 ppm aktivt klor i 7 dager etter åpning. De produseres i to størrelser.

Artikelnr. 6025074: Chlorine Disinfection Maxi
Kartong med 24 pakker = 120 kluter
1 pakke inneholder 5 kluter, 43×30 cm

Artikelnr. 6025058: Chlorine Disinfection Mini
Kartong med 20 pakker = 200 kluter
1 pakke inneholder 10 kluter, 21×30 cm

Innhold

Detergent < 0,1%
Aktiv klor > 1000–1200 ppm.

Hållbarhet etter oppningsdatum 7 dager.

Produsert i Tyskland.
Datasikkerhetsbladet er tilgjengelig ved forespørsel.

Wet Wipe A/S
Vallensbækvej 65
DK-2625 Vallensbæk
Tel: +45 43 62 19 43
info@wetwipe.dk
www.wetwipe.dk
CVR: 30207726

wetwipe®

81-050, NO, Ver. 5
Jan 2018 2

Forhandler
Mediplast AS
Tollbugata 115
3041 Drammen
Tel: +47 32 88 11 00
www.mediplast.com

MEDI PLAST®