



Medioplast flexibla modulsystem

- Mobilt eller med ben för fast montering. "Du väljer"
- Systemet är flexibelt, då höjden på hyllorna anpassas efter dina containers och behov. Kan lätt ändras till nya mått
- De utdragbara hyllorna gör att du får en gynnsam och ergonomisk arbetsmiljö
- Hyllplanen är enkla att ta ut för tex. rengöring
- Max belastning / hyllplan: 20 kg
- Totalvikt: max 450 kg



Artikelnr.	Beskrivning (H x B x D)	Vikt inkl hyllplan	Antal hyllplan
7047A001	1900 x 745 x 600 mm	89 kg	16
7047A011	1600 x 745 x 600 mm	74 kg	12
7047A016	850 x 745 x 600 mm	46 kg	6

Artikelnr.	Beskrivning (H x B x D)
7047-A044	Korg till gejder 159 x 298 x 598 mm



Tillverkas i Sverige

Material:

Mediplast Modul är tillverkad i 100% rostfritt stål EN 4301 exkl. hjul.
Utdragbart hyllplan 7047A028 tillverkad i rostfritt stål
Plastskena i POM Plast Natur
Fyrkantsstav i PEHB

Underhåll:

Mediplast Modul kräver inget större underhåll, mer än rengöring.
Passa på vid rengöring av Modulen, att kontrollera modulen, tex. att skenor (gejdern) sitter som de ska. Att ramen är hel och att det inte finns sprickor i ram eller svetts.
Hjulen skall vara hela och sitta fast. Skulle ett hjul bli löst eller skadat, skall detta åtgärdas omgående.
Kontakta Mediplast om ett fel skulle uppstå.

Rengöring:

Modulen, exklusive utdragbara hyllor, kan diskas i cabinet. Utdragbara hyllor rengöres med exempelvis alkoholbaserad ytdesinfektion.

Använd kemikalier som är godkända och anpassade för rostfritt stål.

OBS!

Tänk på att en fullastad Modul är tung! Även om den är lätt att rulla så iakttag försiktighet i trånga miljöer, vid förflyttning över kanter eller på lutande underlag.

Tillverkas i Sverige