

Chlorine Disinfection

Engångsdukar med aktivt klor



Artikelnr.: 6025074



Artikelnr.: 6025058

Allsidigt desinfektionsmedel
Enkelt att använda
Alltid rätt dosering

Wet Wipe engångsdukar Chlorine Disinfection är indränkta med pulverbaserad klor

Förpackningen innehåller en påse med vätska. När påsen öppnas, rinner vätskan ut över engångsdukarna, som är klara för användning efter 7 minuter. Med Wet Wipe Chlorine Disinfection uppnår du optimal och enkel desinfektion.

Bruksanvisning:

- 1. Slå på mitten av förpackningens baksida.**
- 2. Låt påsen ligga med framsidan neråt i minst 7 minuter.**
- 3. Vänd på den. Engångsdukarna är klara för användning.**

Användningsområden

Desinficerar effektivt mot Norovirus och t.ex. HIV och Hepatit B, vegetativa bakterier och jästsvampar. Används för desinfektion av ytor för medicinsk utrustning och fastsättningspunkter, t.ex. kontaktpunkter för isolerade patienter.

10 minuters kontakttid.

Obs

Engångsdukarna behåller sina desinficerande egenskaper >1000 ppm aktivt klor i 7 dagar efter öppnande. De tillverkas i två storlekar.

Artikelnr. 6025074: Chlorine Disinfection Maxi Kartong med 24 förp. = 120 dukar
1 förp. innehåller 5 dukar, 43x30 cm

Artikelnr. 6025058: Chlorine Disinfection Mini Kartong med 20 förp. = 200 dukar
1 förp. innehåller 10 dukar, 21x29 cm

Innehåll

Detergent < 0,1%
Aktivt klor > 1000–1200 ppm.

Hållbarhet efter öppningsdatum 7 dagar.

Tillverkad i Tyskland.
Säkerhetsinformation finns tillgänglig vid förfrågan.

Wet Wipe A/S
Vallensbækvej 65
DK-2625 Vallensbæk
Tel: +45 43 62 19 43
info@wetwipe.dk
www.wetwipe.dk
CVR: 30207726

wetwipe®

81-050 220916

Återförsäljare
Mediplast AB
Box 1004, 212 10 Malmö
Tel: 020-78 80 35
mediplast.info@mediplast.com
www.mediplast.com

MEDI PLAST®