

independence with confidence

www.optimummedical.de

Ugo fix™
catheter strap
(kateterremmar)



För stöd av urinkatetrar,
suprapubiska katetrar och uridomer.




optimummedical®

Ugo fix

catheter strap

På **Optimum Medical** förstår vi behovet av säker och pålitlig fastsättning av katetrar och kateterpåsar.


Ugo Fix Catheter Strap har tagits fram för att ge patienter ett behagligt stöd och möjlighet att förflytta sig obehindrat och riskfritt.

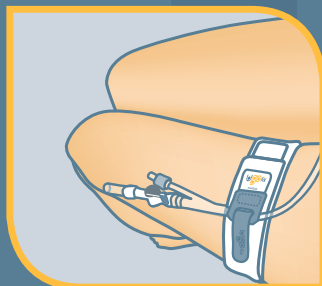

Fastsättning av Ugo Fix Catheter Strap på låret



Fastsättning av Ugo Fix Catheter Strap på magen

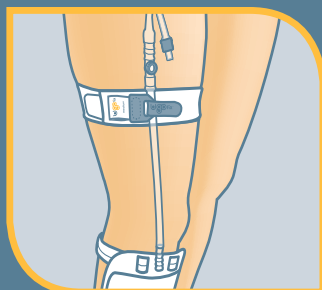

Fastsättning av Ugo Fix Catheter Strap på kateterpåsens rör

Ugo Fix Catheter Strap är till för stöd av urinkatetrar, suprapubiska katetrar och uridomer. Den kan fästas på katetern eller kateterpåsens slang enligt patientens behov.

Fördelar:

- Håller fast tuben så att inget tryck placeras på urinröret och blåshalsen men ändå tillåter naturliga rörelser.
- Hjälper till att hålla upp kateterpåsen när den används med Ugo Fix Sleeve.
- Smidig och enkel design.
- Lättförstådd beskrivning för bästa användning.
- Återanvändbar och tvättbar allergivänlig tygrem.
- Silikonteknik garanterar en bra fästytta på huden utan att halka eller irritera.



Fastsättning av Ugo Fix Catheter Strap på kateterns bifurkation




Vi rekommenderar att **Ugo Fix Catheter Strap** byts ut en gång om dagen eller oftare om den blöts ned. För att underlätta detta har vi förpackat remmarna i satser om fem för den dagliga användnings- och tvättcykeln. För att bibehålla **Ugo Fix Catheter Strap** egenskaper rekommenderar vi att de tvättas i tvättpåse. Av denna anledning medföljer en tvättpåse i varje förpackning av **Ugo Fix Catheter Straps**.

LATEX FREE

Börja använda Ugo Fix Catheter Strap

Före fastsättning är det viktigt att mäta benets eller magens omkrets för rätt remlängd.

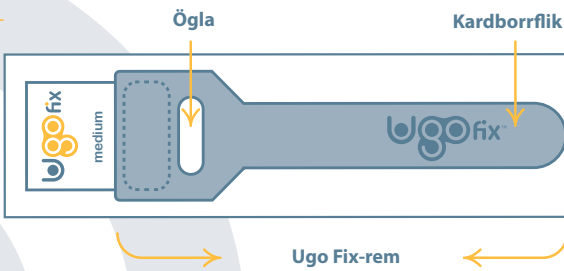

Före fastsättning av tub eller kateter

- 1
- Placera remmen antingen runt låret eller magen i önskad position med hjälp av de två silikonlinjerna riktade nedåt mot huden. Dra inte åt remmen för hårt och se till att **Ugo Fix**remmen placeras där den är lätt att nå.



Fastsättning av tub eller kateter

- 2
- Lyft på **Ugo Fix**-remsan och (a) för den över och under tuben och sedan (b) igenom ögla.
- 3
- När **Ugo Fix**-remsan är på plats och håller fast tuben ordentligt fäster du med kardborrfliken.
- 4
- Kontrollera slutligen att katetern inte dras med när du reser dig och att du kan röra dig obehindrat.



Art.nr.	PIP kod	NPC kod	Produktbeskrivning	Innerförpackning	Ytterförpackning
603001	393-3371	n/a	Ugo Fix Catheter Strap extra korta - 35cm	5 pack	50 pack
603002	393-3389	FSS1068	Ugo Fix Catheter Strap korta - 45 cm	5 pack	50 pack
603003	393-3397	FSS1069	Ugo Fix Catheter Strap medium - 80 cm	5 pack	50 pack
603009	393-3405	FSS1070	Ugo Fix Catheter Strap långa - 130 cm	5 pack	50 pack
603010	393-3413	n/a	Ugo Fix Catheter Strap extra långa- 180 cm	5 pack	50 pack



optimum medical
support™



Träning och utbildning för optimerad patientvård

Besök www.optimummedicalsupport.co.uk för å lese mer.

MILJÖPOLICY



Som tillverkare av medicinska produkter är vi medvetna om vårt miljöansvar och vikten av att bevara naturliga resurser. Vi strävar efter att använda minsta möjliga förpackningsstorlek och därmed minska vårt bidrag till sopberget.



Vi ser till att transporten av våra produkter är så effektiv och miljövänlig som möjligt.

Alla trycksaker består till 50% av återvunnet material i enlighet med FSC-programmet Chain-of Custody.



optimummedical

MEDI PLAST®

Återförsäljare Mediplast AB

Box 1004, 212 10 Malmö

T 020-78 80 35 | mediplast.info@mediplast.com | www.mediplast.com

Optimum Medical

Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, United Kingdom

Tel.: +44 (0) 8456 435 479, Fax: +44 (0) 1142 383 826

enquiries@optimummedical.co.uk | www.optimummedical.co.uk

