


UGOFix benlomme/-fiksering til opsamlingspose


- Den farvede kant skal altid bæres opad og på ydersiden af benlommen.
- Materialet er blødt med udvendig søm for at skåne huden. De elastiske tråde giver stabilitet og gør lommen fleksibel, så den kan udvide sig, når posen fyldes. Den øverste og nederste kant er forstærket.
- Lommens underkant har en forstærket bundåbning, som aftapningsshanen kan føres ud gennem. Den anbefalede maksimumsvolumen for en fyldt pose er ca. 750 ml.
- I hver kasse med 4 benlommer medfølger 1 stk. vaskepose. For at beholde benposens optimale form og funktion anbefaler vi at anvende vaskeposen til vask.
- Benlommen er fremstillet af 76 % polyester og 24 % elasthan.

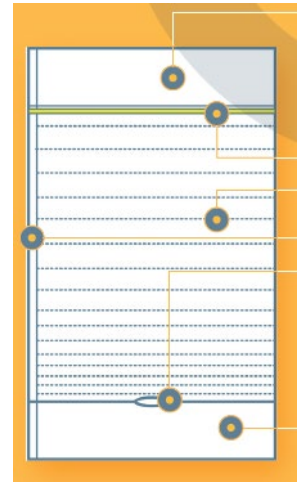

Vaskes ved 60 grader. Anbefalede antal vask 25-30 stk.

OBS! Mål låret eller læggen over den tykkeste del, og vælg den tilsvarende størrelse i tabellen.

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
603005	Small 24-39 cm	4/80
603006	Medium 36-55 cm	4/80
603007	Large 40-70 cm	4/80
603008	Extra Large 65-95 cm	4/80

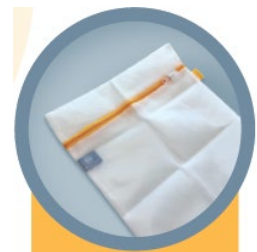

1. Træk UGOFix benlommen op over foden til det rigtige sted på låret eller læggen. Den farvede kant skal altid bæres opad og på ydersiden af benlommen
2. Placer opsamlingsposen i lommen gennem åbningen
3. Træk aftapningsshanen ud gennem lommens bundåbning og tilpas den, så der kan opretholdes frit gennemløb. Posen kan tømmes uden at skulle flyttes.



LATEX FREE



optimummedical®