



UgoFix Benficka/fixering för uppsamlingspåse

- Den färgade randen skall alltid bäras uppåt och på utsidan av benfickan.
- Materialet är mjukt med utsidig söm för att skydda huden. De elastiska trådarna ger stadga och gör fickan flexibel att expandera när påsen fylls. Den övre och nedre kanten är extra stadig.
- Fickans underkant har en förstärkt bottenöppning genom vilken en avtappningskran kan ledas ut. Den rekommenderade maxvolymen på fylld påse är ca 750 ml.
- I varje avdelningsförpackning med 4 benfickor medföljer 1 st tvättpåse. För att bibehålla benpåsens optimala form och funktion rekommenderar vi att använda tvättpåse vid tvätt.
- Benfickan är tillverkad av 76% Polyester, 24% Elastan. Tvättbar i 60 grader. Rekommenderat antal tvättar 25-30 st

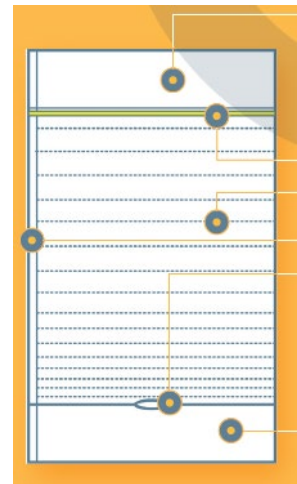

OBS! Mät låret eller vaden över dess tjockaste del och välj motsvarande storlek enligt tabellen.

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trpt.fp
603005	Small 24-39 cm	4/80
603006	Medium 36-55 cm	4/80
603007	Large 40-70 cm	4/80
603008	Extra Large 65-95 cm	4/80

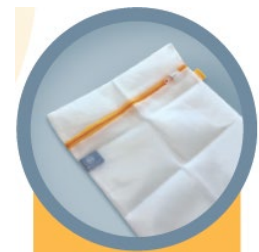

1. Dra upp UGOFix benficka över foten till rätt läge på låret eller vaden. Den färgade randen skall alltid bäras uppåt och på utsidan av benfickan
2. Placera uppsamlingspåsen i fickan via öppningen
3. Dra ut avtappningskranen genom fickans bottenöppning och justera så att fritt flöde upprätthålls. Påsen kan tömmas utan att flyttas.

