

Dispenser til Opkastpose

- Enkel håndtering
- Universalholdere til skruer, passer til alle tidligere/eksisterende holdere
- Slidser som viser antallet af poser der er tilbage i holderen
- Let at tørre af, tåler alle vanlige rengøringsmidler
- Let at påfylde, poserne sidder sikkert og trækkes ud med et let ryk
- Holderen er genanvendelig og har opnået den bedste miljømæssige-vurdering i "SundaHus Registret"
- Holderen findes i både en 50 stk. og en 25 stk. udgave







Varenummer	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
601133K	Dispenser stor (til ca 50 poser)	1/5
601131K	Dispenser lille (til ca 25 poser)	1/10

Æske = mindste kvantitet/bestilling



Materiale: Genanvendelig PP
Tåler etanolbaserede rengøringsmidler
Tåler op til +120°C
Producent: Mediplast AB / www.mediplast.com

MEDI PLAST

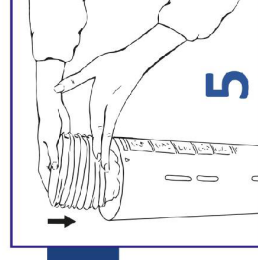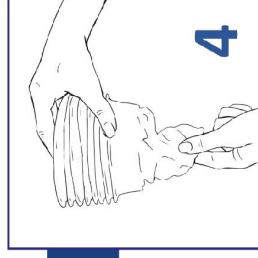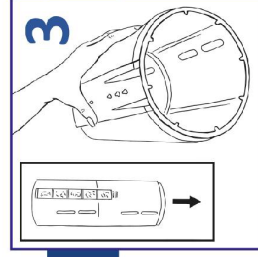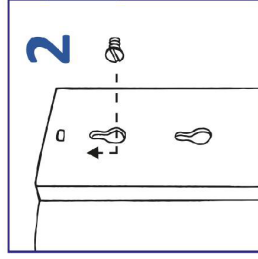


1 & 2
Skrue skruerne i væggen
og hæng derefter
dispenserne i disse.
Hullerne i holderen er
tilpasset alle tidligere/
eksisterende holdere.

3.
For at holderen skal
fungere korrekt, skal
hullet med de 8 tapper
rettes nedad.

4.
Sørg ved påfyldning for
at lægge poserne i den
rigtige retning i
holderen.

5.
Ved påfyldning
skal dispenserens
påfyldes fra
toppen.

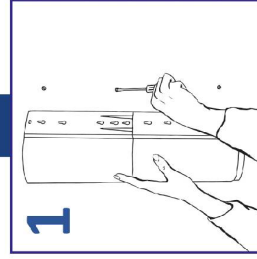

6.
Træk en pose ud
med et let ryk.

Montering af dispenser

Tel 43 44 40 00
info.dk@mediplast.com
www.mediplast.com

For yderligere information