



Medibender

Bøyeinstrument for øresug.

Rustfritt stål, usteril, kan autoklaveres.

Artikkelnr.	Beskrivelse	Avd./Trpt. fp
6066501	4,0, 3,0, 2,0 1.4 og 1,0 mm	1/1

Gjør slik:

1. Ta instrumentet med tommelen på Mediplast-graveringen
2. Ta den ønskede størrelse på sug
3. Sett suget i riktig hull
4. Bøy suget i instrumentets lengderetning til ønsket gradantall



Produsent: Mediplast AB / www.medioplast.com