

Skin X[®]

hudbeskyttende ring og absorpsjon

Til bruk ved gastrostomier



Skin X[®] hudbeskyttende ring og absorpsjon er til bruk ved lekkasje fra gastrostomier. Begge har slisser, slik at de kan plasseres rundt et kateter, eller en knapp/bryter.

Skin X[®] hudbeskyttende ring er laget av hydrokolloid og skal plasseres på ren og tørr hud. Ringen beskytter huden mot kontakt ved lekkasje.

Skin X[®] hudbeskyttende ring kan sitte på plass i opptil to eller tre dager, avhengig av volum på lekkasjen. Kontroller bandasjen rundt stomien ofte, og bytt ut ved behov.

Skin X[®] absorberende materiale er laget av et superabsorberende stoff med plast utenpå, for å forhindre søl. Det absorberende materialet plasseres på ringen for å trekke til seg lekkasje og forhindre at lekkasjen sprer seg til utsiden av den hudbeskyttende ringen. Det absorberende materialet må byttes ut etter hvert måltid, eller etter behov.

Art.nr.	Skin X [®] hudbeskyttende ring
203228	Ø 50 mm, hullstr. 3 mm
203229	Ø 50 mm, hullstr. 7 mm
203230	Ø 75 mm, hullstr. 10 mm
203231	Ø 75 mm, hullstr. 15 mm

30 stk. per pakke

Art.nr.	Skin X [®] absorberende materiale	Absorpsjon
203223	Ø 50 mm, hullstr. 3 mm	8 ml
203225	Ø 50 mm, hullstr. 7 mm	8 ml
203226	Ø 75 mm, hullstr. 10 mm	10 ml
203227	Ø 75 mm, hullstr. 15 mm	10 ml

100 stk. per pakke