


Datum	Sign	Månad
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

Manual för diskplatta

Om nödvändigt kan enheten rengöras genom att den torkas av med ett rengöringsmedel avsett för att desinfektera sjukhusutrustning.

Enhetens tömningskammare rengörs dagligen genom att köra ett program med en diskplatta och om nödvändigt genom mekanisk rengöring.

1. Öppna enhetens lock.
2. Placera engångsdiskplattan på tömningsenhetens ställkrage.

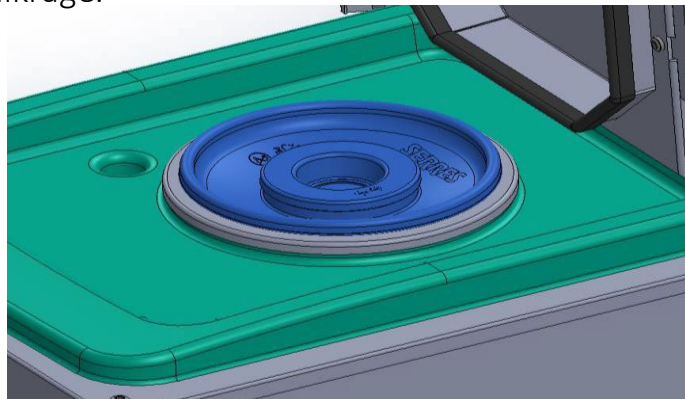

3. Stäng enhetens lock genom att trycka på locket till dess det låser och starta programmet genom att trycka på kör/paus knappen på lockets frontpanel. Enheten kommer att köra ett program som tar ca 15 sekunder. Efter detta stängs enheten av automatiskt.
4. När programmet är avslutat kan locket öppnas och den använda diskplattan tas ut ur enheten.

Rengöringsprogrammet måste köras minst en gång per dag.