

STERISET FUNKTIONSKONTROL

For fuldstændig information, se instruktionsmanualen.



Steriset består af en bund med inderlåg og et yderlåg.

Kontroller overkanten af containerbunden for ydre skader.



Kontroller overfladerne på containerbunden for ydre skader som f.eks. skævhed.



Kontroller at indpakningen er intakt og på plads i inderlåget.



Kontroller de mekaniske ventiler på inderlåget. Kontrol kan foretages ved at trykke ventilen ned og se efter, om ventilen fjedrer tilbage / løfte ventilen og se efter, at fjedringen fungerer.

Kontroller overfladerne på inderlåget for ydre skader.

Kontroller overfladerne på yderlåget for ydre skader.



Nu kan tre forskellige dele af Steriset containeren sættes sammen.

