

MiniONE[®] gastrostomiport

Kort information för brukare



MiniONE[®] gastrostomiport är designad för att ge mat till de som inte kan få i sig all mat och näring de behöver via munnen. Gastrostomiporten är noggrant anpassad till gastrostomin på magen (ett litet hål direkt in till magsäcken). En ballong fylls med vatten genom en blå ventil på MiniONE[®] så att denna hålls på plats inne i magsäcken.



Hygien

Tvätta händerna före och efter kontakt med MiniONE® och matslangar.

Sköljning

Använd sprutan och skölj med vatten genom MiniONE® och matslangar före och efter matning. Om mat ges kontinuerligt bör sköljningen göras tre gånger om dagen.

Rengöring

Rengör matslangarna med vatten efter varje användning. Låt dem lufttorka och förvara dem rent och torrt.

Förbrukning

Vid god hygien kan matslangarna användas i upp till 2 veckor.

Dagligt underhåll

Rotera MiniONE® dagligen. Se till att stanna på olika ställen varje gång för att tillåta en bättre luftcirkulation. Var noga med att hålla huden ren och torr runt gastrostomin.

Kontroll av ballong

Kontrollera ballongens vattenmängd en gång i veckan. Ta ut vattnet med en spruta och kontrollera att det är samma mängd vatten som sprutades in. Töm sprutan och fyll på med nytt vatten enligt tabell nedan.

FR	Minimum	Rekommenderad	Maximum
12FR	2 ml	2,5 ml	3 ml
14FR	3 ml	4 ml	5 ml
16FR	4 ml	6 ml	8 ml
18FR	6 ml	8 ml	10 ml
20FR	7 ml	10 ml	15 ml
24FR	7 ml	10 ml	15 ml

Problemlösning:

Sår hud / läckage:

- Kontakta läkare eller sjuksköterska om gastrostomin
 - luktar
 - blöder
 - är röd och svullen
 - har var runt eller läcker sekret

Läckage från vattenventil / skadad ballong:

- Om det uppstår läckage av vatten från ballongen (genom ventilen på utsidan), dra ur resten av vattnet och ersätt med nytt vatten (samma mängd som tidigare). Ta inte ut MiniONE®.
- Om ballongen är skadad skall MiniONE® bytas:

OBS! Ta inte ut MiniONE® om du inte har en ny som kan sättas in!


Har den fallit ut utan att du har en ny, håll den på plats med ett plåster eller tape tills du får en ny.

Matslangar:

Matslangarna är gjorda för att kopplas till MiniONE® gastrostomiport och låsas på plats.

De passar även till Mic-Key® gastrostomiport.

- Öppna toppen på MiniONE®.
- Sätt markören på matslangen mot det svarta sträcket på MiniONE® och sätt matslangen på plats.
- Vrid matslangen medurs till det tar stopp ($\frac{3}{4}$ varv), den är nu låst på plats och faller inte ut.

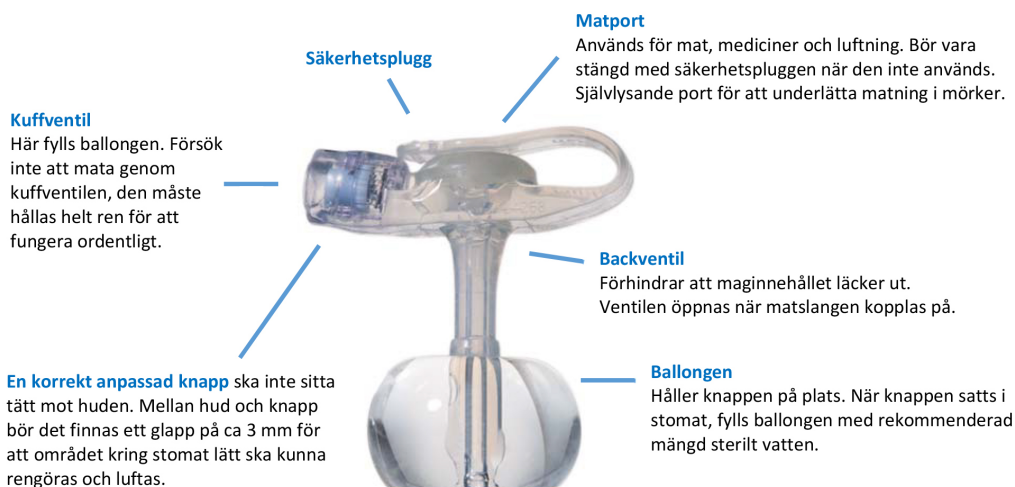

Viktig information

Patientens namn: _____

Datum: _____

Storlek: _____

Längd: _____

Ballongen är cuffad (fylld) med: _____ ml vatten

Kontaktperson: _____

Tel.nr: _____

Övrig information:

Matslangar och tillbehör

ENFit matslangar – 10 st/fp	Art.nr.
Rak koppling (Bolus) med enkel port, 5 cm	8-0211-I
Rak koppling (Bolus) med enkel port, 30 cm	8-1211-I
Rak koppling (Bolus) med enkel port, 60 cm	8-2411-I
Rak koppling (Bolus) med Y-port, 5 cm	8-0212-I
Rak koppling (Bolus) med Y-port, 30 cm	8-1212-I
Vinklad koppling med enkel port, 30 cm	8-1221-I
Vinklad koppling med enkel port, 60 cm	8-2421-I
Vinklad koppling med Y-port, 5 cm	8-0222-I
Vinklad koppling med Y-port, 30 cm	8-1255-I
Vinklad koppling med Y-port, 60 cm	8-2455-I
Tillbehör	Art.nr.
AMT Introducer, 10 st/fp	4-5000
Mätsticka, 10 st/fp	1704
Mätsticka, kompatibel med ledare 10 st/fp	1804

