



Enteral^{UK}
Part of the GBUK Group

ISOsaf home

Sprutor

Instruktion för rengöring och förvaring.

Läs instruktionen före användning. Vid tveksamhet gällande hantering, kontakta medicinskt utbildad personal.



1. Avlägsna kolven från hylsan. Diska delarna i ljummet vatten med mildt diskmedel. Var särskilt noggrann med att avlägsna alla spår av näringslösning eller medicin från hörnor och trånga utrymmen.



2. Skölj noggrant under kallt rinnande vatten för att avlägsna allt diskmedel. Inspektera delarna för att säkerställa att alla rester av näringslösning eller medicin är borta.



3. Skaka av överflödigt vatten och låt delarna lufttorka. Sätt inte ihop sprutan om den inte är helt torr. Förvara sprutan i en ren behållare med lock.



4. Sprutan kan rengöras upp till sex gånger per dag i max 14 dagar.

Enteral ISO-Saf sprutor ska

endast användas av en person.

De kan diskas och återanvändas upp till sex gånger per dag i max 14 dagar.

Intorkade rester av näringslösning eller medicin kan vara svåra att få bort vid diskning. Det är därför viktigt att sprutan rengörs omedelbart efter användning.

Försiktighetsåtgärder:

- Använd inte sprutan om kolven inte rör sig smidigt i hylsan.
- Använd inte sprutan om synlig skada föreligger på kolv eller hylsa.
- Använd inte sprutan om graderingen på hylsan ej går att läsa.

Kontakta ansvarig vårdgivare för uppgifter om lokala föreskrifter gällande hantering av diskbara sprutor.



Administrering av näringslösning/medicin och/eller genomspolning



Gastrisk aspirering och dekompression

GBUK Enteral Ltd, Woodland House
Blackwood Hall Business Park, North Duffield
Selby, North Yorkshire YO8 5DD

T +44 (0)1757 282 945
E info@gbukenteral.com

Återförsäljare:

MEDI PLAST

Medioplast AB
Box 1004, 212 10 Malmö
T 020-78 80 35
mediplast.info@mediplast.com
www.mediplast.com

ISOsaf