



Gjelder for Modul 7047A001, 7047A011 og 7047A016.

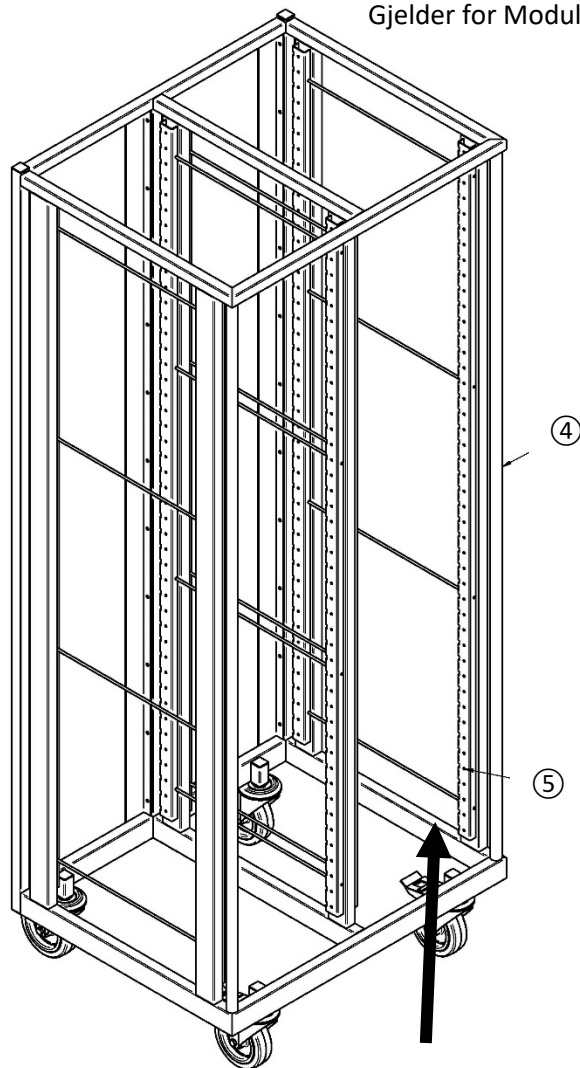

Løsne rammen oppover

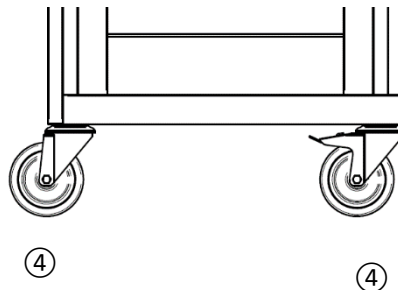


1	Uttrekkbar hylle	7047A028
2	Venstre skinne	(inkludert i produktet ovenfor)
3	Høyre skinne	(inkludert i produktet ovenfor)
4	Rammeverk	7047A003
5	Ramme	7047A005
6	Hjul	8470UFX125P30-13
7	Hjulbrems	8477UFD125P30-13
-	Topp og bunn	70470047
-	Fast hylleplan	70470001

For å endre høyden på hylleplanet

1. Ta ut hylleplanet.
2. Fjern rammen (5). Hold rammen mens du banker litt ned til den løsner. Bruk for eksempel en plast- eller nylonhammer.
3. Ta ut rammen (5).
4. Lett «banking» foran på skinnen (2&3) får skinnen til å løsne.
5. Plasser skinnen (2&3) i ønsket posisjon og trykk eller trekk til den er på plass.
6. Heng rammen (5) i rammeverket (4) og bank på hammeren til rammen er på plass.

NB! ikke bruk makt.
Lett banking skal holde.

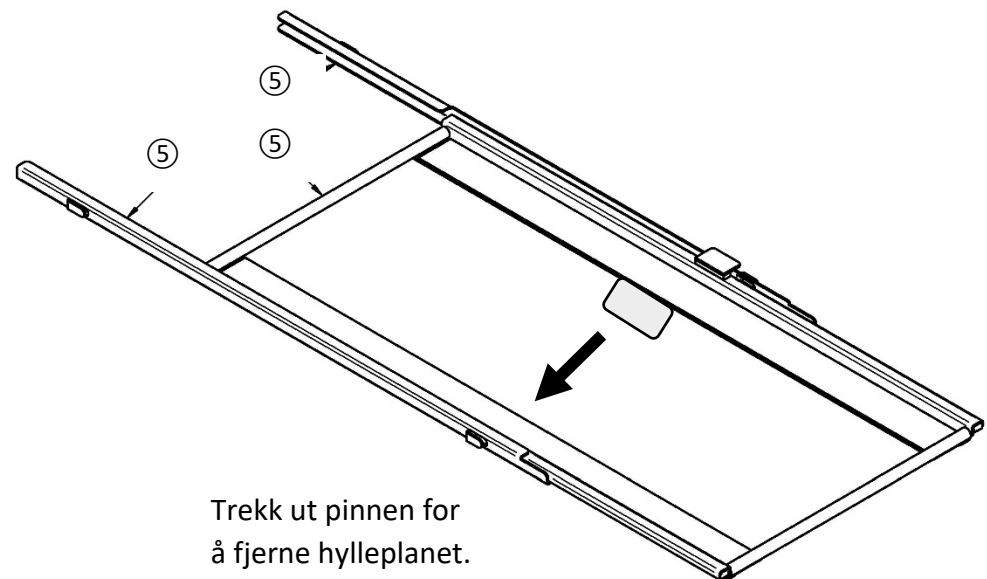

Trekk ut pinnen for
å fjerne hylleplanet.

MEDI PLAST

Medioplast AS – Tollbugata 115 – 3041 Drammen

T 32 88 11 00 – mediplast@mediplast.no

NO 20230731 rev 1

SILVER STÅL