




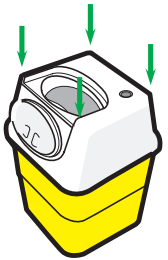





PRODUKTSPECIFIKATIONER				
Produktnavn		Sharpsafe kanyleboks 3,0 liter		
Producent		Frontier Medical Group, South Wales, UK		
Varenummer		DK4145		
Anvendelse og montering		Kanyleboksen er engangs og anvendes til sikker bortskaffelse af skarpt og smittefarligt affald  Boksen er stabelbar og leveres usamlet – vend arket for vejledning		
Kapacitet op til fyldstreg (nettoindhold)		2,06 liter		
Dimensioner (h x b x d)		203 x 197 x 126 mm		
Aftagstyper		Luer lock, Luer slip, Novo-pen, skalpel, sommerfugl, blodtagningssystem		
Vægt (uden indhold)		70 gr		
Pakning		Karton: 50 stk. / Europalle: 11 x karton		
Materiale		Polypropylen (miljøvenligt materiale der omdannes til vand og kuldioxid ved forbrænding)		
Godkendelser				Produktet bærer to godkendelser: 1. Kitemark® (British Standard) 2. UN (United Nations)
Advarsler				Produktet bærer en advarsel: 1. Boksens indhold udgør en biologisk risiko  <b>HUSK!</b> Der bør altid udvises forsigtighed og agtpågivenhed i håndteringen af brugte kanylebokse
Bortskaffelse		Bortskaffelse sker ved forbrænding  Kanyleboksen er forsynet med en etiket (på engelsk), hvor man aht. sporing kan udfylde dato for ibrugtagning m.m.		
Beslag, stands og ophæng (Varenummer og beskrivelse)		DK4290	Krog	
		DK4242	Bøjle	


Vend arket og se vejledning →



## SÅDAN SAMLER OG ANVENDER DU SHARPSAFE KANYLEBOKSEN

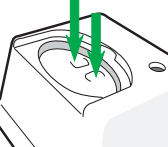 <p style="text-align: right;"><b>1</b></p>	<p><b>Montering</b> Sæt låget på beholderen Tryk på hvert hjørne af låget Et hørbart klik bekræfter, at låget er monteret korrekt på beholderen</p>
 <p style="text-align: right;"><b>2</b></p>	<p><b>Midlertidig lukning</b> Låget kan lukkes midlertidigt og åbnes igen ved at presse det let ned</p>
 <p style="text-align: right;"><b>3</b></p>	<p><b>Åbning af midlertidig lukning</b> For at åbne midlertidig lukning, ryk op i den lille flap</p>
 <p style="text-align: right;"><b>4</b></p>	<p><b>Permanent lukning</b> Når boksen er fuld, pres fast ned på låget og kanyleboksen er lukket permanent</p>

DK 200722

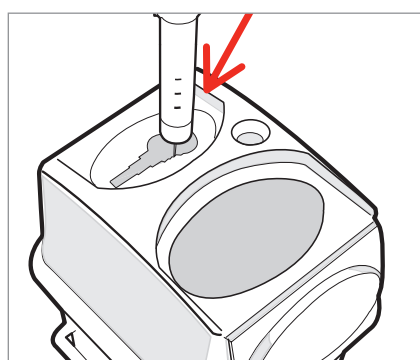

### AFTAG PÅ SHARPSAFE 3,0 LITER

- Luer lock
- Luer slip
- Novo-pen
- Skalpel
- Sommerfugl
- Blodtagningssystem

Forhandler:

**MEDI PLAST**

Mediplast A/S

Marielundvej 46E, 2730 Herlev

T 43 44 40 00

info.dk@mediplast.com

www.mediplast.com