


independence with confidence

www.optimummedical.de

Ugo fix™
gentle catheter clip
nænsom kateterklemme

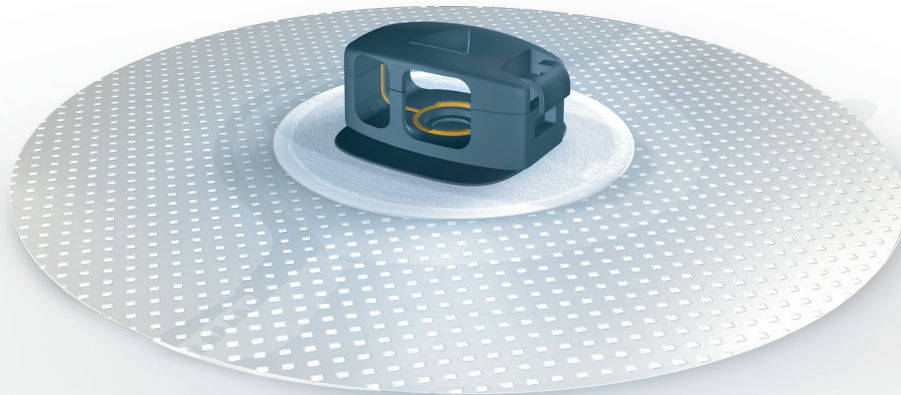

med **silikoneteknologi**
for en atraumatisk patientoplevelse


optimummedical®



'Best practice anbefaler, at katetre fastgøres for at undgå traumer'¹

NICE-Retningslinjer

'Korrekt kateterisering er en prioritet'²

Sikker, pålidelig og skånsom. **Ugo Fix Gentle** gør brug af silikoneteknologien for at minimere traumer ved aftagning og efterlader ingen klæbende rester. Den sørger for komfortabel fiksering, så patienten kan bevæge sig frit omkring.

Ugo Fix Gentle giver en effektiv fiksering af 2-vejs indadvendte urinkatetre, hvor katetret forgrener sig. Det gør det muligt at fiksere urethrale eller suprapubiske katetre, som fastgøres til kateterventiler eller drænageposer.


SELVKLÆBENDE GELPUDE I BLØD SILIKONE

fordi '...nogle patienter lider af svækket hudintegritet, der gør stabilisering mere udfordrende'⁷

SILIKONETEKNOLOGI

Et blødt silikone 'klæbelag' klæber øjeblikkeligt skånsomt på huden.

- Ideel til atraumatisk aftagning uden brug af opløsningsmidler
- Ingen klæbe rester
- Tilpasser sig effektivt alle hudtyper gennem adskillige kontaktpunkter
- Et selvklæbende lag gør det let at omplacere gelpuden og inspicere huden
- Ideel til gentagen anvendelse på samme hudområde
- Enkel peel-back og påsætning uden behov for kompleks hudforberedelse
- Nedsat risiko for allergiske reaktioner grundet silikoneteknologien
- Vandafvisende, åndbar og transparent

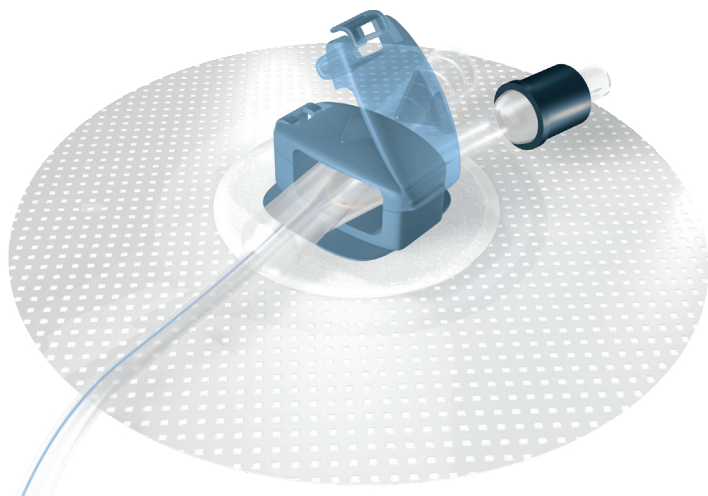


ROTERBAR KLEMME

'Når du vælger den mest hensigtsmæssige kateterfikseringsenhed, bør du overveje behovet for en balance mellem bevægelse og stabilisering'⁴

Katetret fikseres korrekt ved forgreningen og holdes væk fra huden for at forhindre traumer


Varenummer	Produktbeskrivelse:	Æske	Karton
603004	Ugo Fix Gentle kateterklemme	5 stk.	100 stk.

For forespørgsler, ring på
+44(0) 845 643 5479 eller send en
e-mail til ugo@optimummedical.co.uk

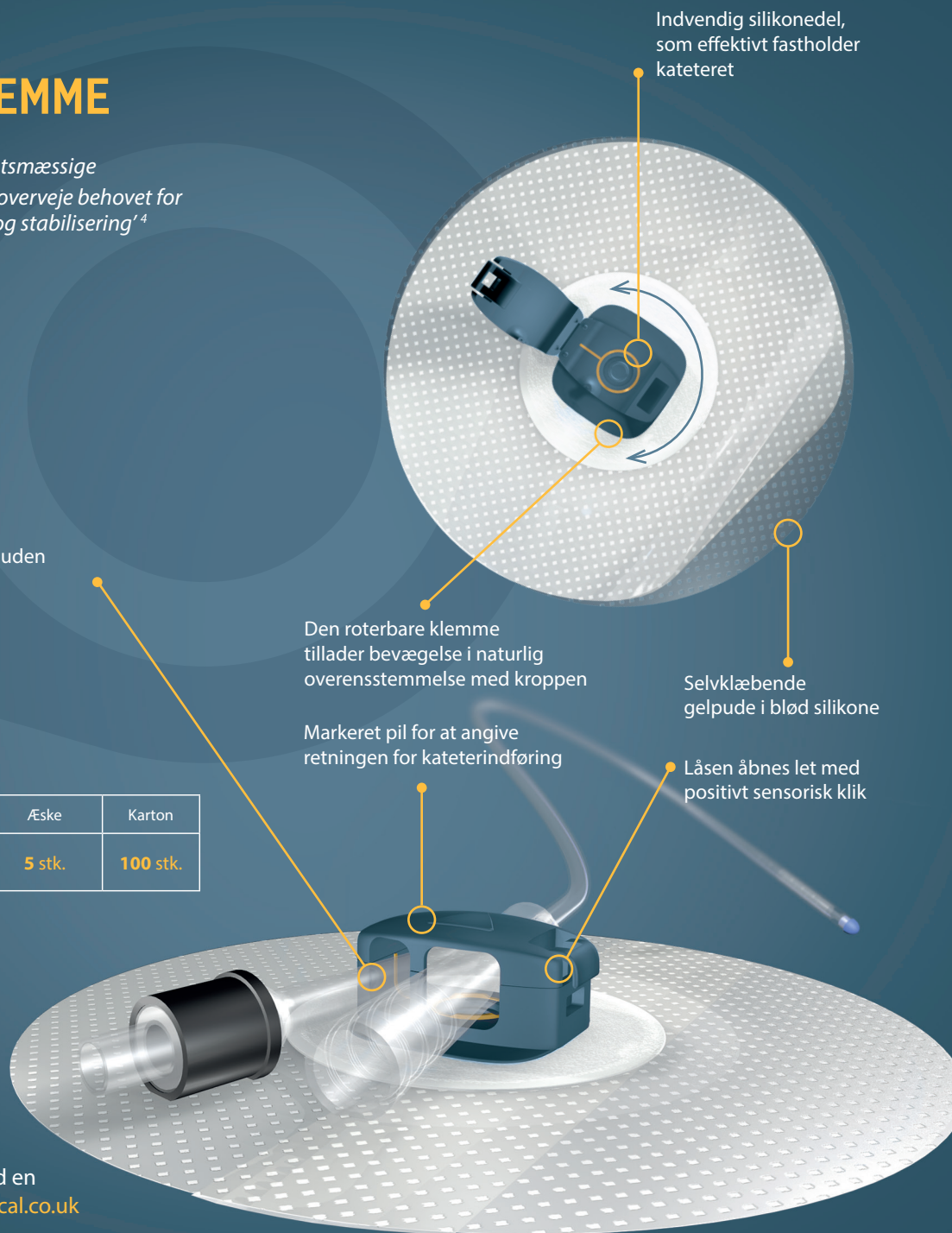

BRUGSANVISNING

Det er vigtigt at fiksere kateteret ind i **Ugo Fix Gentle** forud for påsætning af den selvklæbende gelpude i blød silikone på huden.

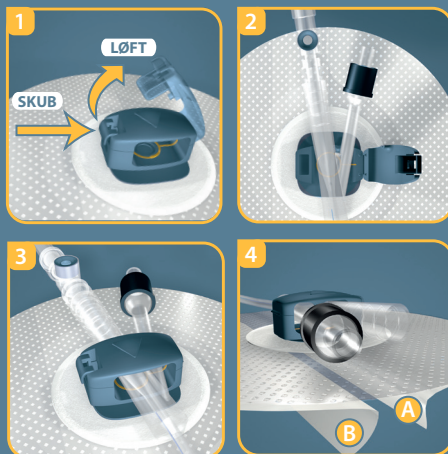

INDEN PÅFØRING PÅ HUDEN - TIL BRUG I OP TIL 7 DAGE

- 1 ÅBN KLEMMEN**
 - Skub og løft låsen for at åbne låget på Ugo Fix Gentle
 - Du vil kunne mærke et klik
- 2 INDSÆT KATETER**
 - Anbring forgreningsdelen af kateteret ind i **Ugo Fix Gentle** (den passer kun på én måde)
- 3 LUK LÅGET**
 - Når kateteret er på plads, lukkes låget på **Ugo Fix Gentle** ved at trykke låget let ned
 - Du vil kunne mærke et klik

PÅFØRING PÅ HUDEN

- 4 NÅR KATETERET ER FIKSERET I KLEMMEN, KAN UGO FIX GENTLE PÅSÆTTES HUDEN** - Sørg for, at huden er ren og tør inden påsætning.
 - Fjern bagside (A) og fikser på huden på det ønskede sted
 - Fjern bagside (B) og udglat på plads
 - Sørg for, at pilen på toppen af klemmen peger mod blæren, og at kateteret ikke trækker, når du står op eller bevæger dig rundt (vi anbefaler en tolerance på 2 til 4 cm for at muliggøre en naturlig bevægelse af kateteret)
 - Du kan til enhver tid flytte den selvklæbende gelpude i blød silikone ved forsigtigt at aftage og påsætte efter behov

  **LATEX-FRI**  **REF** 603004
ADVARSEL: OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

BEMÆRK: **Ugo Fix Gentle** er konstrueret til at fiksere og understøtte kateteret. Hvis kateteret er fastgjort til en urinopsamlingspose, anbefales det at anvende yderligere støtte af urinposens vægt.

REFERENCER

1. National Institute for Health and Care Excellence (2012) Guidance 139. Infection: Prevention and Control of Healthcare-associated Infections in Primary and Community Care. London: National Institute for Health and Care Excellence; Available at www.nice.org.uk
2. Bell M A (2010) Severe Indwelling Urinary Catheter-Associated Urethral Erosion in four elderly men. Ostomy and Wound Management. December 2010 pp36-39
3. Callan L. & Parker D. et al. (2012) Wound, Ostomy and Continence Nurse Society, Clinical Practice Continence Committee. Indwelling Urinary Catheter Securement: Best Practice for Clinicians; Available at <http://www.faet.org/docs/indwellingurinarycathetersecurement.pdf>
4. Billington A et al. (2008) Minimizing the complications associated with migrating catheters. British Journal of Community Nursing. 13(11) pp502-506


optimummedical

MEDI PLAST

Forhandler: Mediplast A/S
Marielundvej 46E, 3540 Lynge
T 43 44 40 00 | info.dk@mediplast.com | www.mediplast.com

Optimum Medical
Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, United Kingdom
Tel.: +44 (0) 8456 435 479, Fax: +44 (0) 1142 383 826
enquiries@optimummedical.co.uk | www.optimummedical.co.uk

