



Ultra Sterilpåse

Påsar och rullar för sterilisering av instrument

Ett kostnadseffektivt och ultrastarkt alternativ till det yttre packskynket eller i de fall där en vanlig papper-/plastpåse inte håller, t ex vid paketering av tungt gods eller instrumentgaller.

- Engångsprodukt, kan steriliseras och öppnas en gång
- Lätt att öppna och lägga fram aseptiskt
- Indikatorer för ånga
- Batch- och storleksmärkning på öppningssidan

NON-WOVEN materialet som används i ULTRA-påsarna har mycket goda egenskaper vad gäller exempelvis sprängstyrka, rivstyrka, svetsstyrka, skydd mot bakteriepenetration, ångporositet och vattenavvisning. Allt detta gör ULTRA-rullarna till ett säkert och kostnadseffektivt alternativ till vanliga påsar och packskynken.

Vi rekommenderar ULTRA-rullarna till tungt gods, tunga instrumentbackar och till operationer där fiber- och partikelsläpp absolut skall minimeras (som t.ex. vid hjärt-, implantat- och ögonkirurgi).

Rullar		
Art. Nr.	Mått	Ant./förp.
99ULT05070	50 mm x 70 m	5
99ULT08070	80 mm x 70 m	3
99ULT12070	120 mm x 70 m	3
99ULT16070	160 mm x 70 m	2
99ULT22070	220 mm x 70 m	1
99ULT25070	250 mm x 70 m	1
99ULT28570	285 mm x 70 m	1
99ULT32070	320 mm x 70 m	1
99ULT38070	380 mm x 70 m	1
99ULT42070	420 mm x 70 m	1
99ULT47070	470 mm x 70 m	1
99ULT52070	520 mm x 70 m	1
99ULT58070	580 mm x 70 m	1

Bruksanvisning:

Se till att det finns fria ytor så att steriliseringsgaserna kan passera in och ut ur påsen. Fyll påsen endast till 2/3, både på längden och bredden.

Rulle/påse öppning:

Ultra-materialet kan öppnas från båda ändar, oberoende av materialfibrernas riktning.

För påsar som är designade med pil för öppningsriktning:

Öppning i pilens riktning gör det möjligt att öppna påsen antiseptiskt.

Påsstorlek till korg:

	Innerlager	Ytterlager
DIN och 1/2 DIN	380 x 450 mm	420 mm rullar
SPRI (std höjd)	470 mm rullar	520 mm rullar
SPRI (hög modell)	520 mm rullar	580 mm rullar



Påsar		
Art. nr.	Mått	Ant./förp.
98ULT00830	80 mm x 300 mm	2000
98ULT01220	120 mm x 200 mm	1200
98ULT01240	120 mm x 400 mm	1000
98ULT01630	160 mm x 300 mm	1200
98ULT01650	160 mm x 500 mm	1000
98ULT02240	220 mm x 400 mm	500
98ULT02260	220 mm x 600 mm	400
98ULT02550	250 mm x 500 mm	500
98ULT02845	285 mm x 450 mm	500
98ULT02860	285 mm x 600 mm	300
98ULT03255	320 mm x 550 mm	300
98ULT03845	380 mm x 450 mm	400
98ULT03865	380 mm x 650 mm	300
98ULT03869	380 mm x 690 mm	300

ULTRA – RULLAR och PÅSAR

TEKNISKA DATA

BESTÅNDSDELAR

Non-Woven polyalken 93g/m²

LAMINATFILM

Blå polyester 12µm+ polypropen 38µm + lim

FAKTA OM PRODUKTEN

Storlek Bredd Tolerans ± 2 mm
 Svetsstyrka > 1,5 N/15 mm (= krav i EN868-5).
 Ultra är ca. 6N/15mm

INDIKATOR

Ånga (134°C ≤ 18min.) omslag från rosa till brunt

SVETSNING / REKOMMENDATION

Vid 135°-155°C. Enligt EN ISO 11607-2 är det lämpligt att använda en validerad värmeförsegling för att försegla paket med mikrobiell barriär.

Förvaring:

Undvik direkt solljus och extremt höga temperaturer
 Temperatur 10°-30°C, Relativ luftfuktighet 30-60%
 Kartongen får inte skadas under transport och förvaring

Hållbarhet:

5 år från produktionsdatum om rekommendationerna för förvaring hålls

Kvalitetssystem:

ISO 9001 och ISO 13485

CE-märkning:

MDR 2017/745
 EN ISO 11607: 1, EN 868-5
 och EN 868-9

Indikatorer: ISO 11140-1 (Class I)