


Hem-o-lok ligating clips

- icke absorberbara polymerclips för öppen och endoskopisk kirurgi.

Hem-o-lok polymer ligating clips är en unik produkt med en enastående design som garanterar en nästan 100% säker placering och tillslutning av vävnad/cirkulation. Hem-o-lok kan användas vid alla slags operationer, allmän kirurgi, urologi, gynekologi, kärl, thorax och neurokirurgi.

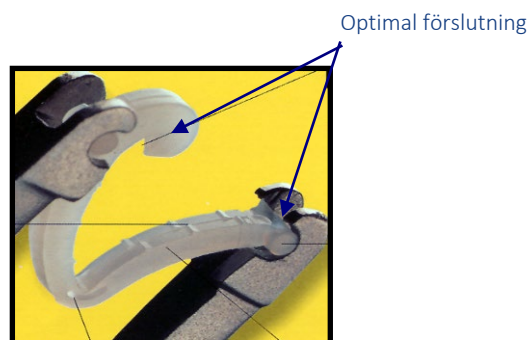

Design

Hem-o-lok clippen har små hullingar på båda insidorna och samtidigt en låsmekanism som är speciell för hem-o-lok clippen. Denna utformning ger kirurgen trygghet och säkerhet under operationen. Clippen tappas inte och de ger en tät förslutning. Clipsens ändar är avrundade och utgör själva låset. Därför är risken för vävnadsnekros ytterst liten. Genom Hem-o-loks unika design med en ränna som passar i kanalen i applikatorns käft, kombinerat med en låsanordning, likaledes i käften, minimeras risken för att clippen tappas efter laddningen.

Clippen är lätt böjliga, vilket ger kirurgen möjlighet att göra avklämningsprov före den slutliga appliceringen. Applikatorn skall tryckas helt i botten varvid det hörs ett "klick" som är en säker indikator på att clippen nu är fäst säkert och riktigt.



Clippen är icke-absorberande och skador från en absorptionsprocess förekommer inte. Clippen kan inte ses på röntgenbilder eller vid scanning.

Teleflex®

Magasin

Hem-o-lok clipsen sitter i magasin med 6 st. Magasinet är utformat så att clipsen inte faller ut och därvid blir osterila. De sitter fast på ett sådant sätt att de endast kan tas ut med en applikator. Ett säkert sätt som behåller clipsen sterila.

Magasinet är självhäftande på undersidan. Härigenom kan kirurgen fästa det på ett ställe där det är lättillgängligt och det krävs då ingen särskild personal för denna del av operationen.

Storlekar:

Artikelnummer	Färg	Storlek	Antal clips / magasin	Antal magasin	Totalt antal clips	Vävnad/kärl kapacitet
60WK544220		M	6	14	84	2-7 mm
60WK544230		M/L	6	14	84	3-10 mm
60WK544240		L	6	14	84	5-13 mm
60WK544250		XL	6	14	84	7-16 mm

Teleflex Medicals applikatorer för öppen- / endoskopisk kirurgi är endast framtagna för Teleflex clips Horizon/Hemolok. Teleflex Medical kan inte garantera säkerheten, om andra fabrikat av clips används i Teleflex applikatorer.