

# STERISET KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS

Katso kattavat tiedot käyttöohjeesta.



Steriset koostuu pohjasta, sisäkannesta ja päällyskannesta.

Tarkista kontainerin pohjan yläreuna ulkoisten vaurioiden varalta.



Tarkasta säiliön pohjapinnat ulkoisten vaurioiden varalta, esimerkkinä kierous.



Tarkista, että tiiviste on ehjä ja paikallaan sisäkannessa.



Tarkista sisäkannen mekaaniset venttiilit. Tarkastus tehdään painamalla venttiiliä alaspäin ja katsomalla, että venttiili ponnahtaa takaisin / nostamalla venttiiliä ja katsomalla, että jousitus toimii.

Tarkista sisäkannen pinnat ulkoisten vaurioiden varalta.

Tarkista päällyskannen pinnat ulkoisten vaurioiden varalta.



Käyttöönottotarkastus on nyt valmis. Steriset-kontainerin kolme eri osaa voidaan nyt laittaa yhteen.

