

seca 201 Omfångsmätare



Art. Nr. 2011717009

Ett stadigt måttband för mätning av omkrets, t.ex. av midja, höft, arm eller ben. Drag måttbandet runt det som skall mätas och fäst tappen i hållaren. Håll in knappen och måttbandet dras åt.

Måttbandet är kalibrerat med hållarens längd. Måttbandets andra sida kan användas för andra typer av mätningar. Knappen kan också användas för att dra in måttbandet i hållaren.

Mätkapacitet	15 - 205 cm
Gradering	1 mm
Vikt	55 g
Mått (BxHxL)	70 x 22 x 70 mm
Direktiv	93/42/EG, MDD

seca 203

Omfångsmätare med midja/höjd kvot



Art. Nr. 2031717009

Ett stadigt måttband för mätning av omkrets, t.ex. av midja, stuss, arm eller ben. Drag måttbandet runt det som skall mätas och fäst tappet i hållaren. Håll in knappen och måttbandet dras åt. Måttbandet är kalibrerat med hållarens längd.

Med WHR kalkylator för Midja/Höft-kvot. Mät midjeomfånget och stussomfånget. Ställ in de båda värdena vid symbolerna för midje- respektive stussmått och läs av värdet i displayen. Ger ett mer aktuellt värde än BMI, då det tar hänsyn till kroppsformen.

Måttbandets andra sida kan användas för andra typer av mätningar. Knappen kan också användas för att dra in måttbandet i hållaren.

Mätkapacitet	15 – 205 cm
Gradering	1 mm
Vikt	75 g
Mått (BxHxL)	70 x 22 x 70 mm
Direktiv	93/42/EG, MDD

seca 206 Väggmåttband



Art.nr. 2061717009

Litet måttband av metall för väggmontage. Måttbandet är monterat på en stödplatta som vilar mot väggen så att det inte vickar.

Läs av vid den röda markeringen.

Enkel att montera.

Mätområde	0 - 220 cm
Gradering	1 mm
Direktiv	93/42/EEG, MDD

seca 207 Längdmätare för liggande mätning



Art.nr. 2071714008

Fixerad huvuddel och glidbar fotdel
Kan även monteras på vägg
Infällbara mätdelar för enklare förvaring

Mätområde	0 - 99 cm
Gradering	1 mm
Vikt	810 g
Mått (BxHxD)	1047 x 120 x 286 mm
Direktiv	CE 0123

seca 210 Mätmatta för baby



Art. Nr. 2101721004

Mätmatta till småbarn. Hygienisk plast, lätt att rengöra och kräver liten plats. Mattan rullas ihop, eller hängs upp, när den inte används.



Mätområde	10 – 99 cm
Gradering	5 mm
Vikt	580 g
Mått (BxHxD)	305 x 140 x 1340 mm
Direktiv	93/42/EEG, MDD

seca 212

Hygieniskt måttband för huvudomfång




Art. nr. 2121717009

Ett stabilare mätband, som inte halkar ned i nacken, gör det mycket enklare att mäta huvudomfång små barn.

Vänd på mätbandet och du kan kontrollera symmetri (midpoint).

Tillverkat av teflonbelagt papper och avtorkbar. Praktisk förpackning med 15 st mätband i varje.

Mätområde	upp till 59 cm
Gradering	1 mm
Direktiv	93/42/EEG, MDD
Material	Fritt från PVC och Latex

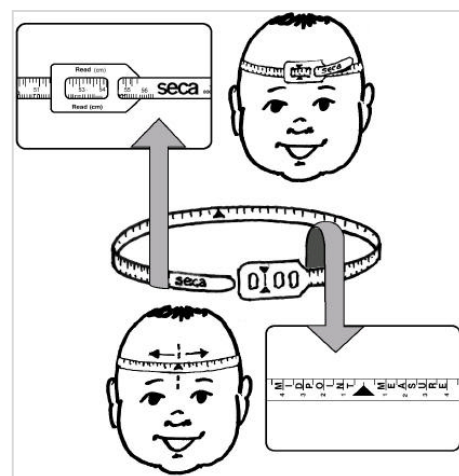

seca
Precision for health

seca 213 Portabel längdmätare



Inställbart väggstöd och
huvudstöd med tydligt
läsfönster



Bärbar

Art. Nr. 2131721009

Denna isärtagbara längdmätare är särskilt lämplig för ambulerande verksamhet. Fotplattan är stadig och har ett handtag. Stödet på baksidan av skalan är inställbart och placeras lämpligen mot en vägg. Längden läses av på sidan av skalan, vid pilarna i huvudstödet's röda läsfönster. Mätskalan tas isär i delar och placeras under fotplattan tillsammans med huvudstöd och väggstöd.

Längdmätaren får plats i tillbehöret bärväskan [seca 412](#).

Mätområde	20 – 205 cm
Gradering	1 mm
Vikt	3 kg
Mått (nedmonterad, BxHxD)	340 x 180 x 620 mm
Direktiv	93/42/EEG, MDD

seca 216 Längdmätare med låsskruv



Huvudstöd med läsfönster och låsskruv.



Art. Nr. 2161814009

Längdmätare med löpande huvudstöd. Huvudstödet har läsfönster (röd ram med pil) och låsskruv så att längdmätningen inte kan påverkas när patienten flyttar sig. Beroende på hur högt man monterar längdmätaren så får man ända upp till 230 cm maxlängd.

Mätområde	Min. 0 – 138 cm / Max. 90 - 230 cm
Gradering	1 mm
Vikt	2 kg
Mått (B)	80 mm (skaldelen) / 120 mm (huvudstödet)
Mått (HxD)	1500 x 220 mm (inkl. huvudstöd)
Direktiv	93/42/EEC MDD

seca 217

Portabel längdmätare

Kan användas med seca 878 golvvåg



Inställbart väggstöd och
huvudstöd med tydligt
läsfönster



Bilden visar allt som behövs
för att väga och mäta på
samma gång.

Art. Nr. 2171721009

Denna isärtagbara längdmätare är perfekt för ambulerande verksamhet. Stödet på baksidan av skalan är inställbart och placeras t.ex. mot en vägg.

Längden läses av på sidan av skalan, vid pilarna i huvudstödet röda läsfönster.


Mätskalan tas isär i delar och placeras under fotplattan tillsammans med huvudstöd och väggstöd. Längdmätaren får plats i tillbehöret bärväska [seca 412](#).

Med hjälp av tillbehöret [adaptern seca 437](#), som placeras på längdmätarens fotplatta, blir [vågen seca 878](#) längdmätarens fotplatta. Vikten kan avläsas från två håll. Praktiskt att väga och mäta på samma gång. Allt får plats i tillbehöret transportväskan [seca 414](#).

Mätområde	20 - 205 cm
Gradering	1 mm
Vikt	3,5 kg
Höjd	214,5 cm
Mått (nedmonterad, BxHxD)	340 x 180 x 602 mm
Direktiv	93/42/EG, MDD

seca 220

Extra längdgmätare till pelarvåg

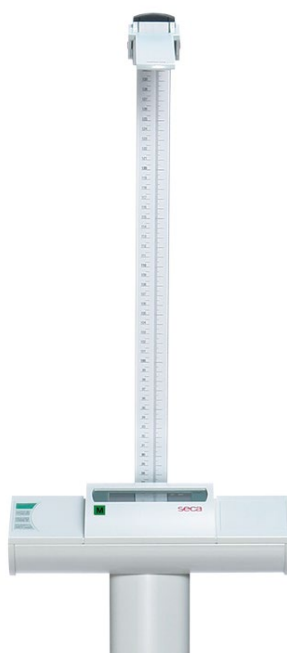

Art. Nr. 2201714003

Komplettera din seca pelarvåg med en längdgmätare.
Praktiskt att ha allt på en och samma plats.

En smart teleskopisk (utdragbar) längdgmätare i hygienisk metall för montering på pelarvåg. Här håller du inte i huvudstödet. Istället drar du i den övre delen av längdgmätaren när du passar in huvudstödet på patientens huvud.

När patienten är lång behöver du aldrig mer stå på tå.
Varken när du ska ställa in höjden eller när du ska läsa av längden.

Passar alla seca pelarvågar, nya som gamla, med två skruvhål på baksidan av pelaren.


Mätområde	85 - 200 cm
Gradering	1 mm
Direktiv	93/42/EEG, MDD

seca 222

Smart och ergonomisk längdmätare med hälstöd



Här läser du av längd
under 130 cm.

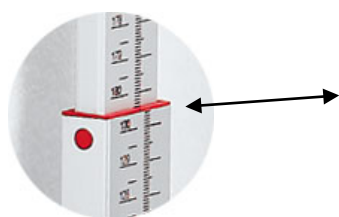

Här läser du av längd
över 130 cm.



Art. Nr. 2221714008

En smart teleskopisk (utdragbar) längdmätare i hygienisk metall för vägg.
Här håller du inte i huvudstödet. Istället drar du i den övre delen av längdmätaren när du passar in huvudstödet på patientens huvud. När patienten är lång behöver du aldrig mer stå på tå. Varken när du ska ställa in höjden eller när du ska läsa av längden.
Längdmätarens smarta konstruktion gör att du aldrig läser av längden högre upp än 130 cm över golvet. När du mäter lägre än 130 cm trycker du in spärknappen på huvudstödet och för över det till den lägre delen av längdmätaren.
Längdmätaren har hälstöd och extra stort fällbart huvudstöd.

Mätområde	60 - 230 cm
Gradering	1 mm
Vikt	1.3 kg
Mått (BxHxD)	120 x 1322 x 34 mm
Direktiv	93/42/EEC MDD

seca
Precision for health

seca 232 Längdmätare till seca 336 och seca 336i



Art.nr. 2321717008

Analog längdmätare för seca 336.
Mäter i 1 mm steg från 35 cm till 80 cm. Fästes på vågen.

Vikt	512 g
Mått (BxHxD)	640 x 145 x 277 mm



seca 233 Längdmätare till babyvåg seca 376



Art. Nr. 2331714004

Längdmätare Seca 233 för Seca 376 monteras på vågar med 2 hål, huvudstöd medföljer.

Med längdmätaren Seca 233 med integrerad huvud- och fotstöd monterad blir Seca 376 ett komplett väg- och mätsystem. Ett enkelt tidsbesparande moment för både vägning och mätning blir möjligt tack vare enkel montering och lättavlästa resultat.

Mätområde	35 - 80 cm
Gradering	1 mm
Vikt	700 g
Mått (B)	641 mm
Mått (HxD)	1790 x 2960 mm
Direktiv	93/42/EEC MDD

seca 264 Stadiometer



Art. Nr. 2641900099

Väggfast längdmätare som är förberedd för trådlös överföring av längden till t.ex. en seca skrivare. Den kan också sända längden till en seca wireless personvåg där längden kan användas för automatisk uträkning av BMI. Längden kan sedan skrivas ut tillsammans med vikten och BMI. Man aktiverar bara de funktioner man vill använda. Drivs med vanliga AA-batterier. Automatisk avstängning efter avslutad mätning. Displayen visar i god tid när batterierna ska bytas. CE-märkt.

- Längden visas i en display på huvudstödet
- Hjälpmedlet "Frankfurt Line" hjälper till att få patientens huvud i rätt position
- HOLD-funktionen gör att man kan låsa längden innan man läser av resultatet
- Längdmätaren kan nollställas på valfri höjd för att t.ex. kunna mäta sittande patienter
- En trådlös skrivarfunktion kan aktiveras så att du kan trycka fram ett kvitto (kräver en seca skrivare)
- Längdmätaren kan kopplas upp i ett trådlöst nätverk och kopplas samman med t.ex. pelarvåg
- Ett speciellt dataprogram kan hjälpa till med registrering direkt i den elektroniska patientjournalen

Mätområde: 30 - 220 cm
Gradering: 1 mm
Mått (BxHxD): 430 x 2400 x 520 mm
Vikt: 5 kg



seca 285, Mätstation **Wireless**



"Frankfurt Line"

Display



Art. Nr. 2857000199

Med mätstationen kan du väga och mäta på samma gång. Om du vill flytta den så har du hjälp av transporthjulen under pelaren. Vågdelen har hela 300 kg kapacitet samtidigt som skalindelningen går ned så långt som till 50 g. Mor/Barn funktionen ("2 i 1") fungerar utmärkt på seca 285. Dämpningen gör att du får korrekta resultat även när patienten inte kan vara still. Du kan också få automatiskt uträknad BMI.

seca 285 mätstation är förberedd för trådlös överföring av resultaten t.ex. till en seca skrivare och den kan t.o.m. integreras i ett nätverk där den kan leverera resultat till det elektroniska journalsystemet. Du bara aktiverar den/de funktioner som du vill använda.

Vågdelen drivs med medföljande [seca adapter](#). Längdmätaren drivs med helt vanliga AA batterier. Displayen visar, i god tid, när batterierna behöver bytas.

Grundfunktioner

- seca 285 mätstation visar vikten ända ned i 50g steg.
- Med "2 i 1"-knappen kan du väga ett barn i famnen på en vuxen, Mor/Barn-funktion.
- Ett helt nytt hjälpmedel på längdmätaren, vid sidan av huvudstödet (Frankfurt Line), hjälper dig att placera patientens huvud i rätt position.
- Huvudstödet har en bromsknapp som ska tryckas in när huvudstödet flyttas.



- Längdmätaren har HOLD-knapp som låser längden så den inte kan påverkas.
- seca 285 mätstation visar längden i en upplyst display (15/30 sek) på huvudstödet.
- Tryck på en knapp och längden förs över till huvuddisplayen och du får automatiskt BMI.
- Du kan också nollställa längdmätaren på valfri höjd så du t.ex. kan mäta sittande patienter.
- För att spara batteri stänger längdmätaren automatiskt av längdvisningen efter 1 minut.

Extra funktioner

- Aktivera en automatisk överföring av längden till huvuddisplayen för direkt BMI.
- Du kan aktivera en trådlös överföring av värdena till en seca skrivare så att du kan få ett kvitto. Eftersom överföringen är trådlös så kan du placera skrivaren ända upp till 10 meter bort.
- Ställ in automatisk radering av värden så de inte kan påverka efterföljande mätningar.
- seca 285 kan också kopplas upp i ett nätverk, trådlöst förstås, och leverera värdena till ett [analysprogram seca 105](#), via [seca 456 USB adapter](#).
- [seca 105](#) kan också föra över värdena till den elektroniska patientjournalen.

Kapacitet	300 kg. Skalindelning: 50 g < 150 kg > 100 g
Längdområde	30 - 220 cm. Gradering: 1 mm
Mätstationens mått (BxHxD)	440 x 2400 x 470 mm
Mätstationens totala vikt	16 kg
Direktiv	93/42/EEG, MDD



Tillbehör:
[Seca 465 och 466 skrivare](#)
för termopapper eller termopapper/etikett

seca 336 Bärbar Babyvåg



Art. Nr. 3367021098

En Klass III våg. Enligt direktivets krav försedd med vattenpass och justerbara fötter. Elektronisk barnvåg som passar överallt och också är lätt att ta med sig tack vare det praktiska handtaget. Vågen har dämpning, vilket gör att du får en korrekt vikt även om baby inte ligger still. HOLD- och TARE funktion ingår. Vågen stängs av automatiskt efter ca. 5 min. Vågen är stabil, lättskött och har tydlig display. Vikten visas i stora digitala siffror. Den helgjutna designen, gör vågen hygienisk och mycket lätt att hålla ren. Levereras med 6 st engångsbatterier, typ AA. Med en [seca nätadapter](#) (tillbehör) kan vågen även drivas via ett vanligt vägguttag.

Vid längre transporter, t.ex. vid hembesök, finns den rejäla väskan [seca 428](#) (tillbehör). Har du monterat längdmätaren så använder du väskan [seca 414](#) (tillbehör).

Kapacitet	20 kg
Gradering	5 g < 10 kg > 10 g
Vikt	3,7 kg
Mått (BxHxD)	650 x 110 x 308 mm
Mått vågskål (BxHxD)	645 x 40 x 290 mm
Direktiv	93/42/EG, MDD, 2009/23/EG, Klass III
Certifikat för varje enskild våg medföljer	

seca 376 Babyvåg **Wireless**



Art. nr. 3767021098

Babyvågen, seca 376 **wireless**, har flera inbyggda funktioner, t.ex. möjlighet till utskrift av vikten. Du behöver bara aktivera de funktioner som du vill använda.

Vågen drivs med vanliga AA batterier. När den kopplats till en trådlös seca skrivare, eller seca dataprogram, rekommenderas att vågen drivs via en seca nätadapter.

Grundfunktioner

- Vågen har två vägområden med olika skalindelning. 5g till 7,5 kg eller 10 g till 2 0kg. Nyhet - om babyn väger mer än 7,5 kg så ställer vågen automatiskt om sig till det högre vägområdet. När du lyft bort babyn från vågen, och displayen visar "noll", så ställer vågen in sig på det lägre viktområdet igen.
- Vågen har HOLD-funktion vilket betyder att du låser vikten och kan ta hand om barnet först och läsa av vikten sedan.
- Vågen har också dämpning vilket betyder att om baby rör sig på vågen när du tryckt på HOLD-knappen så kommer vågen att ta hänsyn till det och visa korrekt vikt.
- TARA-funktionen fungerar så att du först kan lägga ett underlägg på vågen och sedan ta bort underlaggets vikt genom att trycka på TARA-knappen. Sedan väger du baby som vanligt.
- Automatisk avstängning vid batteridrift.



seca
Precision for health

Extra funktioner

- För att snabbt få veta när HOLD ställt in sig så kan du aktivera en signal.
- Dämpningen kan ökas så att livliga barn inte gör så att viktvisningen fördröjs.
- Det finns också en BMIF-funktion (Bröst Mjölk Intag Funktion) där man väger baby, lagrar vikten, matar, lägger baby på vågen igen och får skillnaden mellan de två vägningarna, d.v.s. hur mycket baby ätit.
- Du kan aktivera en trådlös skrivarfunktion så att du kan trycka fram ett kvitto, men då måste du ha en seca skrivare som kan ta emot den trådlösa signalen. Eftersom överföringen av vikten till skrivaren är trådlös så behöver den inte stå precis bredvid vågen.
- Vågen kan också kopplas upp i ett nätverk, trådlöst förstås, och kopplas samman med ett speciellt dataprogram som kan hjälper till med analys av vikten och slutligen registrera vikten i den elektroniska patientjournalen.

Kapacitet	20 kg
Gradering	5 g för 0 -7,5 kg, 10 g upp till 20 kg
Vikt	3,7 kg
Mått (BxHxD)	620 x 190 x 360 mm
Mått vågskål (BxHxD)	615 x 130 x 275 mm
Direktiv	93/42/EEG, MDD, 90/384/EEG, Klass III
Certifikat för varje enskild våg medföljer	

TILLBEHÖR:

[seca 418 huvud/fotstöd](#)
[seca 233 längdmätare](#)
[seca 414 transportväska](#)
[seca 465/seca 466 skrivare](#)
[seca nätadapter](#)

seca 384 Babyvåg



Art. Nr. 3847017099

En Klass III våg. Enligt direktivets krav försedd med vattenpass och justerbara fötter.

HOLD, TARE och STORE funktion ingår. Med STORE funktionen kan du först väga barnet och sedan t.ex. mata barnet och väga det igen och få viktskillnaden i gram.

Välj själv skalindelning. 10gram med maxvikt 10 kg eller 20 gram med maxvikt 20 kg.

Den helgjutna designen gör det enkelt att göra rent och vågen har en tydlig display.

Vid vägning av barn som kan stå kan man ta bort vågskålen (se bruksanvisningen).

Vågen stänger automatiskt av sig när du är klar med vägningen.

Levereras med 6 st vanliga AA-batterier, som klarar ca.10.000 vägningar.

Vågen är lätt att flytta tack vare dess låga vikt.

Seca 414 transportväska finns som tillbehör.

Kapacitet	10 kg respektive 20 kg
Gradering	10 g för 0 -10 kg eller 20 g för 0-20 kg
Vikt	2,5 kg
Mått (BxHxD)	550 x 165 x 360 mm
Direktiv	93/42/EG, MDD, 2009/23/EG, Klass II
Certifikat för varje enskild våg medföljer	

seca 412**Transportväska för seca 213****Art. Nr. 4120000004**

En skyddande transportväska med axelrem.
Passar till längdmätare 213.

Vikt 650 g
Mått (BxHxD) 670 x 430 x 56 mm

**seca 414****Transportväska för seca 376 och seca 384****Art. Nr. 4140000009**

En skyddande transportväska med handtag och axelrem. Invändig ficka för A4 block m.m.
Passar till barnvågarna [seca 376](#) och [seca 384](#).

Vikt 2 kg
Mått (BxHxD) 660 x 370 x 450 mm

**seca 421****Transportväska för seca 878 och seca 899****Art. Nr. 4210000009**

En skyddande transportväska med fickor inuti och axelrem.
Passar till [seca 878](#), [seca 899](#).

Vikt 900 g
Mått (BxHxD) 360 x 420 x 130 mm

**seca 428****Transportväska för seca 336****Art. Nr. 4280000004**

En skyddande transportväska med handtag, liten ficka inuti och axelrem.
Passar till [seca 336](#), bärbar barnvåg.

Vikt 1 kg
Mått (BxHxD) 650 x 320 x 110 mm



Ryggsäckar

seca 409

Art. Nr. 4090000009

Praktisk ryggsäck som passar till ett flertal portabla seca-vågar som t ex:
seca 336, seca 336i, seca 384, seca 385

Vikt	1600 g
Mått (BxHxD)	370 x 630 x 140 mm



seca 431


Art. Nr. 4310000009

Nätt liten ryggsäck för transport av secas bärbara babyvågar som t ex:
seca 384 och seca 385

Vikt	800 g
Mått (BxHxD)	380 x 580 x 170 mm



seca 416 Mätbräda för baby

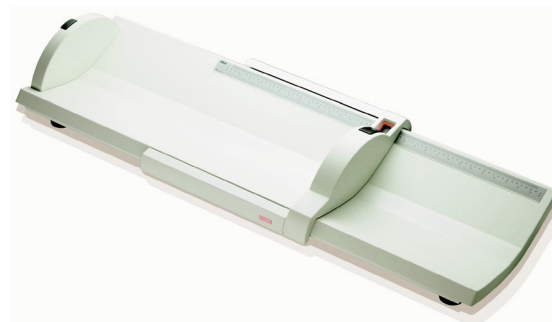

Tydligt
läsfönster

Art. Nr. 4161721009

Denna längdmätare har både en modern och funktionell design och är tillverkad i lätta material som är enkla att rengöra. Fötterna glider inte på bordet/bänken.

Botten är skålad, så att barnet inte ligger snett eller kan glida ur. Det finns både huvud- och fotstöd. Fotstödet glider lätt. Du för lätt upp det mot barnets fötter. Läs av längden vid pilen i läsfönstret i fotstödet.

Den svarta knappen på fotstödet är en "sparkspärr" som gör att barnet inte kan trycka tillbaka det. När du ska dra tillbaka det igen så håller du hela tiden den svarta knappen intryckt så att "sparkspärren" kopplas ur. "Sparkspärren" kan du koppla in och ur när du vill.

Mätområde	33 – 100 cm
Gradering	1 mm
Vikt	3,6 kg
Mått (LxHxB)	1100 x 170 x 400 mm
Direktiv	93/42/EG, MDD

seca 417 Mätbräda



Art. Nr. 4171721009

Lätt och mobil mätbräda som är vikbar för att spara förvaringsutrymme. Mätbrädan är tillverkad i ett mycket hållbart material som även är glatt och underlättar rengöring. Det mobila fotstödet gör mätningen lätt och den stora tydliga skalan underlättar utläsningen.

Mätområde	10 - 100 cm
Gradering	2 mm
Vikt	1,6 kg
Mått mätbräda	1110 x 115 x 333 mm
Mått ihopfälld (BxHxD)	577 x 115 x 333 mm

seca 4180000004
Huvud- och Fotstöd till seca 376
och
seca 4190000009-1
Huvud- och Fotstöd till seca 336



seca 418

Huvud- och fotstöd till [Baby våg seca 376](#), om inte [längdmätare seca 233](#) är monterad.

Lätt och behändig. Huvud- och fotstöden kan lätt fästas på vågen. Detta tillbehör ökar säkerheten genom att säkra barnets huvud och fötter.

seca 419

Huvudstöd till [Baby våg seca 336](#), om inte [längdmätare seca 232](#) är monterad.

Vikt	418	388 g
	419	142 g
Mått (LxHxB)	418	205 x 148 x 69 mm
	419	205 x 145 x 45 mm
Direktiv	93/42/EG, MDD	

seca 447 Nätadapter



Art.nr. 4470000009

Nätadapter som passar samtliga av SECAs vågar och elektriska utrustningar. Kan användas som komplement till vanliga batterier och krävs till de vågar som har uppladdningsbara batterier.

Spänning	230V/12V
Strömstyrka	150 mA
Vikt	0,31 kg
Mått (BxHxD)	50 x 40 x 75 mm

seca 465 Trådlös skrivare



Art. Nr. 4650000009

Trådlös skrivare för analys och utskrift på termopapper. Tar emot resultat överförda från seca 360° wireless vågar och längdmätare. I layoutfilen kan man lägga in sin egen logo och välja vad som ska skrivas ut t.ex. vikt, längd och BMI i jämförelse med WHO. Levereras med SD-kort, 1 rulle termopapper och nätadapter.

Skrivaren har möjlighet att skriva ut längd, vikt, BMI, BFR, RMR* och total energikonsumtion.

Vikt	800 g
Mått	106 x 116,5 x 170 mm
Skrivarhastighet	80mm/sek

*BMI: body mass index, BFR: body fat rate, RMR: resting metabolic rate

seca 635 Golvvåg med extra stor och låg fotplatta



Art.nr. 6357021094

En Klass III våg. Enligt direktivets krav försedd med vattenpass och justerbara fötter.

När man är omfångsrik kan man ha svårt att se var man placerar sina fötter.

En våg med stor, och låg, fotplatta är säkrare för patienten.

Vågen är en robust elektronisk golvvåg med lös display som kan läggas på bordet, hållas i handen eller hängas på väggen. (Vägghållare medföljer.)

Fotplattan är extra stor och bara 45 mm hög vilket gör det enklare att kliva på vågen.

Vågen har dämpning vilket innebär att du får en korrekt vikt, även om patienten inte kan vara riktigt still. HOLD-, TARE- och BMI-funktion ingår.

Vågen har också ett handtag som underlättar förflyttning.

Levereras med 6 st AA batterier. Vid batteridrift stänger vågen av sig efter 5 minuter. Med en [seca nätagadapter \(tillbehör\)](#) kan vågen även drivas via ett vanligt vägguttag.

Kapacitet	300 kg
Gradering	100 g<200 kg>200 g
Vikt	17 kg
Vågplattans mått (BxHxD)	640 x 45 x 640 mm
Direktiv	93/42/EG, MDD, 2009/23/EG, Klass III
Certifikat för varje enskild våg medföljer	

seca 645 Stor vågplatta med räcke



Art.nr. 6457021193

(Vågen visas med tillbehöret [seca 223, längdmätare.](#))


En Klass III våg. Enligt direktivets krav försedd med vattenpass och justerbara fötter. Har man svårt att gå och stå eller är lite ostadig så är det bra när man kan stödja sig. seca 645 är en elektronisk golvväg med räcke som är särskilt bra för patienter som har svårt att gå och stå. Vågplattan är låg, bara 45 mm. Det finns också plats att ställa dit en mindre stol, eller pall, för patienter som vill sitta. Vågen har dämpning vilket innebär att du får korrekt vikt även när patienten har svårt att vara still. Pre-TARA, TARA, HOLD och BMI ingår. Två transporthjul vid ena sidan underlättar förflyttning, så du är aldrig låst till en och samma lokal.

Vågen drivs med uppladdningsbara batterier som laddas med medföljande [seca nätadapter](#). Vågen stänger automatiskt av sig efter 5 minuter på batteridrift.

Med en [seca 223 längdmätare \(tillbehör\)](#) så kan du väga och mäta och samtidigt få fram BMI.

Kapacitet	300kg
Gradering	0 - 200kg/100g och 0 - 300kg/200g100g
Vikt	25,4 kg
Mått plattform (BxHxD)	600 x 55 x 600 mm
Direktiv	93/42/EG, MDD och 2009/23/EG, Klass III
	Certifikat för varje enskild våg medföljer

seca 657 Bårvåg

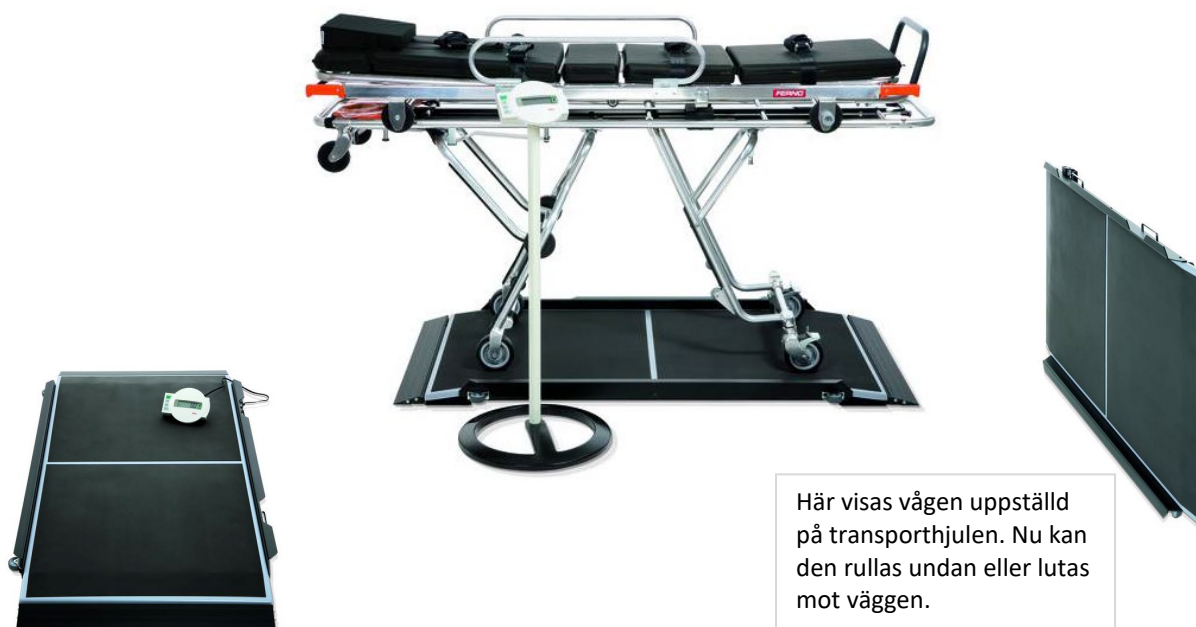

Här visas vågen uppställd på transporthjulen. Nu kan den rullas undan eller lutas mot väggen.

Art.nr. 6571021193

Ovan visas vågen med tillbehöret seca 472, pelare för display.

En Klass III våg. Enligt direktivets krav försedd med vattenpass och justerbara fötter. Elektronisk golvmödel med mycket stor vågplatta med halkskydd, fjädrande ramper och lös display. Denna våg används när en liggande patient inte kan/bör lyftas/förflyttas. Används t.ex. på Akutavdelningen, Operation/Anestesi, Dialysavdelningen m.fl.

HOLD-, TARA- och BMI-funktion ingår. Vågen har också ett specialminne som gör att en tom bår/säng kan vägas direkt efteråt och vikten dras då av från den tidigare totalvikten och endast patientens vikt visas. Vågen har också dämpning vilket innebär att du får korrekt vikt även om båren eller patient inte är riktigt stilla.

Vågen har två handtag och två transporthjul för att underlätta förflyttning. Vågen drivs via en [seca nätadapter](#) som medföljer.

Kapacitet	300 kg
Gradering	100 g till 200 kg/200 g till 300 kg
Vikt	43,5 kg
Plattformens mått (BxL)	760 x 1430 mm
Direktiv	93/42/EG, MDD, 2009/23/EG, Klass III
Certifikat för varje enskild våg medföljer	

seca 665 Rullstolsvåg



Art.nr. 6657021193
Art.nr. 6657021198 (Wireless) 

En Klass III våg. Enligt direktivets krav försedd med vattenpass och justerbara fötter.

Elektronisk golvmodell med mycket stor golvplatta i slagtålig metall som är försedd med halkskydd.

Den har även sidoskydd och fjädrande ramper som gör den säker för rullstolar. Vågen har dämpning vilket innebär att du får korrekt vikt även när patienten har svårt att vara still. Vikten visas i stora, digitala, siffror.

Displayen kan vikas ned och låsas vid förflyttning eller förvaring i upplyftläge, t.ex. mot en vägg. HOLD-, Pre-TARA, TARA- och BMI-funktion ingår. Vågen drivs via en [seca nätadapter](#) som medföljer. Vågen har 2 st hjul för att underlätta förflyttning.

Kapacitet	300 kg
Gradering	0 – 200 kg/100 g och 0 – 300 kg/200 g
Vikt	23 kg
Plattformens mått (BxHxD)	800 x 65 x 960 mm
Direktiv	93/42/EG, MDD och 2009/23/EG, Klass III
Certifikat för varje enskild våg medföljer	



seca 675 med extra stor vågplatta



Art.nr. 6757021193

En Klass III våg. Enligt direktivets krav försedd med vattenpass och justerbara fötter.

Elektronisk golvmödel med mycket stor fotplatta i slagtålig metall, med halkskydd, fjädrande ramp och lös display.


Displayen kan hängas på väggen, läggas på bordet eller hållas i handen.

Vikten visas i stora, digitala, siffror. HOLD-, Pre-TARA, TARA- och BMI-funktion ingår. Vågen har dämpning vilket innebär att du får korrekt vikt även när patienten har svårt att vara still.

Vågen har handtag och 2 st hjul för att underlätta förflyttning och förvaring.

Vågen drivs via en [seca nätadapter](#) som medföljer.

Kapacitet	300 kg
Gradering	0 – 200 kg/100 g och 0 – 300 kg/200 g
Vikt	23 kg
Plattformens mått (BxHxD)	800 x 65 x 960 mm
Direktiv	93/42/EG, MDD och 2009/23/EG, Klass III
Certifikat för varje enskild våg medföljer	

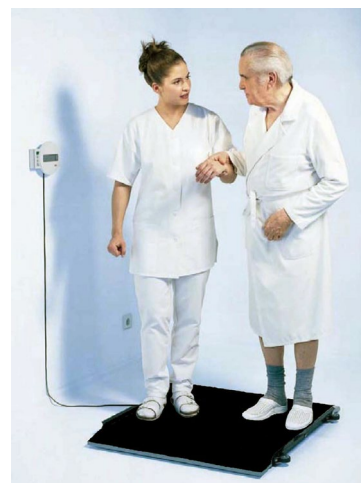



seca 677 Kombivåg **Wireless**



Art.nr. 6777021194

En Klass III våg. Enligt direktivets krav försedd med vattenpass och justerbara fötter. seca 677 är en våg för alla upprätta patienter. Vågplattan har halkskydd och ett ordentligt räcke att stödja sig på. Du kan också ställa en stol på den.

HOLD-, Pre-TARA, TARA- och BMI-funktion ingår. Vågen har dämpning vilket innebär att du får korrekt vikt även när patienten har svårt att vara still. Du kan fälla upp vågplattan och låsa den för att spara utrymme. Vågen har transporthjul under räckets så du enkelt kan rulla iväg den. Vågen drivs via en [seca nätadapter](#) som medföljer.



seca
Precision for health

Grundfunktioner

- Vågen har HOLD-funktion vilket betyder att du låser vikten och kan ta hand om patienten först och läsa av vikten sedan.
- Vågen har dämpning så att du får korrekt vikt även när patienten har svårt att vara still. Särskilt praktiskt när det gäller barn eller patienter med tremor.
- BMI
- Med TARA-funktionen kan du t.ex. dra bort vikten på en filt eller en rollator, innan du väger.
- Med Pre-TARA funktionen kan du dra bort vikten på något du ibland har på vågen. (Kanske en speciell stol?)

Extra funktioner


- Du kan aktivera en automatisk HOLD-funktion.
- För att snabbt veta när auto-HOLD ställt in sig så kan du aktivera en signal.
- Dämpningen kan ökas så att patienter som inte kan stå riktigt stilla fördröjer viktvisningen.
- Du kan aktivera automatisk radering av lagrade värden. Då är du t.ex. säker på att BMI alltid beräknats på rätt längd.
- Du kan aktivera en trådlös skrivarfunktion så att du kan trycka fram ett kvitto. Då måste du ha en seca skrivare som kan ta emot den trådlösa signalen. Eftersom överföringen av vikten till skrivaren är trådlös så kan du placera skrivaren där du tycker att den står bäst.
- Vågen kan också kopplas upp i ett nätverk, trådlöst förstås, och kopplas samman med ett speciellt dataprogram som kan hjälper till med analys av vikten och slutligen registrera vikten i den elektroniska patientjournalen.

Kapacitet	300 kg
Gradering	100 g <100 kg > 200 g
Vikt	38 kg
Plattformens mått (BxHxD)	800 x 30 x 960 mm
Räckets höjd:	920 mm
Direktiv	93/42/EEG, MDD, 90/384/EEG, Klass III
Certifikat för varje enskild våg medföljer	



Tillbehör:
[Seca 465 och 466 skrivare](#)
för termopapper eller termopapper/etikett

seca 685 Multifunktionsvåg med ramp

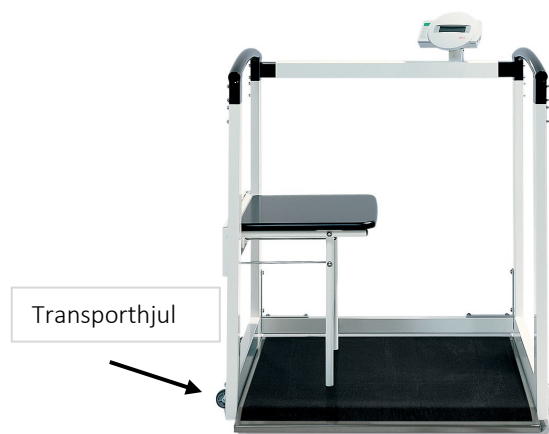

Art.nr. 6857021194

Vågen har stadiga räcken och en nedfällbar sits. På sidan av vågen finns två transporthjul som gör den enklare att förflytta (se bild). Vågplattan är försedd med halkskydd och ramp. Vågen drivs med den medföljande seca nätadaptern.
(Leveranstid: ca 6 veckor)

Kapacitet:	300 kg
Gradering:	100 g <200 kg> 200 g
Plattform:	800 x 850 mm
Vågens mått (B x Dj x H)	910 x 970 x 1100 mm
Vågens vikt	ca. 54 kg
Direktiv	93/42/EG, MDD, 2009/23/EG, Klass III
Certifikat för varje enskild våg medföljer	



seca 704 Pelarvåg



Med tillbehör [seca 220](#)
längdmätare.



Bra plats för
fötterna samt
transporhjul
under pelaren.

Art.nr. 7047021098

En Klass III våg. Enligt direktivets krav försedd med vattenpass och justerbara fötter. Mycket robust, elektronisk, pelarvåg med större plattform. Vikten visas i stora, digitala, siffror. TARA, HOLD och BMI-funktion ingår. Hela 300 kg kapacitet. Transporhjul under pelaren gör det lätt att förflytta vågen. Levereras med 6 st engångsbatterier, typ AA, som räcker till ca. 16.000 vägningar. En mycket pålitlig våg. Med en [seca nätadapter \(tillbehör\)](#) kan vågen även drivas via ett vanligt vägguttag. [seca 220 längdmätare](#) för 60 – 200 cm, beställs som tillbehör.

Grundfunktioner

- Vågen har HOLD-funktion vilket betyder att du låser vikten och kan ta hand om patienten först och läsa av vikten sedan.
- NYHET Nu väger du med 50 g skalintervall så nu behövs ingen separat våg för barn.



- Vågen har också Mor/Barn funktion, så du kan väga ett barn i famnen på en vuxen.
- Vågen har dämpning så att du får korrekt vikt även när patienten har svårt att vara still. Praktiskt om barnet sprattlar.
- BMI
- Med Pre-TARA-funktionen fungerar så att du kan dra av en förinställd, redan lagrad vikt från patientens vikt. T.ex. en ungefärlig klädvikt.
- Vågen stänger automatiskt av sig vid batteridrift.
- Under pelaren finns två transporthjul som underlättar förflyttning.

Extra funktioner

- Du kan aktivera en automatisk HOLD-funktion.
- För att snabbt veta när auto-HOLD ställt in sig så kan du aktivera en signal.
- Dämpningen kan ökas så att patienter som inte kan stå riktigt stilla fördröjer viktvisningen.
- Du kan aktivera automatisk radering av lagrade värden. Då är du t.ex. säker på att BMI alltid beräknats på rätt längd.
- Du kan aktivera en trådlös skrivarfunktion så att du kan trycka fram ett kvitto. Då måste du ha en seca skrivare som kan ta emot den trådlösa signalen. Eftersom överföringen av vikten till skrivaren är trådlös så kan du placera skrivaren där du tycker att den står bäst.
- Vågen kan också kopplas upp i ett nätverk, trådlöst förstås, och kopplas samman med ett speciellt dataprogram som kan hjälper till med analys av vikten och slutligen registrera vikten i den elektroniska patientjournalen.

Kapacitet	300 kg
Gradering	50 g till 150 kg sedan 100 g
Vikt	14,9 kg
Mått (BxHxD)	360 x 930 x 520 mm
Fotplattans mått (BxHxD)	335 x 80 x 345 mm
Direktiv	93/42/EEG, MDD och 90/384/EEG, Klass III
Certifikat för varje enskild våg medföljer	

Tillbehör

seca 220 längdmätare

seca 465/seca 466 skrivare för termopapper eller termopapper/etikett

seca nätadapter



seca 757 Babyvåg **Wireless**



Art.nr 7577021698

En Klass III våg. Enligt direktivets krav försedd med vattenpass och justerbara fötter. Elektronisk och mycket uppskattad barnvåg som är noggrann med 5 g gradering. Vågen har HOLD- och TARA- funktion. Den har också dämpning, vilket gör att du får en korrekt vikt även om baby inte ligger still. Nackstöd ingår alltid. Vågen är stabil, lättskött och har tydlig LCD display. Vikten visas i stora digitala siffror. Den helgjutna designen, gör vågen hygienisk och lätt att hålla ren. Försedd med **Wireless** överföring av mätdata.

Levereras med laddningsbara AA batterier och **seca** nätadapter.

Kapacitet	5/15 kg
Gradering	2/5 g
Längdmätning	0 – 50 mm
Vikt	6,8 kg
Mått (BxHxD)	551 x 151 x 320 mm
Mått vågskål (BxHxD)	540 x 110 x 250 mm
Direktiv	93/42/EG, MDD, 2009/23/EG, Klass III
Certifikat för varje enskild våg medföljer	



seca
Precision for health

seca 764 digital våg

Både mäter och väger



Art.nr. 7647021099

En Klass III våg. Enligt direktivets krav försedd med vattenpass och justerbara fötter. Extremt robust, elektronisk, pelarvåg med större plattform och inbyggd elektronisk längdmätare. TARA, HOLD och BMI ingår. Vågen har hela 250 kg kapacitet.

Vikten visas i den nedersta displayen och längden visas i den övre. Pelaren är hög så displayen är lätt att läsa av. Tryck sedan på en knapp och du får patientens BMI. Transporhjul under pelaren gör det lätt att förflytta vågen. Vågen drivs via en [seca nätadapter](#) som medföljer.

Kapacitet	250 kg
Gradering	100 g
Längdmätare	1100 – 2100 cm
Totalvikt	20 kg
Vågplattans mått är (BxHxD)	360 x 84 x 350 mm
Direktiv	93/42/EG, MDD, 2009/23/EG, Klass III
Certifikat för varje enskild våg medföljer	

seca 799 Pelarvåg



Transporthjul
underpelaren.

Art.nr. 7997021099

(Här visad med tillbehöret [seca 220, längdmätare](#))

En Klass III våg. Enligt direktivets krav försedd med vattenpass och justerbara fötter.
Elektronisk pelarvåg. Vikten visas i stora, digitala, siffror. TARA, HOLD och BMI-funktion ingår.
Två hjul under pelaren gör det lätt att förflytta vågen.
Levereras med 6 st engångsbatterier, typ AA, som räcker till ca. 16.000 vägningar.
Med en [seca nätadapter \(tillbehör\)](#) kan vågen även drivas via ett vanligt vägguttag.

OBS! [seca 220 längdmätare](#) för 60 – 200 cm, beställs som tillbehör.

Kapacitet	200 kg
Gradering	100 g < 150 kg >200 g
Vikt	6,3 kg
Mått (BxHxD)	294 831 417 mm
Mått vågplatta (BxHxD)	272 x 75 x 280 mm
Direktiv	93/42/EG, MDD, 2009/23/EG, Klass III
Certifikat för varje enskild våg medföljer	

seca 817 Marina



Med fint vågmönster för en säkrare fotplatta

- På golvväg finns en liten piedestal med små kreativa detaljer. Bland annat med fint vågmönster på en stabil glas plattform, för en säkrare fotplatta.
- Skyddande ABS plast runt display, som skyddar mot repor. Det är 29 mm höga LCD siffror för lättare avläsning.
- Det medföljer 4st fötter som gör att vågen går att ställa på badrumsmattan så att vågen är fri från underlaget.
- Kapacitet: 180 kg
- Skalindelning: 100 g
- Vikt: 3,5 kg
- Mått: 338 x 95 x 349 mm/Vågplattans mått: 350 x 30 x 340 mm
- Batteridrivnen
- Funktioner: kg/lbs switch / Auto-HOLD / Automatisk avstängning / Tap-on funktion / Step off

seca 852 Bordsvåg



Art. nr. 8521317009

Liten, tunn och elektronisk bordsvåg med tareringsfunktion och automatisk avstängning. Till vågen medföljer en plastskål som passar på vågplattan.

Idealisk för vägning av t.ex. använda op.kompresser för säkrare bestämning av vätske-/blodförlust eller för vägning av använda neoblöjor för urinmätning m.m.

Vågen drivs med 4 st engångsbatterier, typ AAA, som medföljer.

Kapacitet	3 kg
Gradering	1 g
Vikt (med skål)	650 g
Mått (BxDxH)	210 x 210 x 50 mm

seca 856 Elektronisk bordsvåg



Art. nr. 8561314009

Liten och robust elektronisk bordsvåg i rostfritt stål och med automatisk avstängning efter 3 minuter. Vågen har TARE och HOLD funktion.

Idealisk för vägning av t.ex. använda op.kompresser för säkrare bestämning av vätske-/blodförlust eller för vägning av använda neoblöjor för urinmätning m.m.

Specialtätning runt display och batterifack skyddar mot fukt.

Vågen drivs med 4 st engångsbatterier, typ AAA, som medföljer.

Kapacitet	5 kg
Gradering	1 g < 3 kg > 2 g
Vikt	1,5 kg
Mått (BxDxH)	265 x 265 x 53 mm

seca 878 Golvvåg



Art.nr. 8787021099

En Klass III våg. Enligt direktivets krav försedd med vattenpass och justerbara fötter.
En liten platt, lätt och robust elektronisk golvvåg med metallram. Den väger endast 4,1 kg.
Vikten visas med stora, digitala siffror i en dubbel display.
Dessutom finns "Hold"- och "Mor/Barn" - funktion (2 in 1).

Vågen styrs enkelt med foten och stänger automatiskt av sig efter ca.3 min.

Den nya energisnåla elektroniken fungerar mycket länge än på de vanliga, använd medföljande, engångsbatterierna typ AA, så du slipper adapter. Man kan även koppla in tillbehöret [seca nätadapter](#) kan vågen även drivas via ett vanligt vägguttag.

När vågen transporteras kan du stänga av "huvudströmmen" så vågen inte startar alls.
Då spar du batterierna. Vid längre transporter kan du använda tillbehöret [seca 421](#),
[transportväska](#) med axelrem.

För ihopkoppling med längdmätare, se [seca 217](#).

Kapacitet	200 kg
Gradering	100 g<150 kg>200 g
Vikt	4,1 kg
Mått (BxHxD)	321 x 60 x 361 mm
Mått vågplatta (BxHxD)	288 x 60 x 280 mm
Direktiv	93/42/EG, MDD, 2009/23/EG, Klass III
Certifikat för varje enskild våg medföljer	

seca 899

Lätt golv våg med handtag



Art.nr. 8997021094

En Klass III våg. Enligt direktivets krav försedd med vattenpass och justerbara fötter. En platt och lätt, elektronisk golvvåg med lös display som kan läggas på bordet, hållas i handen eller hängas på väggen. (Vägghållare medföljer.) Vikten visas i stora, digitala siffror. HOLD-, TARE- och BMI-funktion ingår.

Ett handtag gör att du lätt kan flytta vågen.

Vid längre transporter kan du använda tillbehöret [seca 421, transportväska](#) med axelrem.

Levereras med 6 st engångsbatterier, typ AA. Vid batteridrift stängs vågen av efter ca. 20 sek. Med en [seca nätadapter \(tillbehör\)](#) kan vågen även drivas via ett vanligt vägguttag.

Kapacitet	200 kg
Gradering	100 g<150 kg>200 g
Vikt	4,5 kg
Mått (BxHxD)	320 x 60 x 356 mm
Mått vågplatta (BxHxD)	280 x 60 x 278 mm
Kabellängd display	2,25 m
Direktiv	93/42/EG, MDD, 2009/23/EG, Klass III
Certifikat för varje enskild våg medföljer	

seca 959 Stolvåg **Wireless**



Art. Nr. 9597021092

En Klass III våg. Enligt direktivets krav försedd med vattenpass och justerbara hjul.
En populär och praktisk elektronisk stolvåg för vårdcentralen, sjukhemmet eller den geriatriska kliniken. Eftersom vågen har svängbara och låsbara hjul så kan du också använda den för kortare transporter.

Vikten visas i stora, digitala siffror. HOLD, TARA och BMI-funktion ingår.

Vågen har dämpning vilket innebär att du får korrekt vikt även när patienten har svårt att sitta still. Fällbara armstöd och fotstöd (se bild) gör det enklare att komma i, och ur.

Sitsen av formpressad plast är hygienisk och enkel att rengöra.

Levereras med uppladdningsbara batterier och en [seca nätadapter](#) som förvaras i en liten väska på vågen.



seca
Precision for health

Grundfunktioner

- Svängbara och låsbara hjul.
- Vågen har HOLD-funktion vilket betyder att du låser vikten och kan ta hand om patienten först och läsa av vikten sedan.
- Vågen har dämpning så att du får korrekt vikt även när patienten har svårt att vara still. Särskilt praktiskt när det gäller barn eller patienter med tremor.
- BMI
- Med TARA-funktionen kan du t.ex. dra bort vikten på en filt innan du väger.
- Med Pre-TARA funktionen kan du dra bort vikten på något du alltid vill ha på vågen, t.ex. ett underlägg

Extra funktioner

- Du kan aktivera en automatisk HOLD-funktion.
- För att snabbt veta när auto-HOLD ställt in sig så kan du aktivera en signal.
- Dämpningen kan ökas så att patienter som inte kan stå riktigt stilla fördröjer viktvisningen.
- Du kan aktivera automatisk radering av lagrade värden. Då är du t.ex. säker på att BMI alltid beräknats på rätt längd.
- Du kan aktivera en trådlös skrivarfunktion så att du kan trycka fram ett kvitto. Då måste du ha en seca skrivare som kan ta emot den trådlösa signalen. Eftersom överföringen av vikten till skrivaren är trådlös så kan du placera skrivaren där du tycker att den står bäst!
- Vågen kan också kopplas upp i ett nätverk, trådlöst förstås, och kopplas samman med ett speciellt dataprogram som kan hjälper till med analys av vikten och slutligen registrera vikten i den elektroniska patientjournalen.

Kapacitet	300 kg
Gradering	50 g<150 kg> 100 g<250 kg>200 g
Vikt	24,5 kg
Mått (BxHxD)	563 x 897 x 978 mm
Direktiv	93/42EEG, MDD, 90/384EEG, Klass III
Certifikat för varje enskild våg medföljer	



Tillbehör:
[Seca 465 och 466 skrivare](#)
för termopapper eller termopapper/etikett