



Ultra Sterilpose

Poser og ruller for sterilisering av instrumenter

Ett kostnadseffektivt og ultrasterkt alternativ til det ytre sterilpapiret eller i de tilfeller der en vanlig papir-/plastpose ikke holder, f.eks. ved pakking av tungt gods eller instrumentrister.

- Engangsprodukt, kan steriliseres og åpnes en gang
- Enkel å åpne og legge frem aseptisk
- Indikatorer for damp
- Batch- og størrelsemerking på åpningssiden

Non-woven materialet som brukes i ULTRA poser har svært gode egenskaper med hensyn til sprengningstyrke, rivestyrke, sveisestyrke, beskyttelse mot bakteriepenetrasjon, dampporøsitet og vannavstøtende. Alt dette gjør ULTRA-ruller til et sikkert og kostnadseffektivt alternativ til de vanlige posene og sterilpapiret.

Vi anbefaler ULTRA-rullene til tungt gods, tunge instrumenterbokser og ved operasjoner der fiber- og partikkelutslipp absolutt må minimeres (som for eksempel ved hjerte-, implantant- og øyekirurgi).

Ruller		
Art. Nr.	Størrelse	Ant./forpk
GUL050X070	50 mm x 70 m	5
GUL080X070	80 mm x 70 m	3
GUL120X070	120 mm x 70 m	3
GUL160X070	160 mm x 70 m	2
GUL220X070	220 mm x 70 m	1
GUL250X070	250 mm x 70 m	1
GUL285X070	285 mm x 70 m	1
GUL320X070	320 mm x 70 m	1
GUL380X070	380 mm x 70 m	1
GUL420X070	420 mm x 70 m	1
GUL470X070	470 mm x 70 m	1
GUL520X070	520 mm x 70 m	1
GUL580X070	580 mm x 70 m	1

Bruksanvisning:

Sørg for at det finns frie flater slik at steriliseringsgassene kan passere inn og ut av posen. Fyll posen kun 2/3, både på lengden og bredden.

Rull/pose åpning:

Ultra materialet kan åpnes fra begge endene, uavhengig av materialfiberens retning.

For poser som er designet med en pil for åpningsretning:

Åpne i pilens retning gjør det mulig å åpne posen antiseptisk.

Posestørrelser anbefalet til kurve:

	Innerste lag	Ytre lag
DIN og 1/2 DIN	380 x 450 mm	420 mm ruller
SPRI (std høyde)	470 mm ruller	520 mm ruller
SPRI (høy modell)	520 mm ruller	580 mm ruller


Oppbevaring:

Unngå direkte sol og ekstremt høye temperaturer
 Temperatur 10-30 grader C
 Relativ luftfuktighet 30-60%
 Esken må ikke skades under transport eller oppbevaring

Holdbarhet:

5 år fra produksjonsdato hvis anbefalingene for oppbevaring er overholdt

Poser		
Art. Nr.	Størrelse	Ant./forpk
SUL080X300	80 x 300 mm	2000
SUL120X200	120 x 200 mm	1200
SUL120X400	120 x 400 mm	1000
SUL160X300	160 x 300 mm	1200
SUL160X500	160 x 500 mm	1000
SUL220X400	220 x 400 mm	500
SUL220X600	220 x 600 mm	400
SUL250X500	250 x 500 mm	500
SUL285X450	285 x 450 mm	500
SUL285X600	285 x 600 mm	300
SUL320X550	320 x 550 mm	300
SUL380X650	380 x 650 mm	400
SUL380X450	380 x 450 mm	300
SUL380X450	380 x 690 mm	300

ULTRA – RULLER og POSER

TEKNISK DATABLAD

BESTÅR AV

Non-Woven polyalken 93g/m²

LAMINATFILM

Blå polyester 12µm+ polypropen 38µm + lim

FAKTA OM PRODUKTET

Størrelse Bredde: Toleranse ± 2 mm

Sveisestyrke: > 1,5 N/15 mm, (>4-5 større enn det som EN868-5 krever)

INDIKATOR

Damp (134°C ≤ 18min.) omslag fra rosa til brunt

SVEISING / ANBEFALING

Ved 135°-155°C. i henhold til EN ISO 11607-2 er det anbefalt å bruke en validert varmemeforsegling for å forsegle posen og lage en mikrobiell barriere.

Kvalitetssystem:

ISO 9001 og ISO 13485

CE-merking:

MDR 2017/745

EN ISO 11607: 1, EN 868-5

og EN 868-9

Indikatorer: ISO 11140-1, Class I