

Tips vid problem med MiniONE®

Kontroll av ballong

Kontrollera ballongens vattenmängd en gång i veckan. Ta ut vattnet med en spruta och kontrollera att det är samma mängd vatten som sprutades in. Töm sprutan och fyll på med nytt vatten enligt tabell ovan.

Vid läckage från ballong

Om det uppstår läckage av vatten från ballongen (genom porten på utsidan), dra ur resten av vattnet och ersätt med nytt vatten (samma mängd som tidigare). Ta inte ut MiniONE®.

Om ballongen är skadad

Om ballongen är skadad skall MiniONE® bytas ut.

OBS! Ta inte ut MiniONE® om du inte har en ny att sätta in! Har den fallit ut utan att du har en ny, så håll den på plats med ett plåster eller tape tills du får en ny.

Faktorer som kan påverka funktionen av MiniONE®

- Ändring av den etablerade gastrostomikanaler
- Förekomst av fistlar
- Osäkerhet med hänsyn till gastrostomins riktning och längd
- Operationsärr eller tarmstomi
- Lågt PH-värde i magen
- Intag av mediciner
- Infektion
- Spasmer
- Övervikt
- Mekanisk påverkan på gastronomiporten vid flyttning av patient
- För mycket/lite vatten i ballongen
- Dålig genomsköljning efter mat
- Mat eller mediciner i ballongporten
- Medicin satt direkt in i matporten med hjälp av spruta
- Mellanstycket kopplat eller uttaget på fel sätt
- Blockering av matporten
- Fel storlek på gastrostomiporten

