



# Ultra Sterilpåse

## Påsar och rullar för sterilisering av instrument

Ett kostnadseffektivt och ultrastarkt alternativ till det yttre packskynket eller i de fall där en vanlig papper-/plastpåse inte håller, t ex vid paketering av tungt gods eller instrumentgaller.

- Engångsprodukt, kan steriliseras och öppnas en gång
- Lätt att öppna och lägga fram aseptiskt
- Indikatorer för ånga
- Batch- och storleksmärkning på öppningssidan

NON-WOVEN materialet som används i ULTRA-påsarna har mycket goda egenskaper vad gäller exempelvis sprängstyrka, rivstyrka, svetsstyrka, skydd mot bakteriepenetration, ångporositet och vattenavvisning. Allt detta gör ULTRA-rullarna till ett säkert och kostnadseffektivt alternativ till vanliga påsar och packskynken.

Vi rekommenderar ULTRA-rullarna till tungt gods, tunga instrumentbackar och till operationer där fiber- och partikelsläpp absolut skall minimeras (som t.ex. vid hjärt-, implantat- och ögonkirurgi).

Rullar		
Art. Nr.	Mått	Ant./förp.
GUL050X070	50 mm x 70 m	5
GUL080X070	80 mm x 70 m	3
GUL120X070	120 mm x 70 m	3
GUL160X070	160 mm x 70 m	2
GUL220X070	220 mm x 70 m	1
GUL250X070	250 mm x 70 m	1
GUL285X070	285 mm x 70 m	1
GUL320X070	320 mm x 70 m	1
GUL380X070	380 mm x 70 m	1
GUL420X070	420 mm x 70 m	1
GUL470X070	470 mm x 70 m	1
GUL520X070	520 mm x 70 m	1
GUL580X070	580 mm x 70 m	1

**Bruksanvisning:**

Se till att det finns fria ytor så att steriliseringsgaserna kan passera in och ut ur påsen. Fyll påsen endast till 2/3, både på längden och bredden.

**Rulle/påse öppning:**

Ultra-materialet kan öppnas från båda ändar, oberoende av materialfibrernas riktning.

**För påsar som är designade med pil för öppningsriktning:**

Öppning i pilens riktning gör det möjligt att öppna påsen antiseptiskt.

**Påsstorlek till korg:**

	Innerlager	Ytterlager
DIN och 1/2 DIN	380 x 450 mm	420 mm rullar
SPRI (std höjd)	470 mm rullar	520 mm rullar
SPRI (hög modell)	520 mm rullar	580 mm rullar



Påsar		
Art. nr.	Mått	Ant./förp.
SUL080X300	80 x 300 mm	2000
SUL120X200	120 x 200 mm	1200
SUL120X400	120 x 400 mm	1000
SUL160X300	160 x 300 mm	1200
SUL160X500	160 x 500 mm	1000
SUL220X400	220 x 400 mm	500
SUL220X600	220 x 600 mm	400
SUL250X500	250 x 500 mm	500
SUL285X450	285 x 450 mm	500
SUL285X600	285 x 600 mm	300
SUL320X550	320 x 550 mm	300
SUL380X650	380 x 650 mm	400
SUL380X450	380 x 450 mm	300
SUL380X690	380 x 690 mm	300

## ULTRA – RULLAR och PÅSAR

### TEKNISKA DATA

**BESTÅNDSDELAR**

Non-Woven polyalken 93g/m<sup>2</sup>

**LAMINATFILM**

Blå polyester 12µm+ polypropen 38µm + lim

**FAKTA OM PRODUKTEN**

Storlek Bredd Tolerans ± 2 mm  
 Svetsstyrka > 1,5 N/15 mm (= krav i EN868-5).  
 Ultra är ca. 6N/15mm

**INDIKATOR**

Ånga (134°C ≤ 18min.) omslag från rosa till brunt

**SVETSNING / REKOMMENDATION**

Vid 135°-155°C. Enligt EN ISO 11607-2 är det lämpligt att använda en validerad värmeförsegling för att försegla paket med mikrobiell barriär.

**Förvaring:**

Undvik direkt solljus och extremt höga temperaturer  
 Temperatur 10°-30°C, Relativ luftfuktighet 30-60%  
 Kartongen får inte skadas under transport och förvaring

**Hållbarhet:**

5 år från produktionsdatum om rekommendationerna för förvaring hålls

**Kvalitetssystem:**

ISO 9001 och ISO 13485

**CE-märkning:**

MDR 2017/745  
 EN ISO 11607: 1, EN 868-5  
 och EN 868-9

Indikatorer: ISO 11140-1 (Class I)