

# STERISET FUNKTIONSKONTROLL

För fullständig information var god se instruktionsmanualen.



Steriset består av botten innerlock och ytterlock.

Kontrollera ovankanten av containerbotten från yttre skador.



Kontrollera ytorna på containerbotten från yttre skador exempelvis skevhet.



Kontrollera att packningen är intakt och på plats i innerlocket.



Kontrollera de mekaniska ventilerna på innerlocket. Kontroll kan göras genom att trycka ner ventilen och se att ventilen fjädras tillbaka / lyfta på ventilen och se att fjädringen fungerar.

Kontrollera ytorna på innerlocket från yttre skador.

Kontrollera ytorna på ytterlocket från yttre skador.



Funktionskontrollen är nu klar. Nu kan de tre olika delarna av Steriset containern sättas samman.

