

## seca 376 Babyvåg **Wireless**



Art. nr. 3767021098

Babyvågen, seca 376 **wireless**, har flera inbyggda funktioner, t.ex. möjlighet till utskrift av vikten. Du behöver bara aktivera de funktioner som du vill använda.

Vågen drivs med vanliga AA batterier. När den kopplas till en trådlös seca skrivare, eller seca dataprogram, rekommenderas att vågen drivs via en seca nätadapter.

### Grundfunktioner

- Vågen har två vägområden med olika skalindelning. 5g till 7,5 kg eller 10 g till 2 0kg. Nyhet - om babyn väger mer än 7,5 kg så ställer vågen automatiskt om sig till det högre vägområdet. När du lyft bort babyn från vågen, och displayen visar "noll", så ställer vågen in sig på det lägre viktområdet igen.
- Vågen har HOLD-funktion vilket betyder att du låser vikten och kan ta hand om barnet först och läsa av vikten sedan.
- Vågen har också dämpning vilket betyder att om baby rör sig på vågen när du tryckt på HOLD-knappen så kommer vågen att ta hänsyn till det och visa korrekt vikt.
- TARA-funktionen fungerar så att du först kan lägga ett underlägg på vågen och sedan ta bort underlaggets vikt genom att trycka på TARA-knappen. Sedan väger du baby som vanligt.
- Automatisk avstängning vid batteridrift.



### Extra funktioner

- För att snabbt få veta när HOLD ställt in sig så kan du aktivera en signal.
- Dämpningen kan ökas så att livliga barn inte gör så att viktvisningen fördröjs.
- Det finns också en BMIF-funktion (Bröst Mjök Intag Funktion) där man väger baby, lagrar vikten, matar, lägger baby på vågen igen och får skillnaden mellan de två vägningarna, d.v.s. hur mycket baby ätit.
- Du kan aktivera en trådlös skrivarfunktion så att du kan trycka fram ett kvitto, men då måste du ha en seca skrivare som kan ta emot den trådlösa signalen. Eftersom överföringen av vikten till skrivaren är trådlös så behöver den inte stå precis bredvid vågen.
- Vågen kan också kopplas upp i ett nätverk, trådlöst förstås, och kopplas samman med ett speciellt dataprogram som kan hjälper till med analys av vikten och slutligen registrera vikten i den elektroniska patientjournalen.

Kapacitet	20 kg
Gradering	5 g för 0 -7,5 kg, 10 g upp till 20 kg
Vikt	3,7 kg
Mått (BxHxD)	620 x 190 x 360 mm
Mått vågskål (BxHxD)	615 x 130 x 275 mm
Direktiv	93/42/EEG, MDD, 90/384/EEG, Klass III
Certifikat för varje enskild våg medföljer	

#### TILLBEHÖR:

[seca 418 huvud/fotstöd](#)  
[seca 233 längdmätare](#)  
[seca 414 transportväska](#)  
[seca 465/seca 466 skrivare](#)  
[seca nätadapter](#)