

Chlorine Disinfection

Engangs Floor Wipe med aktiv klor



**Bredspekret
Sporedrepende
Alltid korrekt dosering**

Wet Wipe Chlorine Disinfection-engangsmopper impregnert med klor i pulverform

Pakken med 3 mopper inneholder en brytepose med veske. Når posen brytes går vesken ut i moppen som er klar til bruk etter 10 minutter. Med Wet Wipe Chlorine Disinfection oppnår du en optimal og enkel desinfeksjon.

Bruksområder

Desinfeksjon av gulv, f.eks. ved pasienter i isolat. Effektiv desinfeksjon mot Norovirus samt f.eks. HIV og Hepatitt B, vegetative bakterier, mugg- og gjærsopp. Oppfyller kravet til desinfeksjonsoppgaver ved utbrudd av Clostridium difficile.

Bruksanvisning

1. Legg engangsmoppen på gulvet.
2. Trykk sålen på engangsmoppen.
3. Start desinfeksjon av gulvet.
4. Engangsmoppen og sålen kasseres etter bruk.

Merk

Engangsmoppen bevarer sin desinfeksjonseffekt på > 1000 ppm aktiv klor 7 dager etter åpning.

Varenr. 60172:


1 pakke inneholder 3 mopper, 50 × 13 cm

Innhold

Aktiv klor > 1000–1200 ppm

Egner seg for områder på opptil 10 m².

Produsert i Tyskland. Sikkerhetsdatablad kan rekvireres.

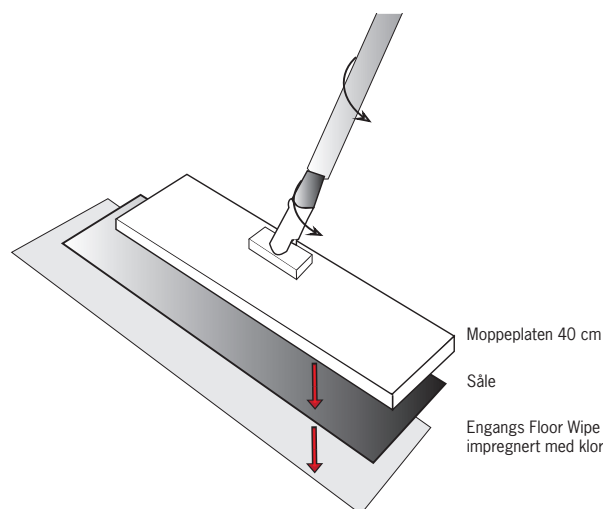

Wet Wipe A/S
Vallensbækvej 65
DK-2625 Vallensbæk
Tel: +45 43 62 19 43
info@wetwipe.dk
www.wetwipe.dk
CVR: 30207726

wetwipe®

74-070 NO, Ver 3
Mar 2020 03

Forhandler
Mediplast AS
Tollbugata 115
3041 Drammen
Tel: +47 32 88 11 00
www.mediplast.com

MEDI PLAST®