


Hem-o-lok ligating clips

- ikke resorberbare polymerclips til åben og endoskopisk kirurgi.

Hem-o-lok polymer ligating clips er et unikt produkt med et enestående design, der sikrer en næsten 100% sikker placering og aflukning af væv/cirkulation.

Hem-o-lok kan benyttes til alle slags operationer, almen kirurgi, urologi, gynækologi, kar, thorax og neurokirurgi.

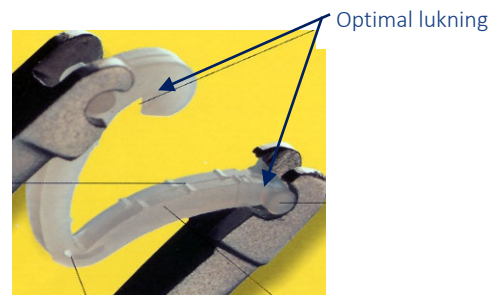

Design

Hem-o-lok clippen har små modhager på begge indersider og samtidig en låsemekanisme, der er helt speciel for hem-o-lok clippen. Denne udformning giver en tryghed og sikkerhed under operationen for kirurgen. Clipsene tabes ikke og de lukker helt tæt. Clipsens ender er afrundede og samles i en lås, så risikoen for vævsnekrose er yderst minimal. På grund af Hem-o-loks unikke design, med en kærv, der passer i applierens kanal i kæben kombineret med en låseanordning (ligeledes i kæben), minimeres risikoen for, at clipsene tabes efter ladning.

Clipsene er let bøjelige, hvilket giver kirurgen mulighed for at lave afklemningsprøver inden en endelig fæstning.

Applieren skal lukkes helt i bund, hvorved der høres et "klik", som er en sikker indikator for, at clippen nu er fæstnet sikkert og korrekt.



Clipsene er ikke-absorberende og skader i en absorptionsproces forekommer ikke. Clipsene kan ikke ses på røntgenbilleder eller ved scanning.

Teleflex®

Magasin

Hem-o-lok clipsenene sidder i magasiner med 6 stk. Magasinet er designet så clipsene ikke falder ud og dermed gøres usterile før brug. De er låst fast på en sådan måde, at clipsene kun kan komme ud med en applier. En sikker måde som holder clipsen steril.

Magasinet er selvklæbende i bunden. Derved kan kirurgen klistre det fast på et sted, hvor det vil være let tilgængeligt. Derved kræves ikke ekstra personale til denne del af den operationelle procedure.

Størrelser:

Varenummer	Farve	Størrelse	Antal clips / magasin	Antal magasiner	Clips i alt	Fæstner væv fra
60WK544220		M	6	14	84	2-7 mm
60WK544230		M/L	6	14	84	3-10 mm
60WK544240		L	6	14	84	5-13 mm
60WK544250		XL	6	14	84	7-16 mm

