

CatAbs™

Bandasjering av urostomi med kateter



CatAbs™-bandasjen er til bandasjering av-, og for å forhindre lekkasje fra en suprapubisk urostomi med kateter, som Cystofix®.

(Merk: CatAbs er ikke tiltenkt for gastrostomier.)

Bandasjen er laget av lufttett og lukktett plastlaminat og har et mykt og superabsorberende materiale. Bandasjen festes til huden med hudvennlig hydrokolloid og har en slisse som gjør at den kan plasseres rundt kateteret. Slissen åpnes, og lukkes igjen med teipen som følger med. CatAbs™ kan sitte på huden i to til tre dager og tåler også å være på i dusjen. Kontroller bandasjen ofte og bytt den ut ved behov.

CatAbs™ er tilgjengelig med to hullstrl.: 3 og 7 mm. Merk at hullene er relativt fleksible og kan derfor tilpasses litt større kateter også.

Art.nr.	Skin X CatAbs™ Ø 70 mm	French	Absorpsjon
204641	Hullstr. 3 mm	Ca. 9F	10 ml
204642	Hullstr. 7 mm	Ca. 20F	10 ml

30 stk. per pakke