



seca 285, Mätstation **Wireless**



"Frankfurt Line"

Display



Art. Nr. 2857000199

Med mätstationen kan du väga och mäta på samma gång. Om du vill flytta den så har du hjälp av transporthjulen under pelaren. Vågdelens har hela 300 kg kapacitet samtidigt som skalindelningen går ned så långt som till 50 g. Mor/Barn funktionen ("2 i 1") fungerar utmärkt på seca 285. Dämpningen gör att du får korrekta resultat även när patienten inte kan vara still. Du kan också få automatiskt uträknad BMI.

seca 285 mätstation är förberedd för trådlös överföring av resultaten t.ex. till en seca skrivare och den kan t.o.m. integreras i ett nätverk där den kan leverera resultat till det elektroniska journalsystemet. Du bara aktiverar den/de funktioner som du vill använda.

Vågdelens drivs med medföljande [seca adapter](#). Längdmätaren drivs med helt vanliga AA batterier. Displayen visar, i god tid, när batterierna behöver bytas.

Grundfunktioner

- seca 285 mätstation visar vikten ända ned i 50g steg.
- Med "2 i 1"-knappen kan du väga ett barn i famnen på en vuxen, Mor/Barn-funktion.
- Ett helt nytt hjälpmedel på längdmätaren, vid sidan av huvudstödet (Frankfurt Line), hjälper dig att placera patientens huvud i rätt position.
- Huvudstödet har en bromsknapp som ska tryckas in när huvudstödet flyttas.



- Längdmätaren har HOLD-knapp som låser längden så den inte kan påverkas.
- seca 285 mätstation visar längden i en upplyst display (15/30 sek) på huvudstödet.
- Tryck på en knapp och längden förs över till huvuddisplayen och du får automatiskt BMI.
- Du kan också nollställa längdmätaren på valfri höjd så du t.ex. kan mäta sittande patienter.
- För att spara batteri stänger längdmätaren automatiskt av längdvisningen efter 1 minut.

Extra funktioner

- Aktivera en automatisk överföring av längden till huvuddisplayen för direkt BMI.
- Du kan aktivera en trådlös överföring av värdena till en seca skrivare så att du kan få ett kvitto. Eftersom överföringen är trådlös så kan du placera skrivaren ända upp till 10 meter bort.
- Ställ in automatisk radering av värden så de inte kan påverka efterföljande mätningar.
- seca 285 kan också kopplas upp i ett nätverk, trådlöst förstås, och leverera värdena till ett [analysprogram seca 105](#), via [seca 456 USB adapter](#).
- [seca 105](#) kan också föra över värdena till den elektroniska patientjournalen.

Kapacitet	300 kg. Skalindelning: 50 g < 150 kg > 100 g
Längdområde	30 - 220 cm. Gradering: 1 mm
Mätstationens mått (BxHxD)	440 x 2400 x 470 mm
Mätstationens totala vikt	16 kg
Direktiv	93/42/EEG, MDD



Tillbehör:
[Seca 465 och 466 skrivare](#)
för termopapper eller termopapper/etikett