



## Mediplast -joustava moduulijärjestelmä

- Liikuteltava tai jaloilla kiinteää asennusta varten. ”Sinä valitset”
- Järjestelmä on helposti muokattavissa. Hyllyjen korkeutta voi säätää säiliöiden ja tarpeen mukaan
- Ulosvedettävät hyllyt mahdollistavat toimivan ja ergonomisen työympäristön
- Hyllytasot ovat helposti poistettavissa esimerkiksi puhdistusta varten
- Enimmäiskuormitus: 20 kg/hyllytaso
- Kokonaispaino: enintään 450 kg



Tuotenro	Kuvaus (K x L x S)	Paino hyllyt mukaan lukien	Hyllyjen määrä
7047A001	1 900 x 745 x 600 mm	89 kg	16
7047A011	1 600 x 745 x 600 mm	74 kg	12
7047A016	850 x 745 x 600 mm	46 kg	6

Tuotenro	Kuvaus (K x L x S)
7047-A044	Kori moduulijärjestelmään 159 x 298 x 598 mm



Valmistettu Ruotsissa

#### Materiaali:

Mediplast-moduuli on valmistettu ruostumattomasta teräksestä EN 4301 pyöriä lukuun ottamatta.

Ulosvedettävä hyllytaso 7047A028 on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

Muovikisko POM-muovia luonnonvärinen.

Neliskulmainen tanko PHB-muovia.

#### Ylläpito:

Mediplast-moduuli ei vaadi puhdistusta suurempaa ylläpitoa.

Tarkista puhdistettaessa, että moduulin kiskot ovat paikoillaan ja kehys ehjä, eikä hitsauksessa ole halkeamia.

Pyörien tulee olla ehjät ja kunnolla kiinni. Jos pyörä irtoaa tai vahingoittuu, se tulee korjata välittömästi.

Ota yhteyttä Mediplastiin, jos tuotteessa ilmenee vika.

#### Puhdistus:

Moduuli, mutta ei ulosvedettäviä hyllyjä, voidaan pestä pesukoneessa.

Ulosvedettävät hyllyt puhdistetaan esimerkiksi alkoholipohjaisella pintadesinfektioaineella.

Käytä kemikaaleja, jotka on hyväksytty ja, jotka sopivat ruostumattomalle teräkselle.

#### HUOM!

Ota huomioon, että yksittäinen moduuli on painava! Vaikka sitä on helppo siirtää, liikuta sitä varovasti ahtaissa tiloissa, kynnysten yli tai kaltevalla pinnalla.

Valmistettu Ruotsissa