

# Chlorine Disinfection

## Floor Wipe med aktivt klor för engångsbruk



**Bredspektrad  
Spordödande  
Alltid rätt dosering**

### **Wet Wipe Chlorine Disinfection engångsmoppar impregnerade med klor i pulverform**

Förpackningen med tre moppar innehåller en påse med vätska. När påsen knäcks rinner vätskan ut i mopparna, som är klara för användning efter 10 minuter. Med Wet Wipe Chlorine Disinfection får du en optimal och enkel desinfektion.

### **Användningsområden**

Desinfektion av golv t.ex. för isolerade patienter. Desinficerar effektivt mot Norovirus och t.ex. HIV och Hepatitis B, vegetativa bakterier, mögel- och jästsvampar och uppfyller kravet på desinfektion vid utbrott av Clostridium difficile.

### **Bruksanvisning**

1. Lägg engångsmoppen på golvet.
2. Tryck på mopphuvudet på engångsmoppen.
3. Påbörja desinficeringen av golvet.
4. Engångsmoppen kasseras efter användning.

### **Obs!**

Engångsmopparna bevarar dess desinfektionseffekt på > 1 000 ppm aktivt klor i 7 dygn efter öppnandet.

Artikelnummer. 60172:


En förpackning innehåller tre moppar, 50 × 13 cm

### **Innehåll**

Aktivt klor > 1000–1200 ppm

Räcker till rengöring av 10 m<sup>2</sup>.

Tillverkad i Tyskland. Säkerhetsdatablad kan rekvideras.

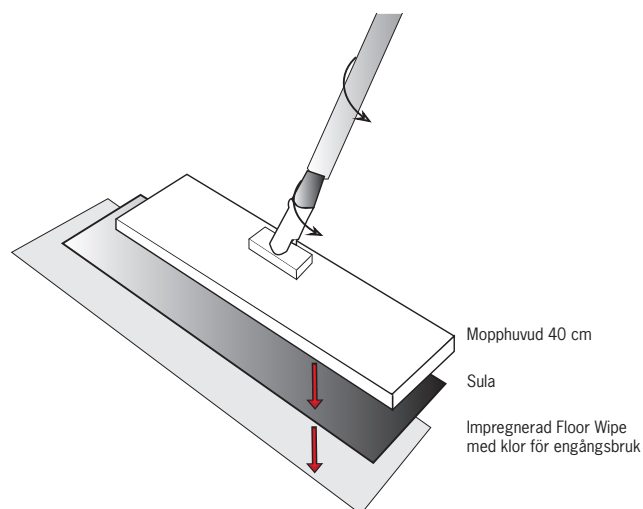

Wet Wipe A/S  
Vallensbækvej 65  
DK-2625 Vallensbæk  
Tel: +45 43 62 19 43  
info@wetwipe.dk  
www.wetwipe.dk  
CVR: 30207726

wetwipe®

74-070 SE, Ver 3

Mar 2020

Återförsäljare  
**Mediplast AB**  
Box 1004, 212 10 Malmö  
Tel: 020-78 80 35  
mediplast.info@mediplast.com  
www.mediplast.com

**MEDI PLAST®**