



Forberedelse før brug: NONELENS og NONEFRAME




MEDI PLAST

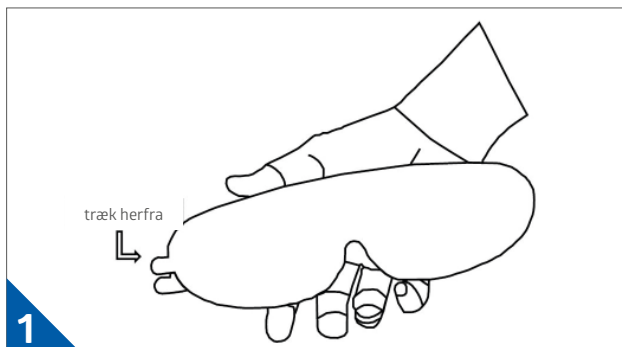


1 Fjern skærmen (NONELENS) fra dispenseræskan.

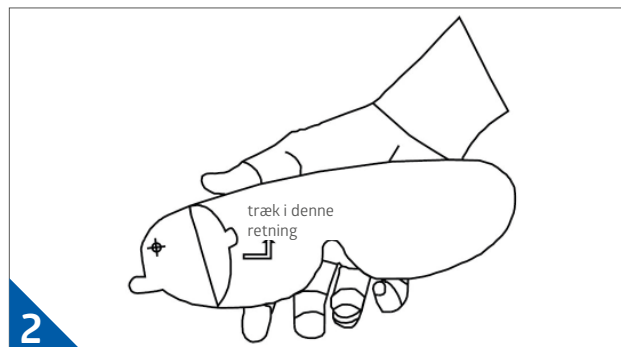


2 Fjern beskyttelsesfilmen ved at trække den øvre flig mod dig selv.

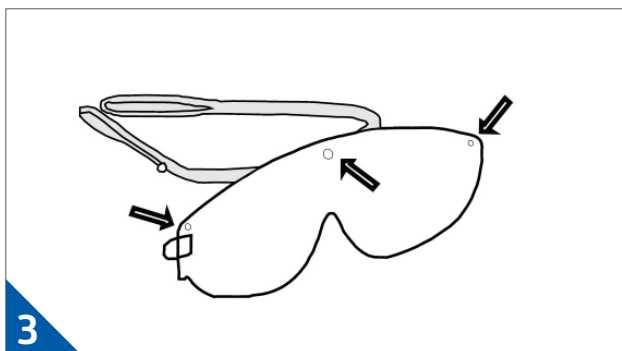

3 Tryk de 3 huller ind på den korresponderende ramme (NONEFRAME). Den resterende beskyttelsesfilm bør vende udad.

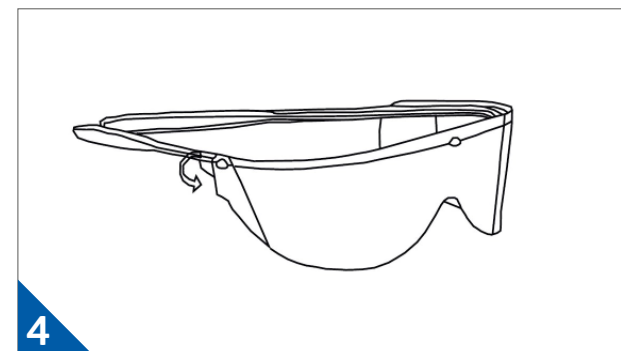

4 Fjern den ydre beskyttelsesfilm efter samme metode som trin 2.

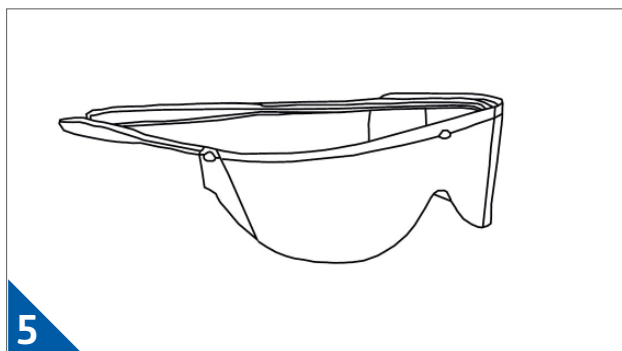

5 Du kan nu anvende beskyttelsesbrillen uden at den er blevet ridset.

Rengør eller desinficér NONEFRAME ved at aftørre med en væskebaseret klud på op til 70% isopropanol

Hvis du vil vide mere, kontakt vores Medioplast produktchef eller besøg www.medline.eu