


Surface Disinfection Wipes

Etanolbaserad 70%, Blue

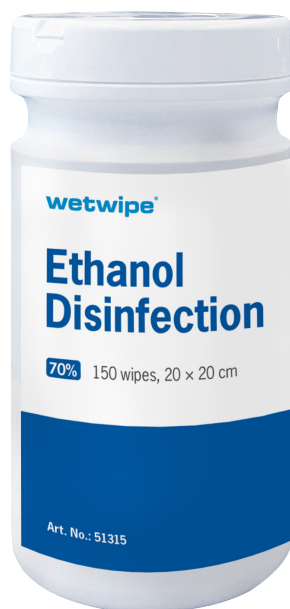

Artikelnr: 51315

Etanolbaserade desinfektionsdukar för rest- och sköjfri applicering på medicintekniska produkter och kontaktytor för livsmedel.

Produktinformation

Wet Wipe ytdesinfektionsdukar innehåller en 70% alkoholhaltig lösning baserad på etanol i farmaceutisk kvalitet. Etanolen är denaturerad med isopropanol och innehåller inte tensider och andra tillsatser. För rest- och sköjfri desinfektion av medicintekniska produkter och kontaktytor för livsmedel. Dukarna är gjorda av en blå viskos-polyesterväv med en hög och homogen impregnering av dukarna. I kombination med dukens ergonomi möjliggör det en enkel och smidig fördelning av desinfektionsvätskan på torkytor.

Dokumenterade tester

Produkten uppfyller tillämpliga europeiska standarder EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14776 och EN 16615 (vätsketestad med dukar) mot bakterier, mykobakterier och jäst.

	EN test	Verkningstid
Bakterier	EN 13727 EN 16615	60 s 2 min
Jäst	EN 13624 EN 16615	60 s 2 min
Mykobakterier	EN 14348	60 s

Användning

Lämplig för yrkesverksamma inom sjukhus, vårdhem, skolor och barninstitutioner, läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin, hotell, restauranger och cateringverksamhet, i stora kontor, transportsektorn och den offentliga sektorn. Rekommenderas också för privata användare. Använd till exempel dukarna för desinfektion av hjälpmedel, under resa, i snabbköpet och på gymmet. Används för desinfektion av hårda, icke-permeabla ytor. Behandla inte material som är känsliga för alkohol, t.ex. akrylglas (Plexiglas). Använd dukarna på rengjorda och torra ytor.

Expertutlåtande

Danska smitthygienexperter vid CEI (Central Enhet för Infektionshygien) har utvärderat och rekommenderat användning av etanoldesinfektionsprodukter från Wet Wipe.

**Artikelnr: 51315: Ethanol Disinfection Wipes
Kartong med 6 burkar
1 burk innehåller 150 dukar 20 x 20 cm**

Föreskrift

Produktbeteckning: Wet Wipe Ytdesinfektion 70% blue. Produkten klassificeras som en biocidprodukt i produkttyp 2 och 4. Wet Wipe A/S finns på den europeiska artikel 95-listan över godkända leverantörer av etanolprodukter. Produkten är CLP-klassificerad Flam.Liq.2 och uppfyller H319 (Mycket brandfarlig vätska och ånga).

Wet Wipe A/S
Vallensbækvej 65 DK-2625 Vallensbæk
Tel: +45 43 62 19 43
info@wetwipe.dk www.wetwipe.dk

CVR: 30207726

51315, EN, Ver. 1
May 2021

Återförsäljare:

MEDI PLAST

Medioplast AB
Box 1004, 212 10 Malmö
T 020-78 80 35
mediplast.info@mediplast.com
www.mediplast.com

wetwipe®

"Den EU-harmoniserade klassificeringen av etanol är endast Flam.Liq.2 och inkluderar inte Eye.Irrit."

Produkten är ADR klassificerad som fasta ämnen som innehåller brandfarlig vätska och kan därför undantas från de tekniska föreskrifterna för lagring och hantering av lättantändlig vätska. Produkter kan transporteras som begränsad mängd (nettoinnehåll i förpackning <1 kg)

Innehåll (fullständig lista)

Denaturerad etanol 70 volymprocent därav isopropanol (<5%).

Produkten omfattar inte parfym, färg och andra tillsatser och denatureringsmedel än isopropanol.

Använd desinfektionsmedel säkert. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Producerad i Tyskland.