



**ME
COVERS®**
ADDS INTEGRITY

MECOVERS INTEGRITETSVERN

Gir økt trygghet i forbindelse med undersøkelser

MeCovers er et skjørt som beskytter pasienters verdighet og reduserer ubehag forbundet med medisinske undersøkelser av underkroppen.

Med skjørtet kan pasienten dekke til kroppsdelene som hun eller han ikke ønsker å eksponere. På den måten kan de unngå den ubehagelige følelsen av å være utsatt og mangle kontroll.

MeCovers er et unisex-produkt som gir både kvinner og menn et annerledes og bedre møte med helsevesenet, i form av et beskyttende lag som styrker integritet og kontroll.


MeCovers er primært beregnet for bruk ved gynekologiske, urologiske og urogynekologiske undersøkelser. Produktet kan brukes hvor som helst og til alle former for medisinske undersøkelser eller helseundersøkelser, hvor kun en viss del av kroppen trenger å være fullt eksponert.

MeCovers er et engangsprodukt som holdes sammen av et elastisk bånd. Skjørtet kan enten tres over hodet eller tas på nedenfra. Åpningens plassering justerer i samsvar med undersøkelsen som skal utføres.

Artikkelnr.	Beskrivelse	Avd./Trpt.fp
K6600013	MeCovers Skjørt	10/100
K6600014	MeCovers Skjørt	150/150
D6600010	Dispenserboks til MeCovers Skjørt	1/4

Avd.fp = min.kvant/best

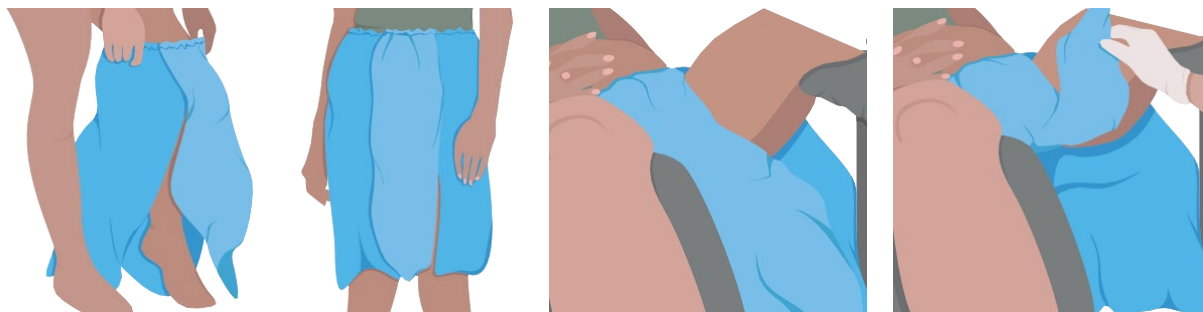

**OBS! Viktig informasjon**

- MeCovers er ikke steril og skal derfor ikke brukes på skadet hud eller ved åpne operasjoner. Har pasienten hud som er skadet, skal den dekkes til med plaster før skjørtet tas på.
- Noe statisk ladning kan forekomme. Ikke bruk ESD-følsomme elektroniske instrumenter sammen med skjørtet.
- Skjørtet produseres i én størrelse. Helsepersonell skal veilede pasienten: Er skjørtet for langt, skal pasienten holde det oppe når hun eller han går.

100% polypropylen

OBS! Kan smelte ved eksponering for høy varme eller åpen flamme

Medisinsk utstyr

I samsvar med EU's regulering MDR 2017/745, Klasse I, ikke steril

