

G-JET[®] gastrostomiport

Kort information för brukare



G-JET[®] gastrostomiport är designad för att ge mat och medicin till magsäcken eller Jejunum för de som inte kan få det via munnen. Gastrostomiporten är noggrant anpassad till gastrostomin på magen (ett litet hål direkt in till magsäcken). En ballong fylls med vatten genom en blå ventil på G-JET[®] så att denna hålls på plats inne i magsäcken. G-JET[®] har även en förlängning till Jejunum för administrering av mat eller medicin till brukare med det behovet.



Hygien

Tvätta händerna före och efter kontakt med G-JET® och matslangar.

Sköljning

Använd sprutan och skölj med vatten genom G-JET® 2 portar och matslangar före och efter matning. Om mat ges kontinuerligt via jejunumporten skall sköljningen göras var 6:e timme med minst 30 ml vatten för att förhindra stopp i slangen.

Rengöring

Rengör matslangarna med vatten efter varje användning. Låt dem lufttorka och förvara dem rent och torrt.

Förbrukning

Vid god hygien kan matslangarna användas i upp till 2 veckor.

Dagligt underhåll

Var noga med att hålla huden ren och torr runt gastrostomin.

Kontroll av ballong

Kontrollera ballongens vattenmängd en gång i veckan. Ta ut vattnet med en spruta och kontrollera att det är samma mängd vatten som sprutades in. Töm sprutan och fyll på med nytt vatten enligt tabell nedan.

FR	Minimum	Rekommenderad	Maximum
14FR	3 ml	4 ml	5 ml
16FR	3 ml	4 ml	5 ml
18FR	6 ml	7 ml	8 ml

Problemlösning:

Sårig hud / läckage:

- Kontakta läkare eller sjuksköterska som har hand om G-JET® om det:
- luktar
 - blöder
 - är rött och svullen
 - har var runt eller läcker sekret

Läckage från vattenventil / skadad ballong:

- Om det uppstår läckage av vatten från ballongen (genom ventilen på utsidan), dra ur resten av vattnet och ersätt med nytt vatten (samma mängd som tidigare).
- Om ballongen är skadad skall G-JET® bytas:
OBS! Ta inte ut G-JET®. Ta kontakt med din läkare som utförde ingreppet eller vänd dig till närmaste akutmottagning.
 Har den fallit ut utan att du har en ny, håll den på plats med ett plåster eller tape tills du får en ny.

OBS! Roterar ej G-JET®



Viktig information

Patientens namn: _____

Datum: _____

Storlek: _____

Längd: _____

Ballongen är cuffad (fylld) med: _____ ml vatten

Kontaktperson: _____

Tel.nr: _____

Övrig information:

EnFit matslangar – 10 st/fp	Till Ventrikel	Till Jejunum
Rak koppling (Bolus) med enkel port, 5 cm	6-0211-I	8-0211-I
Rak koppling (Bolus) med enkel port, 30 cm	6-1211-I	8-1211-I
Rak koppling (Bolus) med enkel port, 60 cm	6-2411-I	8-2411-I
Rak koppling (Bolus) med Y-port, 5 cm	6-0212-I	8-0212-I
Rak koppling (Bolus) med Y-port, 30 cm	6-1212-I	8-1212-I
Vinklad koppling med enkel port, 30 cm	6-1221-I	8-1221-I
Vinklad koppling med enkel port, 60 cm	6-2421-I	8-2421-I
Vinklad koppling med Y-port, 5 cm		8-0222-I
Vinklad koppling med Y-port, 30 cm	6-1222-I	8-1255-I
Vinklad koppling med Y-port, 60 cm	6-2422-I	8-2455-I

